

ICX-ALL-IN-ONE[®]

BOHRER

MEHR ALS
400 IMPLANTATE
MIT **1 BOHRER!**

PATENTIERTE
WELTNEUHEIT!



ENTDECKE DEN ICX-UNTERSCHIED.


medentis
medical

ICX-ALL-IN-ONE[®] BOHRER

ICX-ALL-IN-ONE-Bohrer

Die ICX-ALL-IN-ONE-BOHRER erweitern den Durchmesser während des chirurgischen Eingriffs schrittweise und sind so konzipiert, dass sie mit Standard-Chirurgiegeräten verwendet werden können, um den Knochen mit Drehung im Uhrzeigersinn präzise zu schneiden (800 U/min/Vorbohrer und 400 U/min/Normaler Bohrer).

Im Uhrzeigersinn, (rechts)
schneidende Richtung

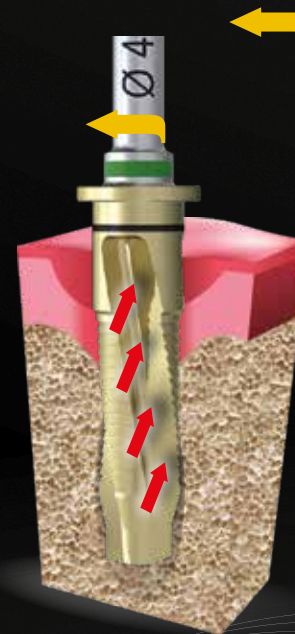

Schneide-Modus



ICX-SHOP!



ICX-ALL-IN-ONE[®]

BOHRER



*Die
Weltneuheit*



ICX-SHOP!

Ø 2,9mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Vorbohrer

D2/D3/D4-Bohrer,
1 Ring



Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER

Ø 2,9mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.

Bitte hier nur Bohrer mit 3 schwarzen Ringen verwenden!

Dieses Vorgehensweise ist für alle Längen identisch.

Vorbohrer



D1-Bohrer,
3 Ringe, schwarz



medentis
medical

www.medentis.de

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Ø 3,3mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur
eine Empfehlung.


Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implan-
tatsdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgege-
bene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden emp-
fohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte
werden empfohlen.

ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER

Vorbohrer

D2/D3/D4-Bohrer,
1 Ring

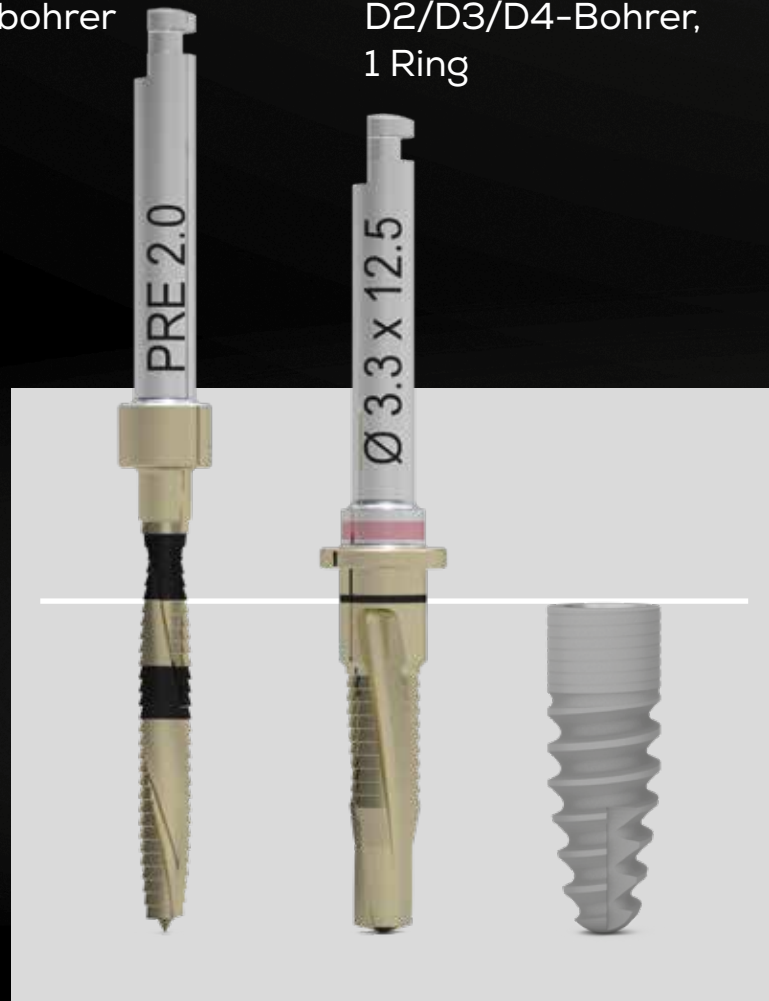

Ø 3,3mm D1


Bohrerprotokoll für harten Knochen.

Bitte hier nur Bohrer mit 3 rosa Ringen verwenden!

Dieses Vorgehensweise ist für alle Längen identisch.

D1-Bohrer,
3 Ringe, rosa

Vorbohrer

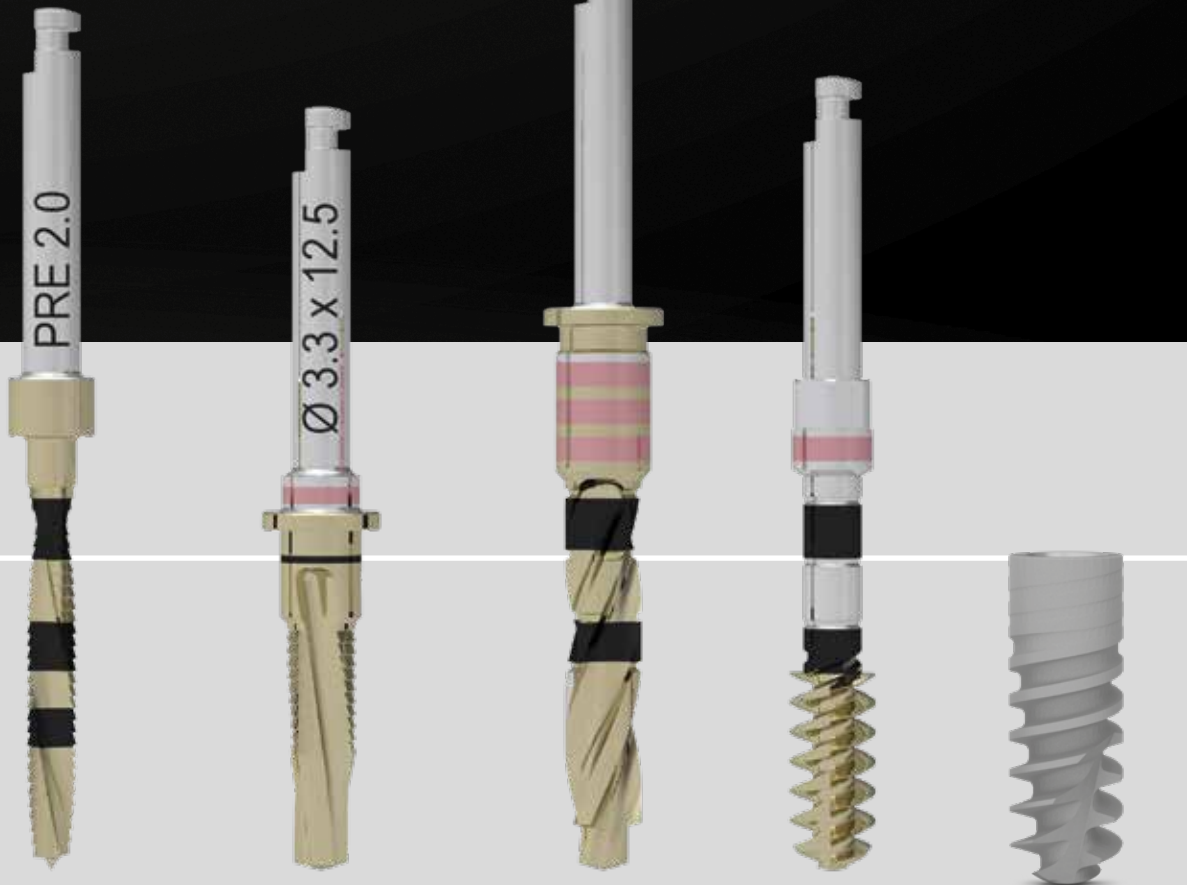

medentis
medical

www.medentis.de

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Ø 3,45mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur
eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implan-
tatsdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgege-
bene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden emp-
fohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte
werden empfohlen.

ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER

Vorbohrer

D2/D3/D4-Bohrer,
1 Ring



Ø 3,45mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.


Bitte hier nur Bohrer mit 3 gelben Ringen verwenden!

Dieses Vorgehensweise ist für alle Längen identisch.

Vorbohrer



D1-Bohrer,
3 Ringe, gelb

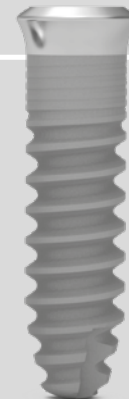

medentis
medical

www.medentis.de

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Ø 3,75mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur
eine Empfehlung.


Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implan-
tatsdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgege-
bene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden emp-
fohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte
werden empfohlen.

ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER

Vorbohrer

D2/D3/D4-Bohrer,
1 Ring

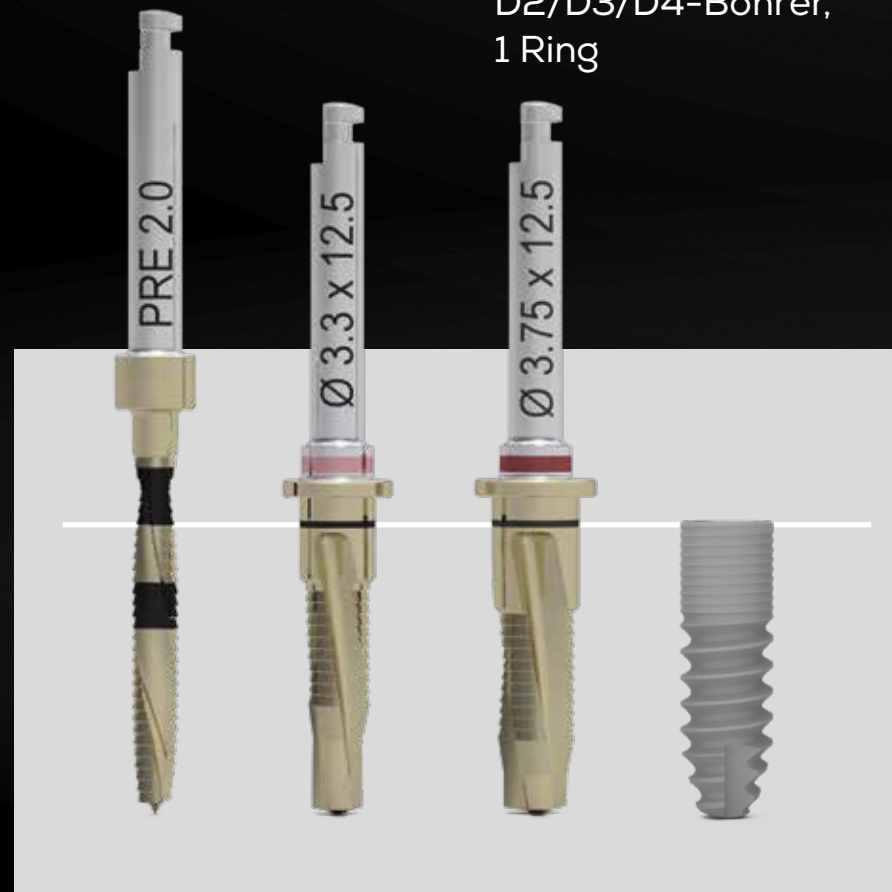

Ø 3,75mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.

Bitte hier nur Bohrer mit 3 roten Ringen verwenden!

Dieses Vorgehensweise ist für alle Längen identisch.

Vorbohrer

D1-Bohrer,
3 Ringe, rot

Optional
zu verwenden



medentis
medical

www.medentis.de

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Ø 4,1mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur
eine Empfehlung.


Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implan-
tatsdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgege-
bene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden emp-
fohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte
werden empfohlen.

ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER

Vorbohrer

D2/D3/D4-Bohrer,
1 Ring

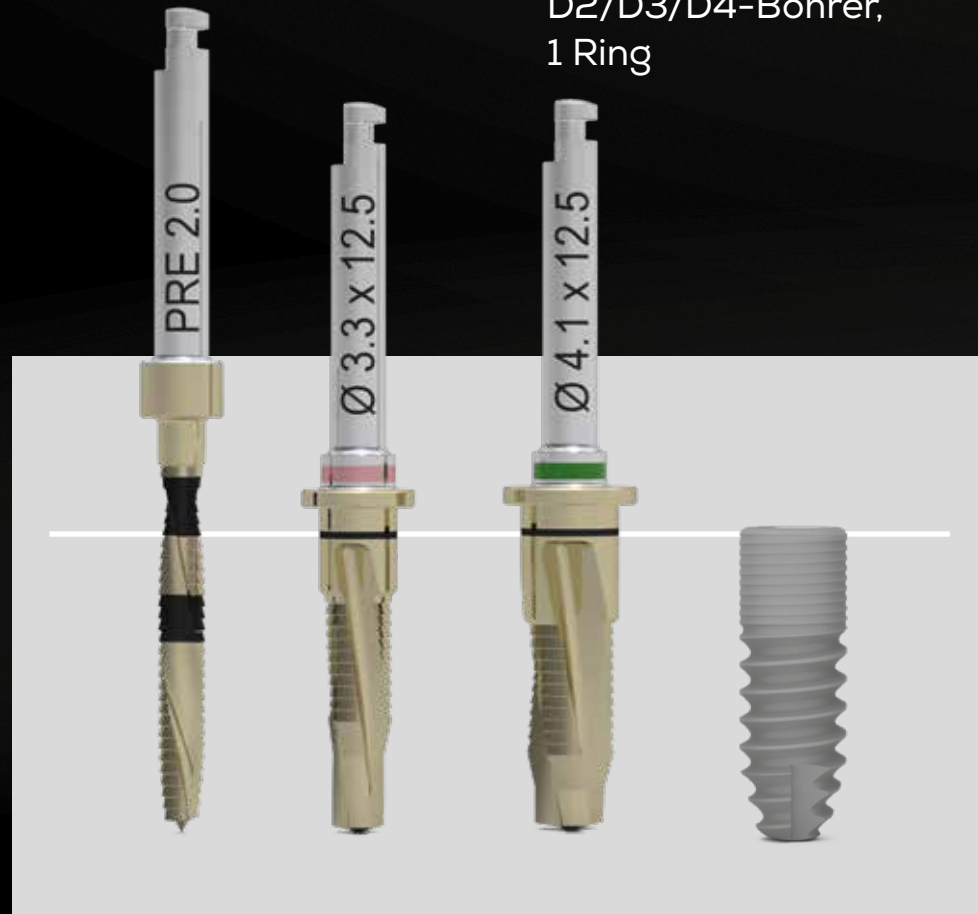

Ø 4,1mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.

Bitte hier nur Bohrer mit 3 grünen Ringen verwenden!

Dieses Vorgehensweise ist für alle Längen identisch.

Vorbohrer

D1-Bohrer,
3 Ringe, grün

Optional
zu verwenden

medentis
medical

www.medentis.de

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Ø 4,8mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.


Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER

Vorbohrer

D2/D3/D4-Bohrer,
1 Ring

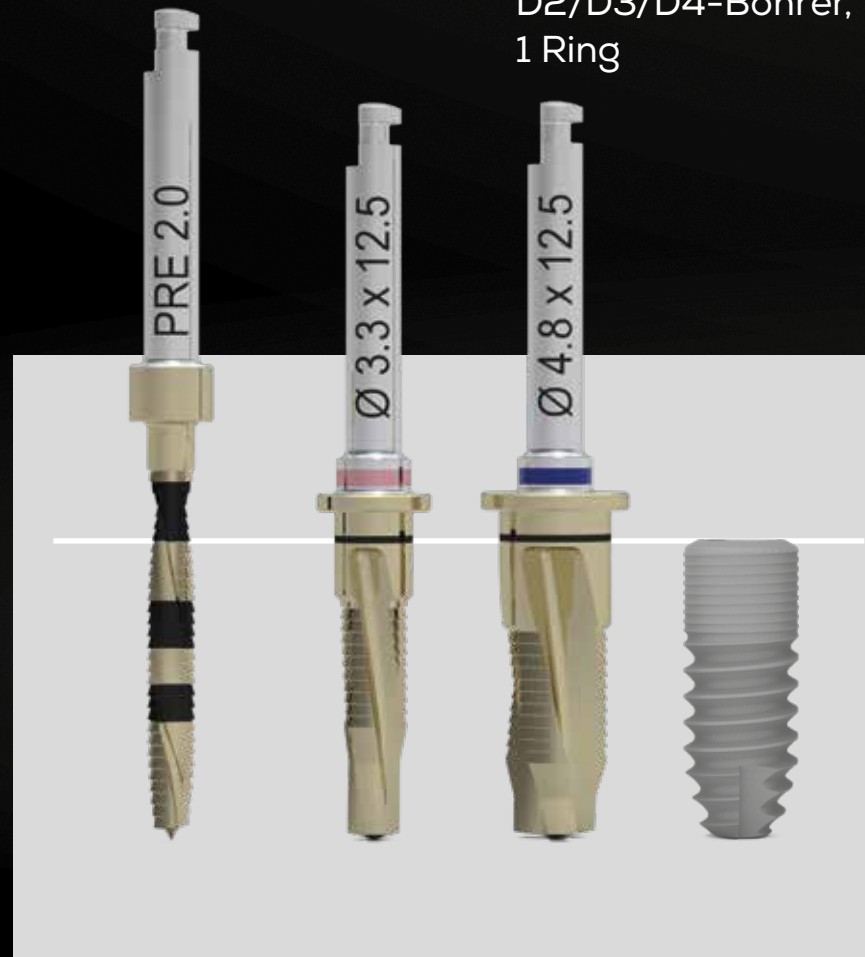

Ø 4,8mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.

Bitte hier nur Bohrer mit 3 blauen Ringen verwenden!

Dieses Vorgehensweise ist für alle Längen identisch.

Vorbohrer

D1-Bohrer,
3 Ringe, grün

D1-Bohrer,
3 Ringe, blau

Optional
zu verwenden



medentis
medical

www.medentis.de

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

ICX-ALL-IN-ONE[®]

CHIRURGIE BOX

*Die
WeltNeuheit*





VORSPRUNG DURCH INNOVATION.

medentis
medical

ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGIEBOX | INHALTSÜBERSICHT



ICX-SHOP!

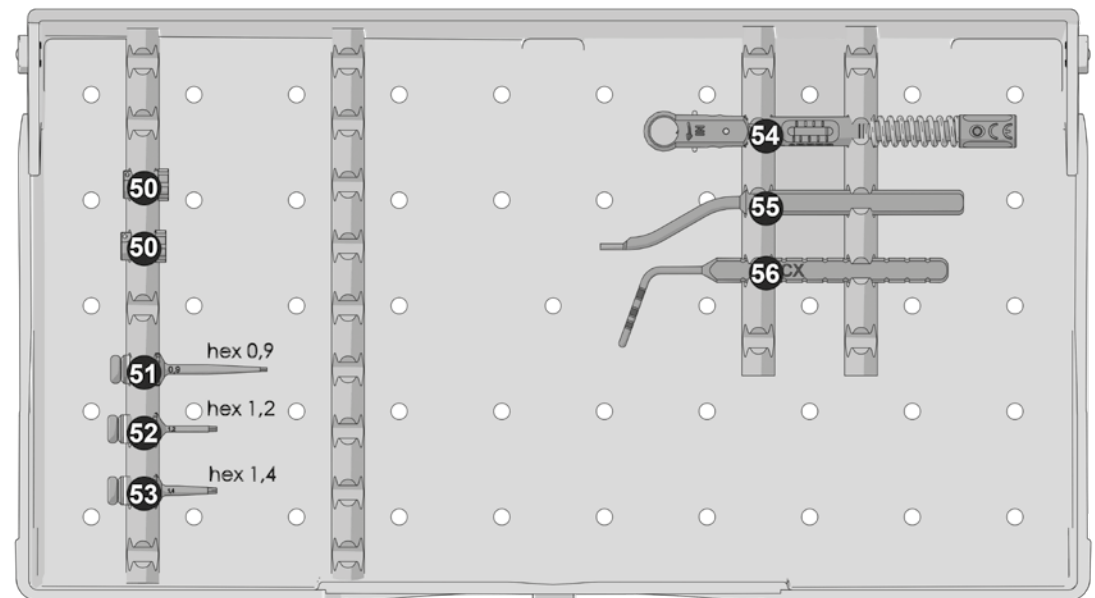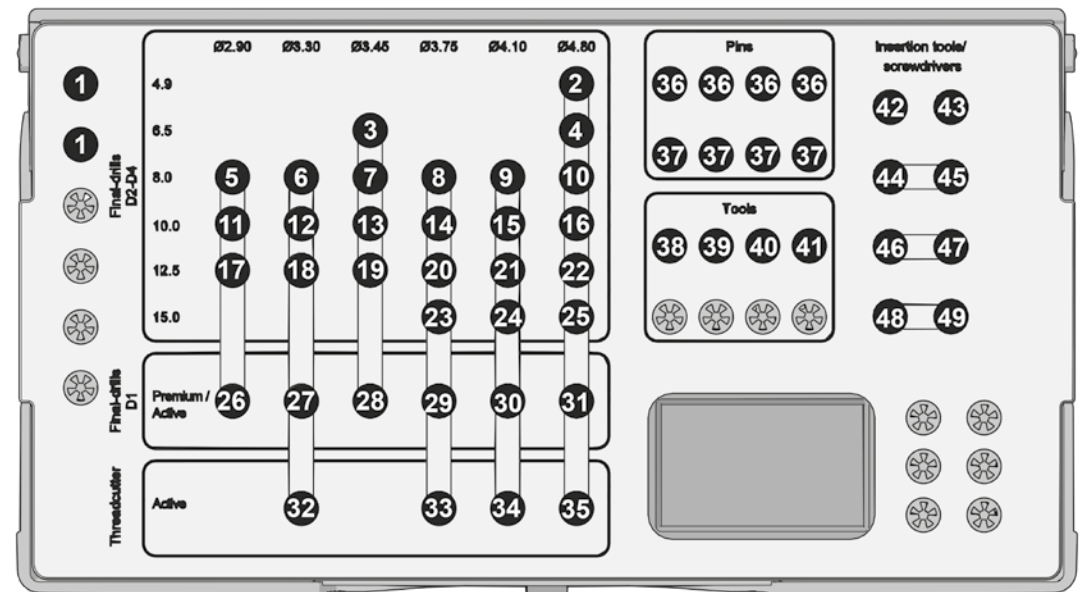

ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGIEBOX | INHALTSÜBERSICHT

Pos.-Nr.		Artikel-Nr.	Benennung	Bezeichnung
1	2	AIO-014-200000	All in one Vorbohrer	Ø 2,0
2	1	AIO-014-480049	All in one Bohrer	Ø 4,8 x 4,9
3	1	AIO-014-345065	All in one Bohrer	Ø 3,45 x 6,5
4	1	AIO-014-480065	All in one Bohrer	Ø 4,8 x 6,5
5	1	AIO-014-290080	All in one Bohrer	Ø 2,9 x 8
6	1	AIO-014-330080	All in one Bohrer	Ø 3,3 x 8
7	1	AIO-014-345080	All in one Bohrer	Ø 3,45 x 8
8	1	AIO-014-375080	All in one Bohrer	Ø 3,75 x 8
9	1	AIO-014-410080	All in one Bohrer	Ø 4,1 x 8
10	1	AIO-014-480080	All in one Bohrer	Ø 4,8 x 8
11	1	AIO-014-290100	All in one Bohrer	Ø 2,9 x 10
12	1	AIO-014-330100	All in one Bohrer	Ø 3,3 x 10
13	1	AIO-014-345100	All in one Bohrer	Ø 3,45 x 10
14	1	AIO-014-375100	All in one Bohrer	Ø 3,75 x 10
15	1	AIO-014-410100	All in one Bohrer	Ø 4,1 x 10
16	1	AIO-014-480100	All in one Bohrer	Ø 4,8 x 10
17	1	AIO-014-290125	All in one Bohrer	Ø 2,9 x 12,5
18	1	AIO-014-330125	All in one Bohrer	Ø 3,3 x 12,5
19	1	AIO-014-345125	All in one Bohrer	Ø 3,45 x 12,5
20	1	AIO-014-375125	All in one Bohrer	Ø 3,75 x 12,5
21	1	AIO-014-410125	All in one Bohrer	Ø 4,1 x 12,5
22	1	AIO-014-480125	All in one Bohrer	Ø 4,8 x 12,5
23	1	AIO-014-375150	All in one Bohrer	Ø 3,75 x 15
24	1	AIO-014-410150	All in one Bohrer	Ø 4,1 x 15
25	1	AIO-014-480150	All in one Bohrer	Ø 4,8 x 15
26	1	AIO-014-007290	All in one Bohrer	Ø 2,9 D1
27	1	AIO-014-007330	All in one Bohrer	Ø 3,3 D1
28	1	AIO-014-007345	All in one Bohrer	Ø 3,45, D1
29	1	AIO-014-007375	All in one Bohrer	Ø 3,75, D1
30	1	AIO-014-007410	All in one Bohrer	Ø 4,1, D1
31	1	AIO-014-007480	All in one Bohrer	Ø 4,8, D1

32	1	AIO-014-004330	All in one Gewindeschneider	Ø 3,3
33	1	AIO-014-004375	All in one Gewindeschneider	Ø 3,75
34	1	AIO-014-004410	All in one Gewindeschneider	Ø 4,1
35	1	AIO-014-004480	All in one Gewindeschneider	Ø 4,8
36	4	C-014-350410	Parallelpin	D=3.5/4.1mm
37	4	C-014-230315	Parallelpin	D=2.3/3.15mm
38	1	960004	Bohrerverlängerung	
39	1	C-014-006002	Knochenfraeser	
40	1	C-014-006003	ICX 3.3 Knochenfraeser	rosa / rose
41	1	C-014-000003	Crestotom Bohrer	
42	1	C-015-100007	ICX t-bona Einbringinstrument ISO-Schaft	ICX T-bona Schraube
43	1	C-020-000001	Multi Einbringinstrument ISO-Schaft	L=24mm
44	1	960002	Schraubendreher ISO-Schaft	hex 0.9mm L=20mm
45	1	C-015-100006	ICX-Mini Einbringinstrument ISO-Schaft	
46	1	C-015-100033	Schraubendreher ISO-Schaft	hex 1.2mm L=25mm
47	1	N-015-100002	ICX-3.3 Einbringinstrument ISO-Schaft	L=29mm
48	1	950099	Schraubendreher ISO-Schaft	hex 1.4mm kurz
49	1	C-015-100002	ICX Einbringinstrument ISO-Schaft	L=29mm
50	2	960007	Universal Ratschenadapter	
51	1	C-015-100029	Schraubendreher	hex 0.9mm
52	1	C-015-100030	Schraubendreher	hex 1.2mm
53	1	C-015-100025	Schraubendreher	hex 1.4mm mittel/middle
54	1	960001	Drehmomentratsche	
55	1	C-015-100009	ICX-Mini Konterwerkzeug	
56	1	C-015-100003	Tiefenmesssonde	
57	1	C-018-100000	ICX All in one Box	ungefüllt

ICX-ALL-IN-ONE[®] BOHRER

MEHR ALS
400 IMPLANTATE
MIT **1 BOHRER!**



ICX-SHOP!

PATENTIERTE
WELTNEUHEIT!

ENTDECKE DEN ICX-UNTERSCHIED.

medentis
medical

www.medentis.de