
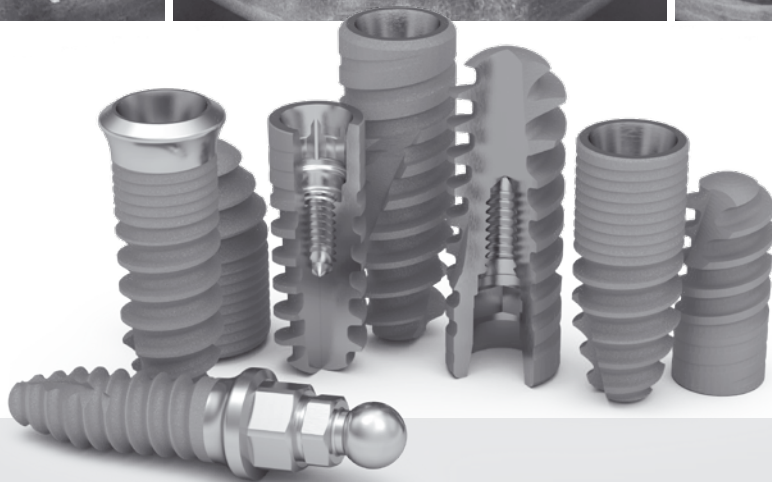


ICX-IMPLANTATE

UND IHRE INDIKATIONSMÖGLICHKEITEN.

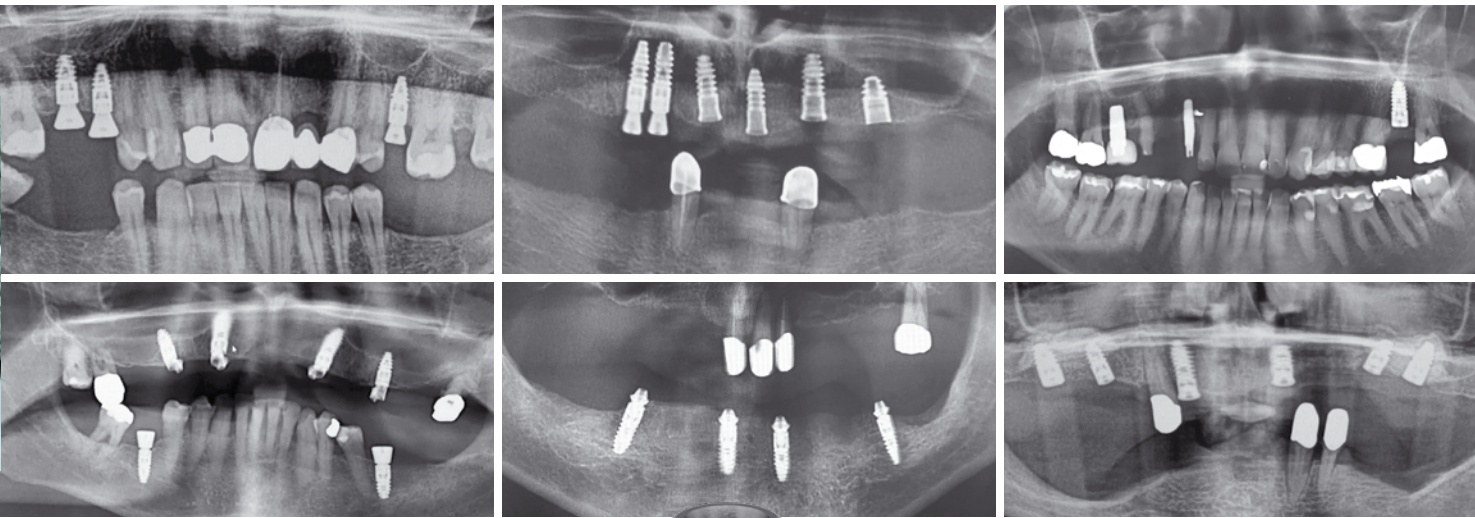

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

DAMIT SIE WISSEN, FÜR WELCHE INDIKATIONEN
SIE WELCHES ICX-IMPLANTAT VERWENDEN KÖNNEN!

ERFOLG DURCH VERTRAUEN.

medentis
medical

ICX-IMPLANTATE SIND VERTRAUENSACHE.

Die ICX-Implantate ICX-PREMIUM® (BL & TL), ICX-ACTIVE-MASTER® (BL & TL) und ICX-DIAMOND® (BL & TL) werden in den teilweise zahnlosen oder zahnlosen Ober- und/oder Unterkiefer inseriert und dienen der Befestigung von Zahnersatz zur Rehabilitation der Kaufunktion und Ästhetik im Ober- und/oder Unterkiefer.

Grundsätzlich wird eine Behandlung mit Implantaten nur bei Patienten mit abgeschlossenem Wachstum des Kieferknochens empfohlen. Als Faustregel gilt immer, den größtmöglichen Implantatdurchmesser zu verwenden und dass das Implantat zirkulär von 1,25mm Knochen umgeben ist. Eine Sofort-, verzögerte Sofort-, oder Spätimplantation ist in Verbindung mit Brücken, Teleskop-Konuskronen, Prothesen und Stegkonstruktionen möglich. Eine Sofortbelastung, frühzeitige oder späte Belastung der Implantate ist möglich. Für eine Sofortbelastung sollte das Implantat mit einem endgültigen Drehmoment von mindestens 35 Ncm inseriert worden sein und zirkulär 1,5mm Knochen um das Implantat vorhanden sind.

Die Einheilzeit kann sowohl gedeckt als auch transgingival mit gingivaformenden Bauteilen erfolgen. Grundsätzlich empfehlen wir bei Einzelzahnversorgungen ICX-DIAMOND®, ICX-PREMIUM® oder ICX-ACTIVE-MASTER® zu verwenden.

Die ICX-MINI® und ICX-MINI® maschinenpolierten Implantate sind zur Stabilisierung von schleimhautgetragenen Prothesen im zahnlosen Ober- und/oder Unterkiefer vorgesehen.

ICX-MINI
Ø 2,9mm

in 8, 10 und
12,5mm Länge



Das ICX-MINI / ICX-MINI maschinenpolierte Implantat sollte nur im Falle einer geringeren mechanischen Belastung verwendet werden. Von der Verwendung im molaren Bereich ist grundsätzlich abzuraten.

Der Einsatz der ICX-MINI / ICX-MINI maschinenpoliert 2.9mm als zusätzlicher Brückenpfeiler kann nicht empfohlen werden, im Ausnahmefall höchstens als ein zusätzlicher Pfeiler als Ersatz für ein Zwischenglied oder Anhänger und dann auch nur, wenn die Anzahl der Standard-Implantate (größer als 3,75mm Durchmesser) mindestens doppelt so hoch ist wie die ICX-MINI-Implantate.

ICX-PREMIUM® IMPLANTATE

ICX-PREMIUM® BONELEVEL (BL)

Durchmesser und Längen:


in 8, 10, 12,5 und 15mm Länge



ICX-PREMIUM® TISSUE LEVEL (TL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3,45mm	in 6,5, 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 3,75mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,1mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,8mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge

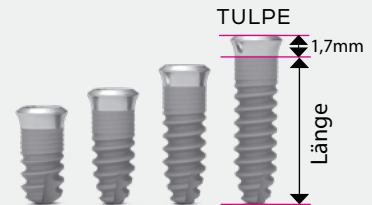

zusätzlich


Ø 4,8mm in 4,9mm und 6,5mm Länge!



ICX-ACTIVE-MASTER® IMPLANTATE

ICX-ACTIVE-MASTER® BONELEVEL (BL)


in 8, 10, 12,5 und 15mm Länge

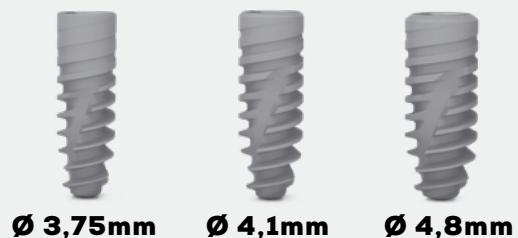

ICX-ACTIVE-MASTER® TISSUE LEVEL (TL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3,75mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,1mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,8mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge

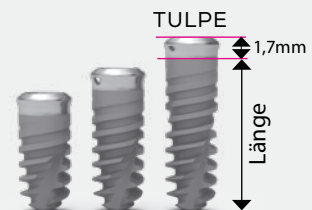

Alle Ø 3,45, Ø 3,75, Ø 4,1 und Ø 4,8mm haben dieselbe Innengeometrie!

In folgenden Ausgangssituationen sind ICX-Implantate in den Durchmessern 3,45, 3,75, 4,1 und 4,8mm (ICX-PREMIUM®, ICX-ACTIVE-MASTER® und ICX-DIAMOND® als BL und TL) indiziert:

- Einzelzahnversorgung
- Teilbezahnte Kiefer
- Komplett zahnloser Ober- und/oder Unterkiefer

ICX-DIAMOND® PREMIUM BONELEVEL (BL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3,75mm · Ø 4,1mm · Ø 4,8mm
in 8, 10, 12,5 und 15mm Länge



ICX-DIAMOND® PREMIUM TISSUE LEVEL (TL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3,45mm	in 6,5, 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 3,75mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,1mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,8mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge



zusätzlich Ø 4,8mm · in 4,9mm und 6,5mm Länge!

ICX-DIAMOND® ACTIVE MASTER BONELEVEL (BL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3,75mm · Ø 4,1mm · Ø 4,8mm
in 8, 10, 12,5 und 15mm Länge



ICX-DIAMOND® ACTIVE-MASTER TISSUE LEVEL (TL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3,75mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,1mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge
Ø 4,8mm	in 8, 10 und 12,5mm Länge



*Die Definition von GIGA-TITAN:
Rein Titan Grad 4KV mit 1.100 MPa.

= UNSCHLAGBAR EINFACH & GÜNSTIG!



» **ICX – das Original –
hält was es verspricht.
Die Nr. 1 für Zahnarzt-
praxen, weil hier alles
perfekt zusammen passt.
Preis, Qualität
und Service = TOP!** «

ICX

DAS FAIRE PREMIUM
IMPLANTAT-SYSTEM.



Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de


Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis
medical

ICX-PREMIUM BL

Ø 3,3mm

in 8, 10 und
12,5mm Länge

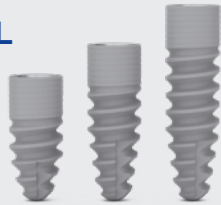

ICX-ACTIVE-MASTER BL

Ø 3,3mm


in 8, 10 und
12,5mm Länge



ICX-PREMIUM TL

Ø 3,3mm


in 8, 10 und
12,5mm Länge

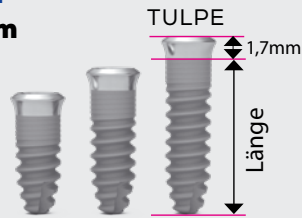

ICX-ACTIVE-MASTER TL

Ø 3,3mm

in 8, 10 und
12,5mm Länge

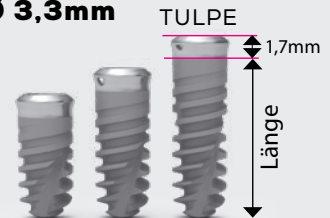

3.3 ICX-PREMIUM®, ICX-ACTIVE-MASTER® und ICX-DIAMOND® BL und TL-Implantate

haben eine eigenständige Innengeometrie (Prothetiklinie). Mit einem Durchmesser von 3,3mm dürfen sie ausschließlich für folgende Indikationen verwendet werden:

- Einzelzahnversorgung: Eck- und Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer
- Teilbezahnte Kiefer: Freidend- und Schaltlücken,
bei implantatgetragenen, festsitzenden Versorgungen wird eine verblockte Kombination mit Implantaten grösseren Durchmessers empfohlen.
- Zahnlose Kiefer: Es müssen mindestens vier Implantate miteinander verbunden werden.

ICX-DIAMOND® IMPLANTATE – AUS GIGA-TITAN*/HYDROPHIL

ICX-DIAMOND® PREMIUM BONELEVEL (BL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3.3mm

in 8, 10, 12,5mm Länge



ICX-DIAMOND® PREMIUM TISSUE LEVEL (TL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3.3mm

in 8, 10, 12,5mm Länge!



ICX-DIAMOND® ACTIVE MASTER BONELEVEL (BL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3.3mm

in 8, 10, 12,5mm Länge



ICX-DIAMOND® ACTIVE-MASTER TISSUE LEVEL (TL)

Durchmesser und Längen:

Ø 3.3mm

in 8, 10, 12,5mm Länge



*Die Definition von GIGA-TITAN:
Rein Titan Grad 4KV mit 1.100 MPa.

WICHTIGER HINWEIS: Alle angegebenen Indikationsmöglichkeiten verstehen sich ausschließlich als Empfehlungswerte von medentis medical.
Sie ergänzen die Erfahrungswerte der ChirurgInnen.

ICX. DAS ORIGINAL FÜR IHREN ERFOLG.

WIR MACHEN GLÜCKLICHE ZAHNÄRZTE-INNEN UND GLÜCKLICHE PATIENTEN.

Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich die medentis medical GmbH mit dem ICX-System als feste Größe unter dem Begriff „Volksimplantat“ auf dem deutschen Implantatmarkt etabliert. Ursprünglich lanciert mit dem Ziel, ein kostengünstiges und somit breit zugängliches Implantatsystem zu bieten, integriert ICX die Erkenntnisse aus zwei Jahrzehnten erfolgreicher Implantologie in einem Produkt.

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis konnte medentis medical eine weltweite Nutzerbasis aufbauen, die insbesondere die zuverlässige Qualität der ICX-Premium-Implantate schätzt. Heute zählt das ICX-System laut Hersteller zu einem der führenden Implantatsysteme in Deutschland und ist somit zu einem echten „Erfolgsimplantat“ geworden.

ICX ist nicht nur außergewöhnlich wegen der bewährten Oberfläche, der geschützten Gewindeform, der leicht konischen Implantatform und der sehr stabilen, konischen und rotationsgeschützten Innenverbindung und seiner übersichtlichen und einfachen Prothetik sondern steht gleichzeitig für eine außergewöhnlich stabile Preispolitik. Denn medentis überzeugt bereits seit über 17 Jahren mit stabilen Preisen für sein faires ICX-PREMIUM Implantat-System.




**MIT QUALITÄT,
VERTRAUEN UND
FAIRNESS ZUM
MARKTFÜHRER IM
VALUE MARKT IN
DEUTSCHLAND.**



**HAPPY LIFE*
GARANTIE!**

ICX-SHOPI

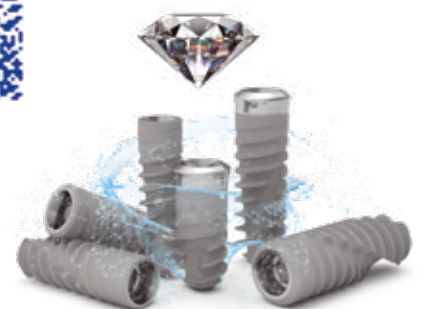

“HAPPY LIFE Garantie” bedeutet so lange, wie es medizinisch möglich ist, den Patienten mit einer neuen dentalen Versorgung unter Zuhilfenahme von Implantaten zu versorgen. Die “HAPPY LIFE Garantie” gilt nur für verkaufte ICX-Implantate in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

medentis medical bietet Ihnen mit seinen drei ICX-Implantat-Linien – für Praxen wie auch für Ihre Patienten – die passende Lösung. Das faire ICX-System hat sich über die letzten 17 Jahre zum Marktführer im Value Markt in Deutschland entwickelt. Stabile Preise, die hohe Qualität der Produkte, die Einfachheit des ICX-Systems und unser TOP-Service haben sich in den Zahnarztpraxen durchgesetzt und ICX zum „Original“ gemacht.