


ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

March 25 - mm02725_GER

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

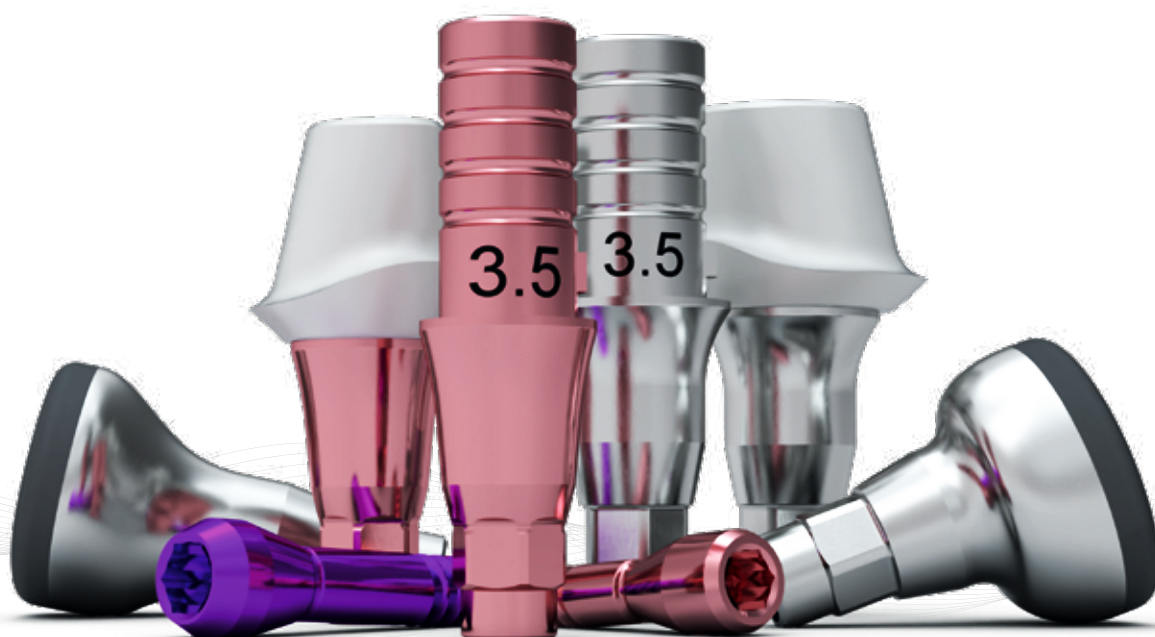

ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT: DAS ERSTE REIN DIGITALE KONZEPT FÜR EXPERTEN

Nur für eine exklusive Anwendergruppe: Arbeiten Sie mit dem ICX-Zero Bone Loss® Konzept, basierend auf Intraoral-Scan-Technologie und erleben Sie die Zukunft der digitalen Implantologie.



➡ Für Frontzahn, Prämolare, Molare



DIGITAL. DENTAL. FINAL.

medentis
medical



medentis
medical

**ALEXANDER
SCHOLZ**

CEO, Gesellschafter
und Gründer
medentis medical

ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT – OPTIMIERT UND ANGEPASST!

ICX-Zero Bone Loss® ist eine Produktlinie mit angepassten Gingivaformern und Abutments, beziehungsweise Klebebasen. Die Gingivaformer wurden speziell für den Frontzahn-, Prämolaren- und Molaren- Bereich entwickelt und für das entsprechende Durchtrittsprofil optimiert.

ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT: DAS ERSTE REIN DIGITALE KONZEPT FÜR EXPERTEN DER IMPLANTOLOGIE

medentis medical setzt neue Maßstäbe: Das ICX-Zero Bone Loss® Konzept eröffnet als erste rein digitale Lösung den Weg in eine neue Ära der Implantologie.

Arbeiten Sie mit diesem einzigartigen Konzept nur auf Basis eines Intraoral-Scans und sichern Sie sich einen Platz in einer exklusiven Anwendergruppe, die von unserer Innovationsführerschaft profitiert. Bleiben Sie am Puls der Zukunft und gestalten Sie die digitale Zahnmedizin aktiv mit.

**RUFEN SIE UNS AN – WIR REAGIEREN SOFORT:
TEL.: 02641 9110-0**

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS


ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT – KANN EFFIZIENTEN KNOCHEN-ERHALT NACH BEWÄHRTEN WISSENSCHAFTLICHEN PRINZIPIEN ERMÖGLICHEN

Das ICX-Zero Bone Loss® Konzept von medentis medical wurde entwickelt, um den Erhalt des Knochens nach Implantationen zu verbessern und basiert dabei auf etablierten wissenschaftlichen Konzepten. Diese Konzepte sind in zahlreichen unabhängigen Studien und Veröffentlichungen belegt, unter anderem in den Arbeiten von Dr. Tomas Linkevičius. Dr. Linkevičius hat in mehreren Studien, Büchern und Fachartikeln herausgearbeitet, wie der Verlust von Knochensubstanz um Implantate nachhaltig verhindert werden kann.



ICX-ZERO BONE LOSS VORTEILE

Die neuen ICX-ZERO BONE LOSS® Abutments bieten ein anatomisch optimiertes Emergenzprofil.

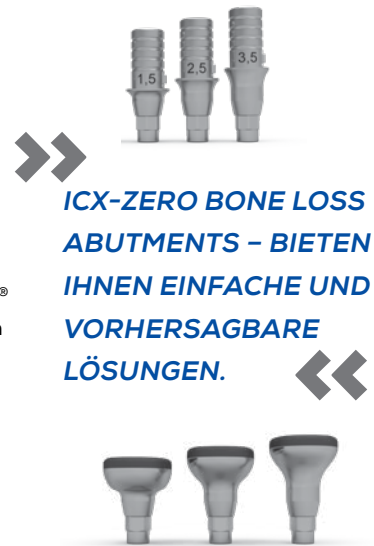

Obwohl wir nicht in direkter Zusammenarbeit mit Dr. Linkevičius standen, basieren unsere Entwicklungen auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in seinem Buch „Zero „Bone Loss Concepts“ (2019) sowie seinen Publikationen in angesehenen Fachzeitschriften wie „The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants“ (Linkevičius et al., 2013) und „Clinical Oral Implants Research“ (Linkevičius et al., 2016) veröffentlicht wurden. In diesen Arbeiten beschreibt er detailliert, wie subkrestale Implantatplatzierungen und die Berücksichtigung von Weichgewebisdicken einen signifikanten Einfluss auf den Erhalt des Knochens haben*.

Unser ICX-Zero Bone Loss® Aufbauten-Konzept wurde gemäß diesen Prinzipien entwickelt und bietet Ihnen drei Grundformen:

- ➔ Frontzahn – für ästhetisch anspruchsvolle Bereiche — 
- ➔ Prämolare – für den mittleren Bereich — 
- ➔ Molar – für die hinteren Zähne — 

medentis
medical

ICX-DENTAS
exocad
3shape



Hier zur Exocad Datenbank
CAD/CAM

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

DIE STUDIEN* VON DR. LINKEVIČIUS ZEIGEN:

- **Anpassung an Gingivahöhen:** Die verschiedenen Aufbauten bieten eine präzise Anpassung an das Weichgewebe, was den Knochenerhalt unterstützt. Diese Erkenntnisse basieren auf Untersuchungen, wie sie in „The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants“ (2013) veröffentlicht wurden (Linkevičius et al., 2013).
- **Langfristige Stabilität:** Das Konzept gewährleistet langfristige Ergebnisse durch die Kombination aus chirurgischen und prothetischen Faktoren, die in „Clinical Implant Dentistry and Related Research“ (2015) detailliert beschrieben wurden (Linkevičius et al., 2015).

Unsere Broschüre stellt alle Informationen zum ICX-Zero Bone Loss® Konzept zur Verfügung. Sie beschreibt die Grundformen, verschiedene Gingivahöhen und gibt klinische Tipps zur Anwendung. Darüber hinaus verweisen wir auf unabhängige wissenschaftliche Quellen, die als Grundlage für unser Konzept dienen, darunter Dr. Linkevičius' Buch „Zero Bone Loss Concepts“ (2019) sowie seine Studien, die international anerkannt sind.

Mit ICX-Zero Bone Loss® bieten wir Ihnen ein Konzept, welches auf wissenschaftlich fundierten Lösungen basiert, die sich einfach in der Praxis umsetzen lassen, und Ihnen helfen wird Patienten langfristig zu sichern.


*Studienverweise:

1. Linkevičius, T. et al. (2013). „The Influence of Vertical Soft Tissue Thickness on Crestal Bone Changes Around Implants Placed Subcrestally“. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 28(3), 552-560.
DOI: 10.11607/jomi.2932
2. Linkevičius, T. et al. (2015). „Prosthetic Factors Influencing Crestal Bone Stability: A Systematic Review“. Clinical Implant Dentistry and Related Research, 17(S2), e112-121.
DOI: 10.1111/cid.12162
3. Linkevičius, T. et al. (2016). „Subcrestal Implant Placement and Vertical Soft Tissue Thickness as a Preventative Measure Against Crestal Bone Loss“. Clinical Oral Implants Research, 27(10), 1237-1243.
DOI: 10.1111/clr.12712
4. Linkevičius, T. (2019). Zero Bone Loss Concepts. Quintessence Publishing. ISBN: 978-0-86715-799-4.

Verfügbar unter: Quintessence Publishing

Ein weiterer Vorteil des Dr. Linkevičius-Konzepts ist eine verminderte Resorption des periimplantären Knochens, durch die Umsetzung der aufeinander abgestimmten Produkte und der Scan-Fähigkeit der Gingivaformer.

- ➡ Die ICX-Zero Bone Loss® Gingivaformer sind scanfähig.
- ➡ Sie sind für Interoral-Scanner und Dentale-Scanner erkennbar.
- ➡ Die errechneten STL-Daten spiegeln die Form und die Höhe wider.
- ➡ Für Exocad gibt es eine Datenbank mit allen Höhen, Durchmessern, für Klebebasen in unterschiedlichsten Höhen. (Infos siehe Seite 26/27)

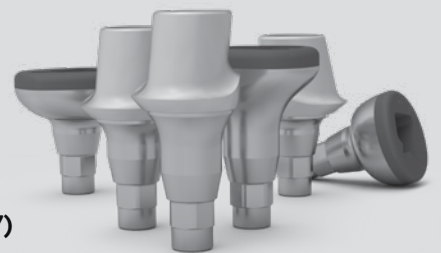


SIE HABEN NOCH FRAGEN?

RUFEN SIE UNS AN – WIR REAGIEREN SOFORT:

TEL.: 02641 9110-0

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

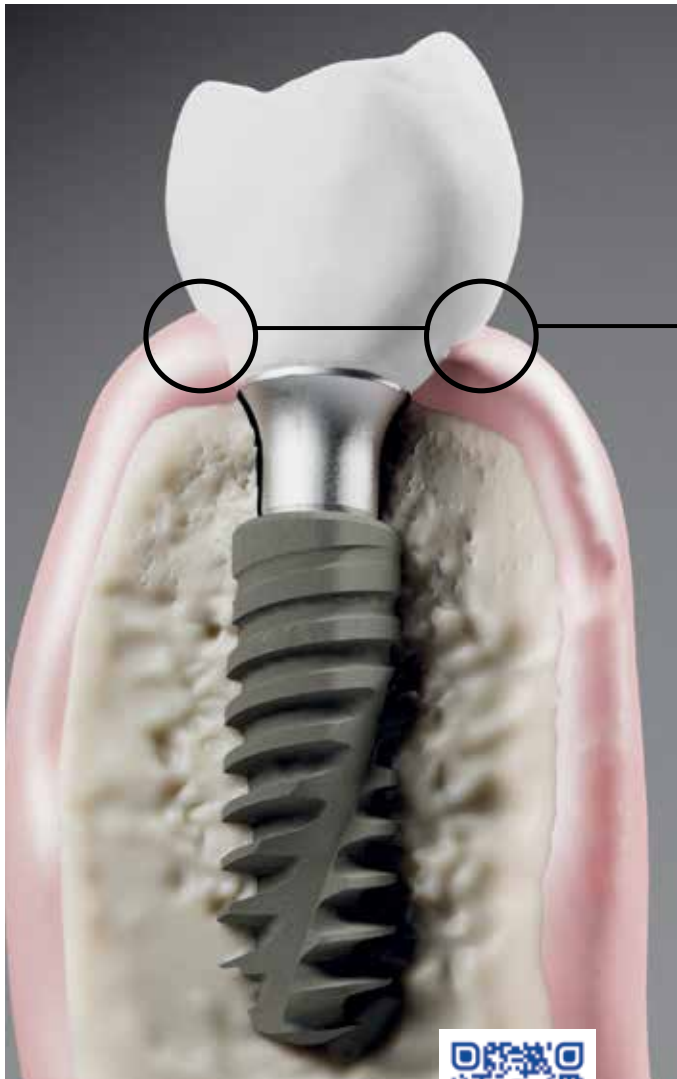


ICX-ZERO BONE LOSS® VORTEILE

Die neuen ICX-ZERO BONE LOSS® Abutments bieten ein anatomisch optimiertes Emergenzprofil.

WICHTIGER HINWEIS!

Achten Sie bei der Auswahl der jeweiligen Gingivaformer, auf die Anzahl der Rillenvertiefung. Diese zeigen die gewünschte Gingivahöhe an.

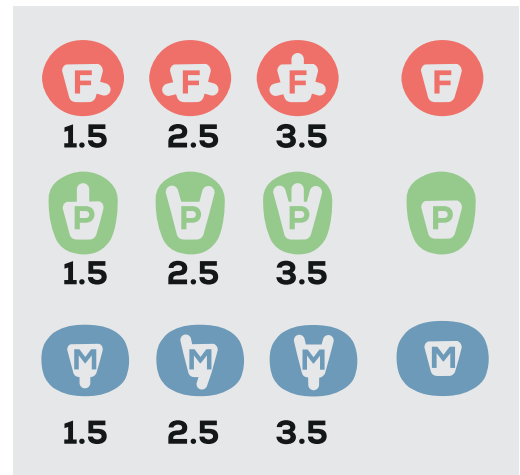

Frontzahn




ICX-ZERO BONE LOSS
IM ICX-SHOP!



Prämolare



Molare

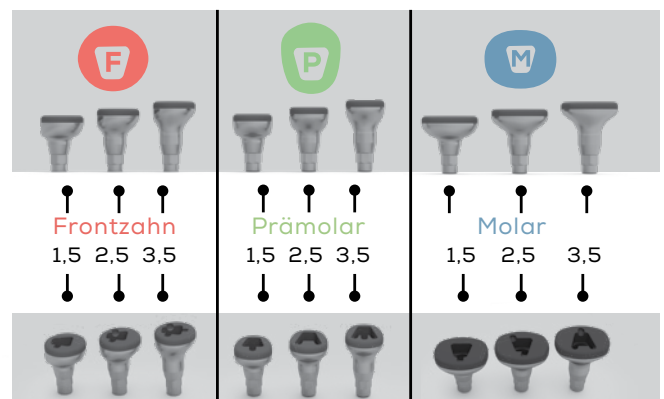

Das neue ICX-ZERO BONE LOSS® Konzept bietet Ihnen eine grosse Auswahl benötigter Gingivahöhen für Frontzahn-, Prämolare- und Molare-Zahnbereiche.

SERVICE-TEL.: 02641 9110-0 · WWW.MEDENTIS.DE


ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS


WICHTIGE HINWEISE! +++ WICHTIGE HINWEISE! +++ WICHTIGE HINWEISE! +++

DIGITALER WORKFLOW

Die markierten Flächen werden für einen erfolgreichen **Scan** der Einheilkappe benötigt.

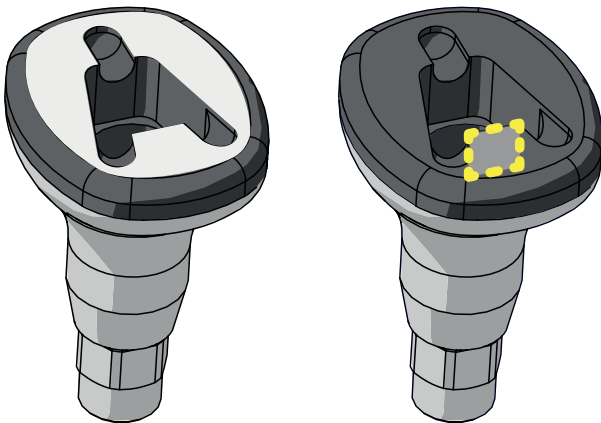

Das neue Kamindesign kann von 6 mm auf 5 und 4 mm gekürzt werden. Die Datenbank enthält 3D-Dateien von sowohl 5 als auch 4 mm gekürzten Modellen. Die Rillen bei 2 und 3 mm dienen der besseren Klebstoffretention.

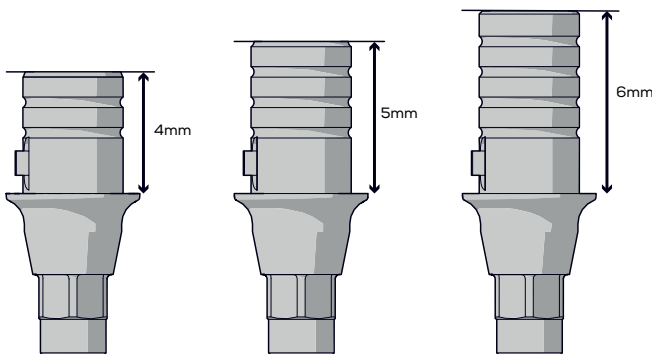


ICX-DENTAS
exocad
3shape





Hier zur Exocad Datenbank
CAD/CAM

Bitte beachten Sie die digitale Systemübersicht
auf den Seiten 26/27.

Bitte beachten Sie die richtige Positionierung der Sechskantposition vom Implantat.

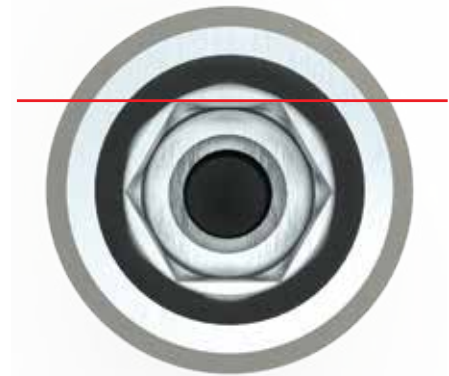

Die abgeflachte Fläche sollte immer nach Buccal ausgerichtet sein, da alle Systemrelevanten Produkte Im ICX-Zero Bone Loss® Konzept aufeinander abgestimmt sind.

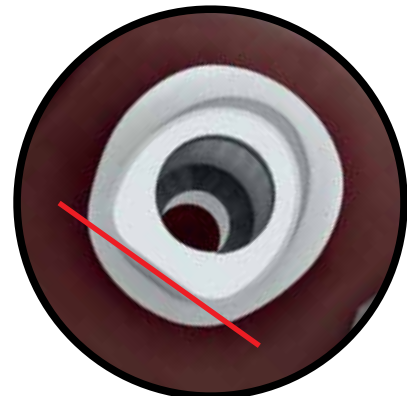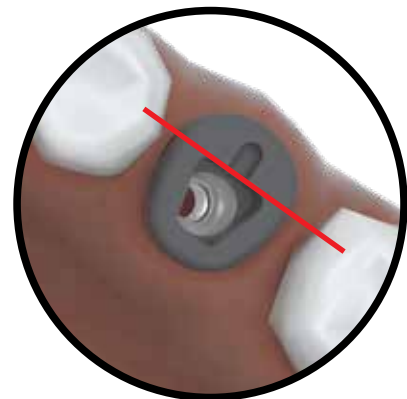

ICX-ZERO BONE LOSS®


FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

Das ICX-Zero Bone Loss® Konzept ermöglicht dem Behandler:

- **Sicherheit** • **minimal invasiv und maximal effektiv und präventiv zu arbeiten.**

Dies gibt dem Prothetiker, dem Implantologen, dem Oralchirurg, dem MKG-Chirurg und dem Zahntechniker die Möglichkeit:

- **smart und funktionell** • **maximal effektiv** • **kontrolliert, gezielt, geplant und strukturiert vorzugehen.**

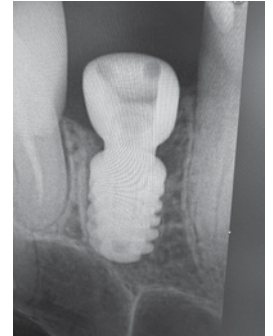

Das **ICX-Zero Bone Loss®** Konzept ist davon überzeugt das herkömmliche Standards der Dentalen Implantologie, nach denen ein Knochenverlust 1 mm als normal gilt, nicht mehr zutreffend sind. Tatsächlich gibt es nachweislich durch das Dr. Linkevičius Konzept verschiedene positive Reaktionen des Knochens auf Implantate, wie:

ICX-ZERO BONE LOSS, – oder Krestale Knochenstabilität sind dadurch gekennzeichnet, dass der Knochen – unabhängig von der Ursache – nicht zurückgegangen ist oder resorbiert wurde.

STABILES REMODELING, – wird ein gewisser Knochenverlust bezeichnet, der nach einiger Zeit zum Stillstand kommt und von biologischen oder mechanischen Faktoren ausgelöst wird.



PROGREDINTER KNOCHENVERLUST, – wenn aus einem stabilen Knochenremodeling ein kontinuierlicher Knochenverlust wird, spricht man von einem Progredientem Knochenverlust, einer Veränderung des Krestalen Knochens, die das funktionelle und ästhetische Behandlungskonzept gefährdet.

ENTMINERALISIERUNG UND REMINERALISIERUNG DES KNOCHENS,

– die Mineralisierung von Knochen kann über die Zeit zu- oder abnehmen, wenn Mineralstoffe in die organische Knochenmatrix einwandern oder sie verlassen.



KORTIKALISIERUNG, – dabei verdichtet oder mineralisiert sich die Kortikalisplatte des Alveolarknochens, anzunehmen das leichte Belastung/Überlastung des Knochens dessen Masse erhöht.

KNOCHENWACHSTUM, – es gibt keine Klinischen Studien, die diesen Prozess belegen, allerdings wurde eine Hypothese aufgestellt, dass eine konstante Implantatbelastung das Knochenwachstum stimuliert, da die Kraft vom Implantat auf den Knochen übertragen wird. Das Implantat hat im Knochen einen Spielraum von ca. 10 Nm, diese Microbewegungen stimulieren den Knochen und lösen vermutlich sein Wachstum aus.



SERVICE-TEL.: 02641 9110-0 • WWW.MEDENTIS.DE


„F“ FRONTZAHN



Ø3,3

Für ICX-Implanate ● Ø3,3

GINGIVAHÖHE 1.5mm

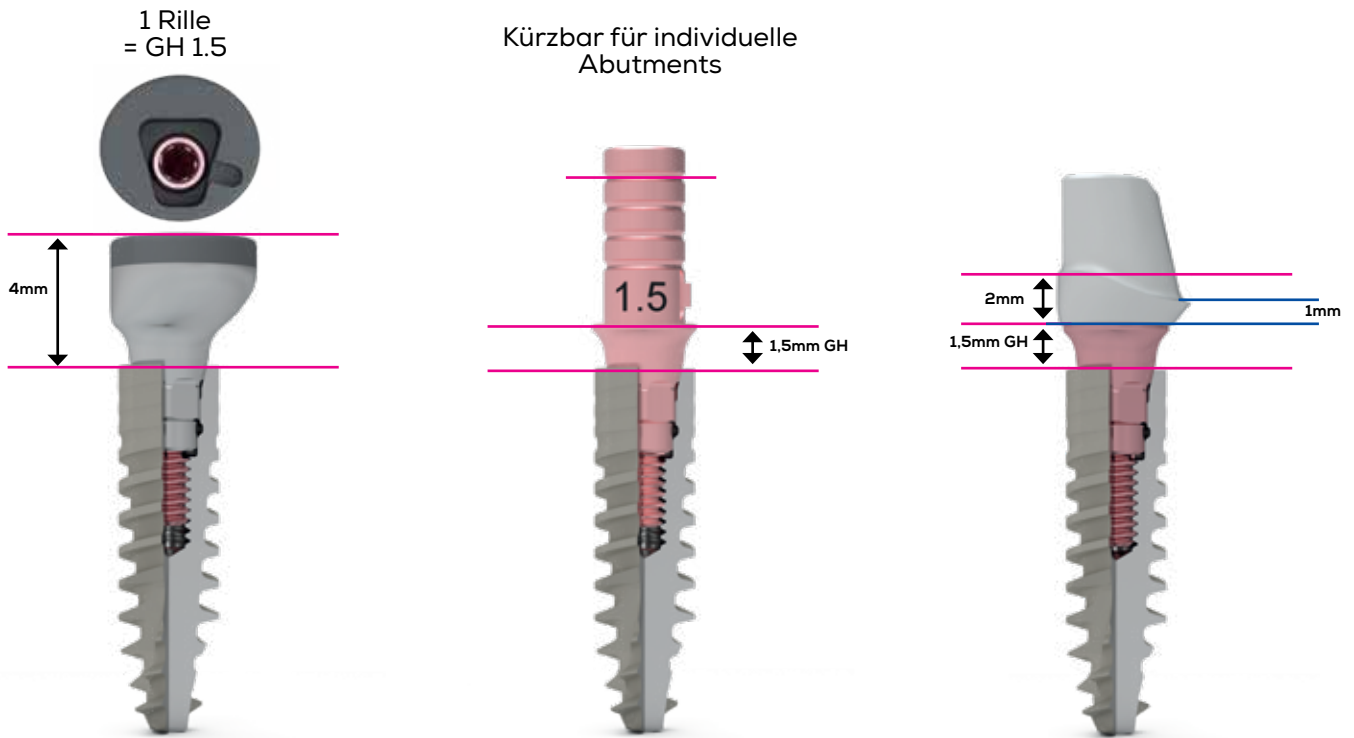

N-004-007F07



N-029-001107

ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis

oder

N-036-A/B/C07F07

ICX-3.3 Zero Bone Loss CerlCX®,
Frontzahn



A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)


„F“ FRONTZAHN




Für ICX-Implanate ● Ø3,3

Ø3,3

GINGIVAHÖHE 2.5mm

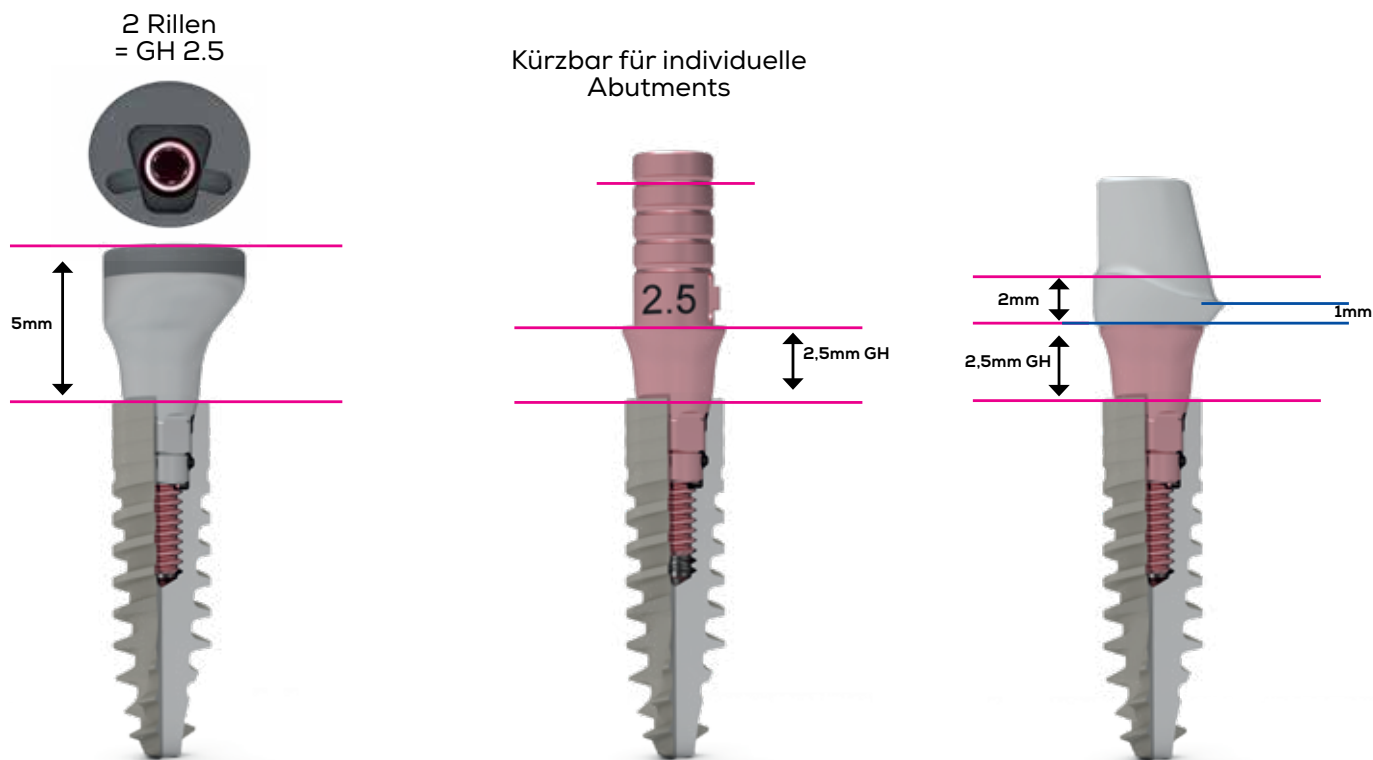

N-004-007F08

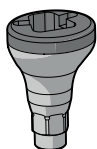

N-029-001108

ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis

oder

N-036-A/B/C07F08

ICX-3.3 Zero Bone Loss CerlCX®,
Frontzahn



A ca. A1, A2, B1


B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

GINGIVAHÖHE 3.5mm

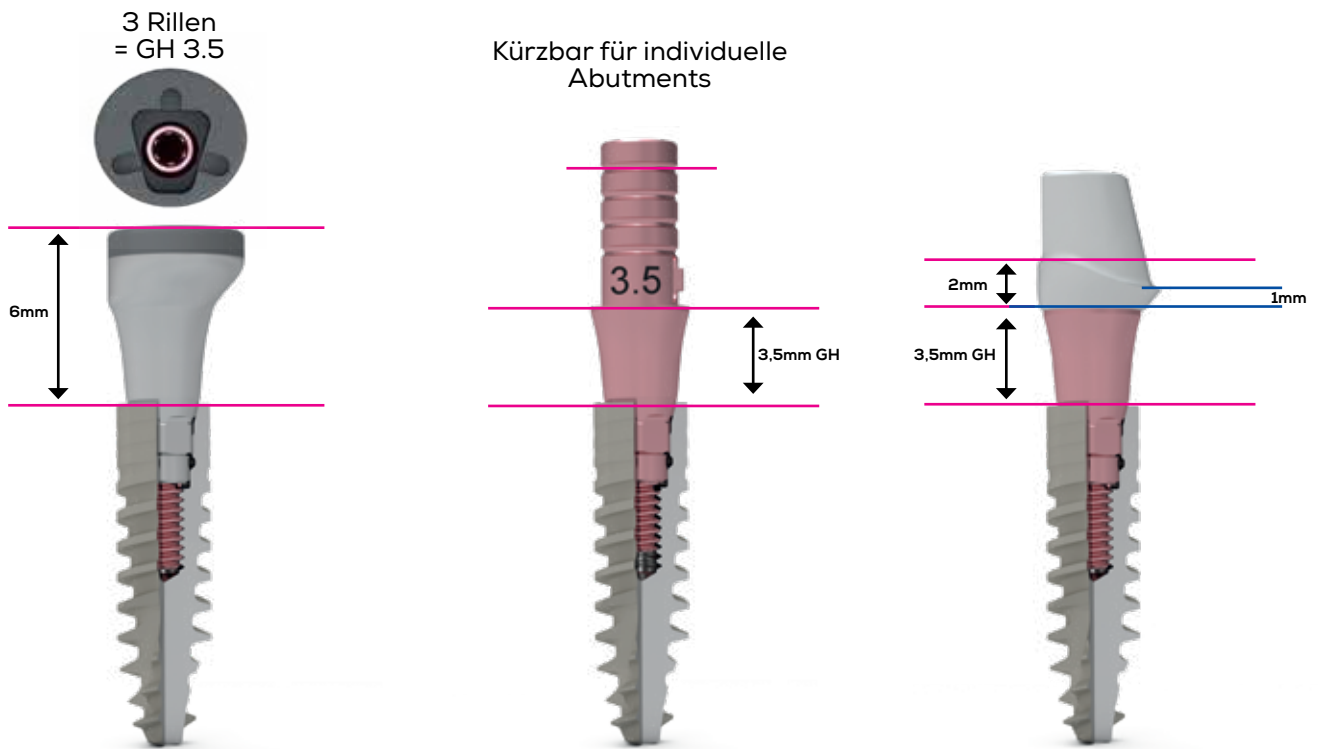

N-004-007F09



N-029-001109

ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis

oder

N-036-A/B/C07F09

ICX-3.3 Zero Bone Loss CerICX®,
Frontzahn



A ca. A1, A2, B1


B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

GINGIVAHÖHE 1.5mm

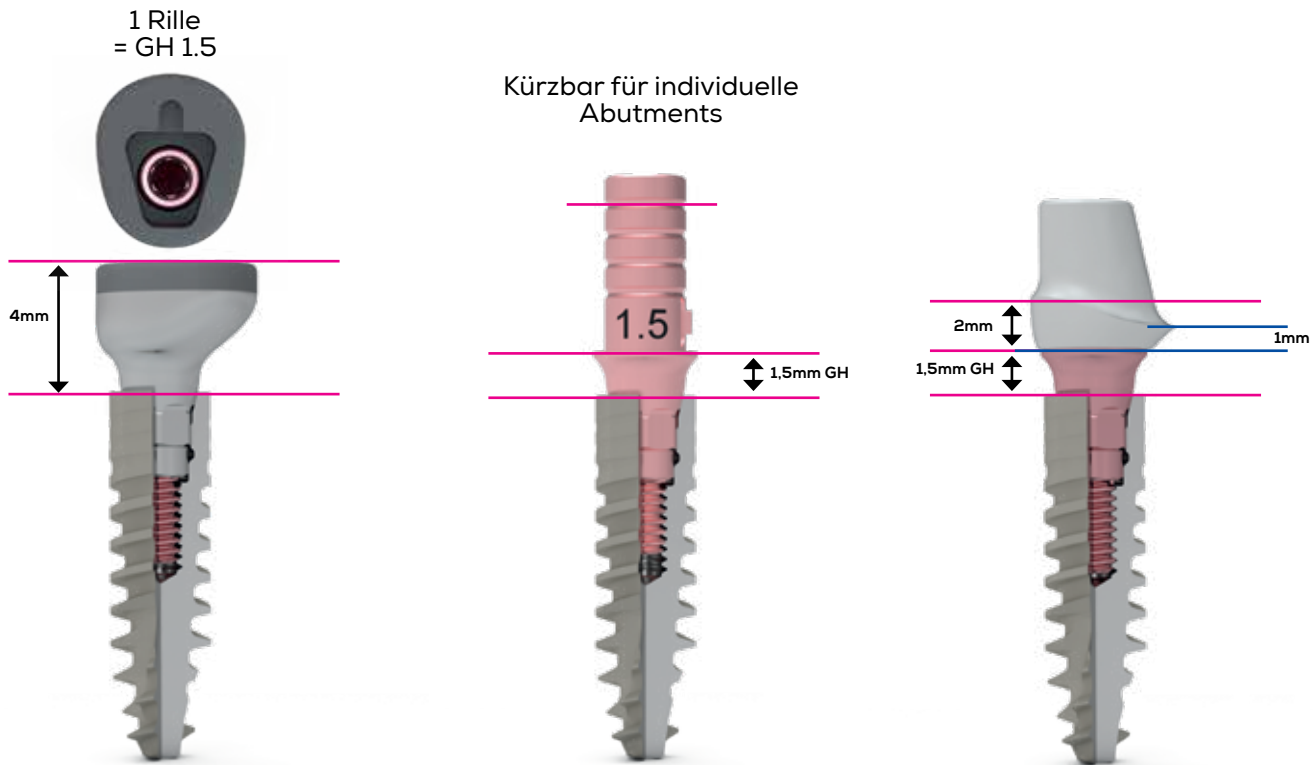

N-004-007P07



N-029-001107

ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis

oder

N-036-A/B/C07P07

ICX-3.3 Zero Bone Loss CerlCX®,
Prämolar



A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3


Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

Ø3,3

Für ICX-Implanate ● Ø3,3

GINGIVAHÖHE 2.5mm

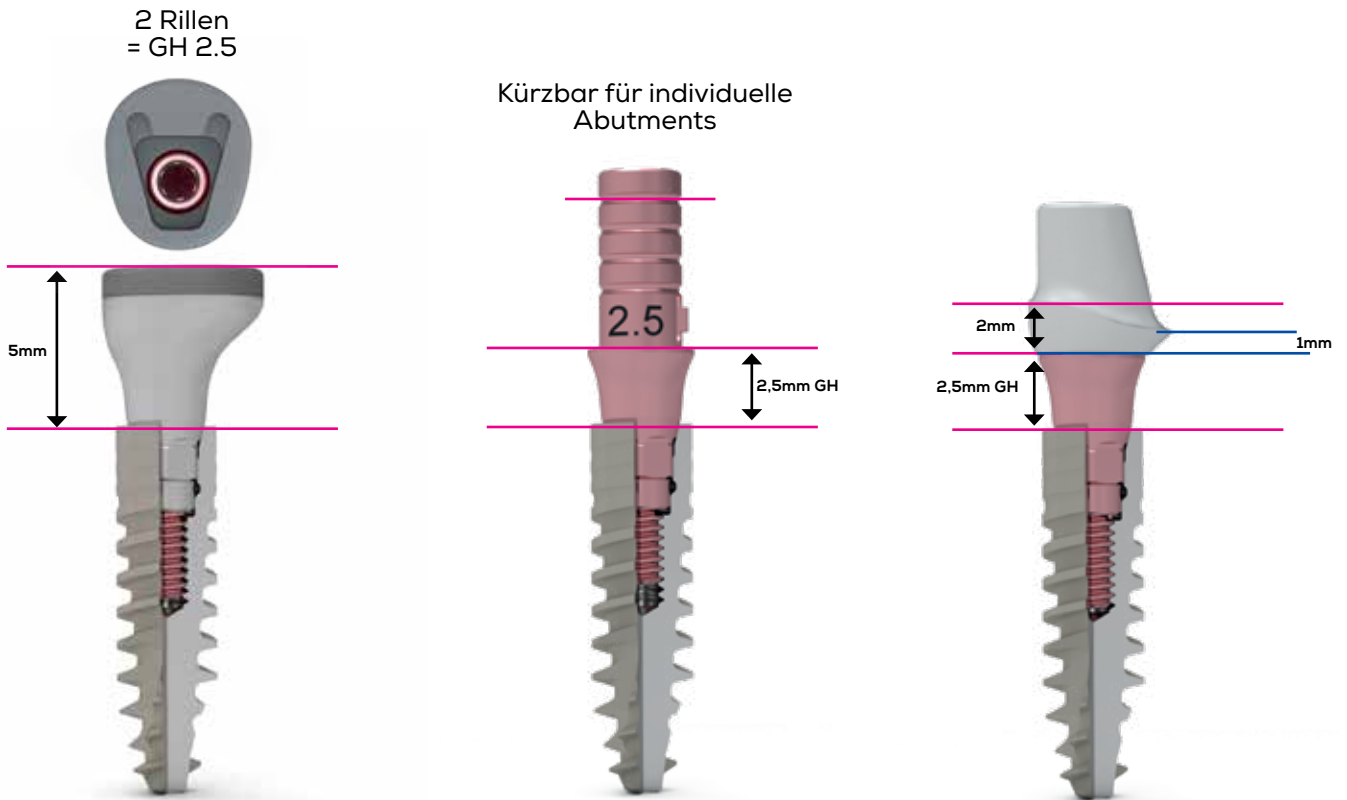

N-004-007P08



N-029-001108

ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis

oder

N-036-A/B/C07P08

ICX-3.3 Zero Bone Loss CerICX®,
Prämolar




A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:
A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

GINGIVAHÖHE 3.5mm

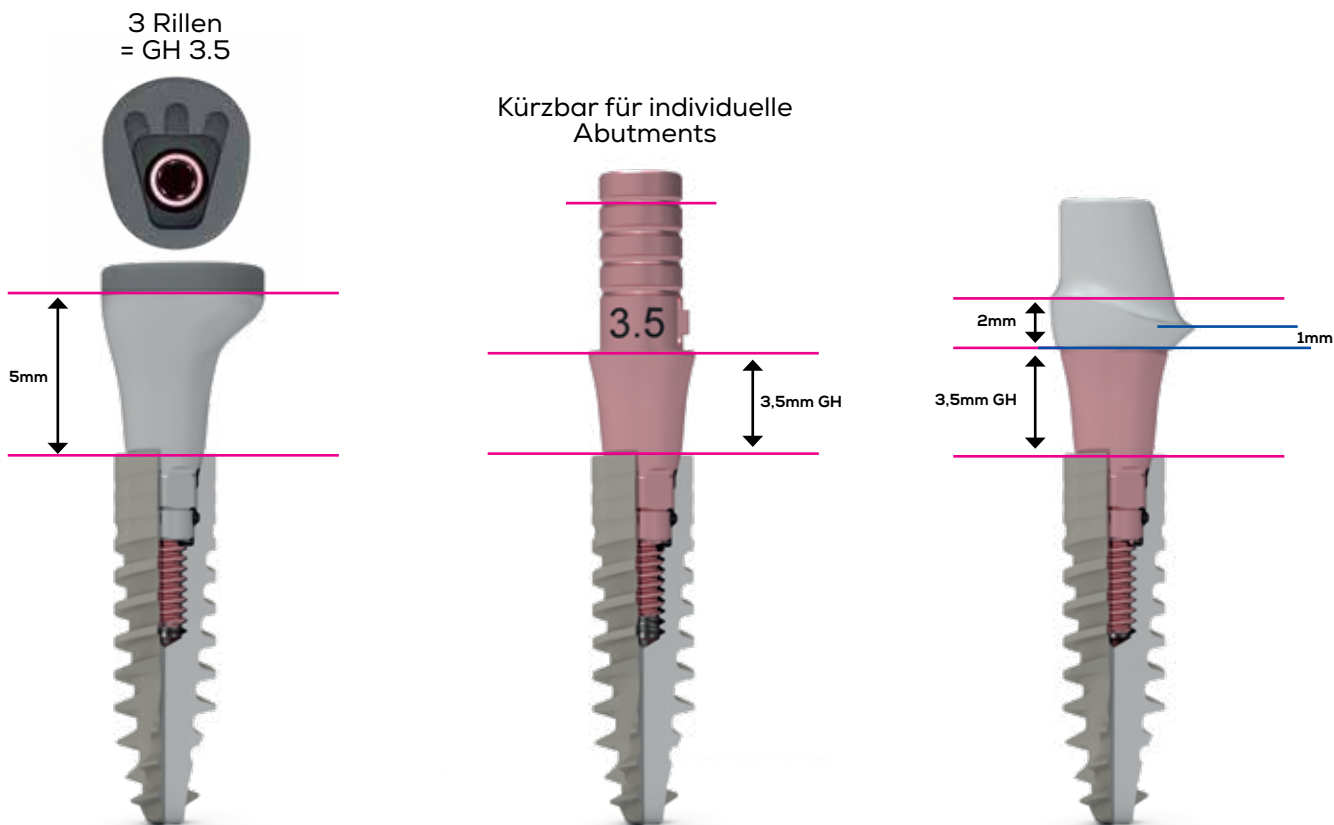

N-004-007P09



N-029-001109

ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis

oder

N-036-A/B/C07P09

ICX-3.3 Zero Bone Loss CerlCX®,
Prämolar

A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2



C ca. A3,5 B3



„F“ FRONTZAHN

Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 1.5mm

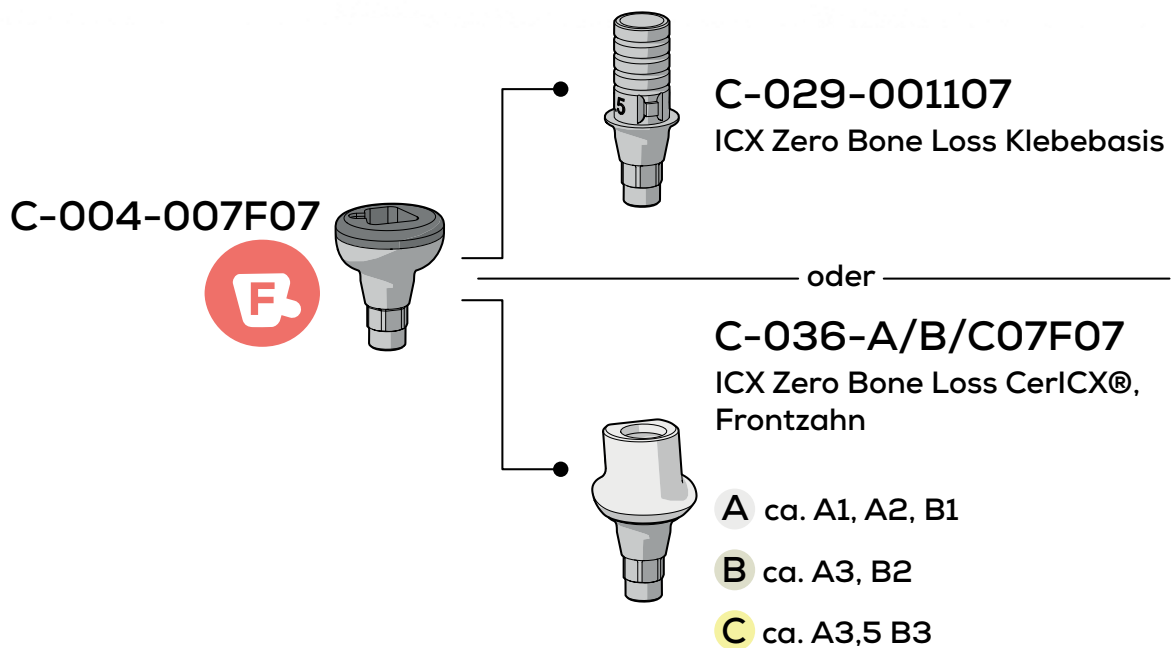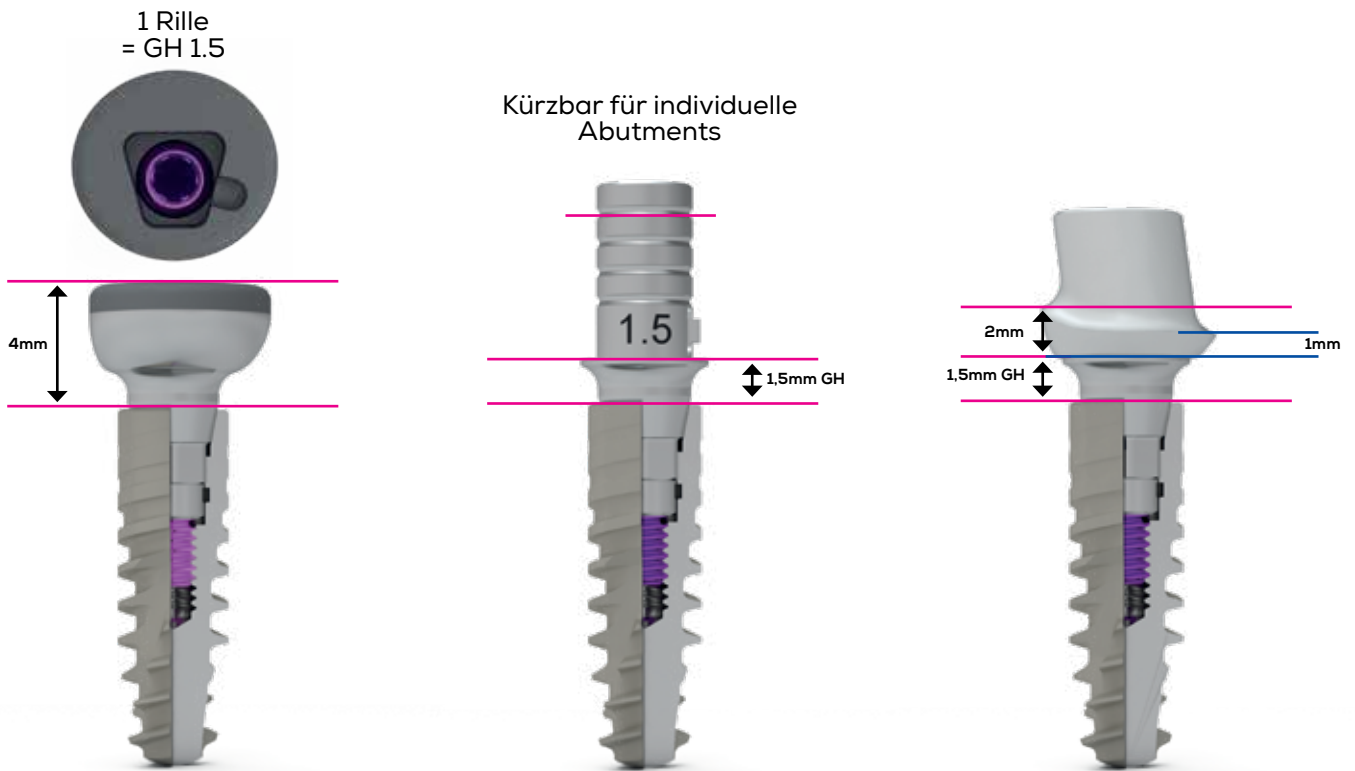


Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:
A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)




Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 2.5mm

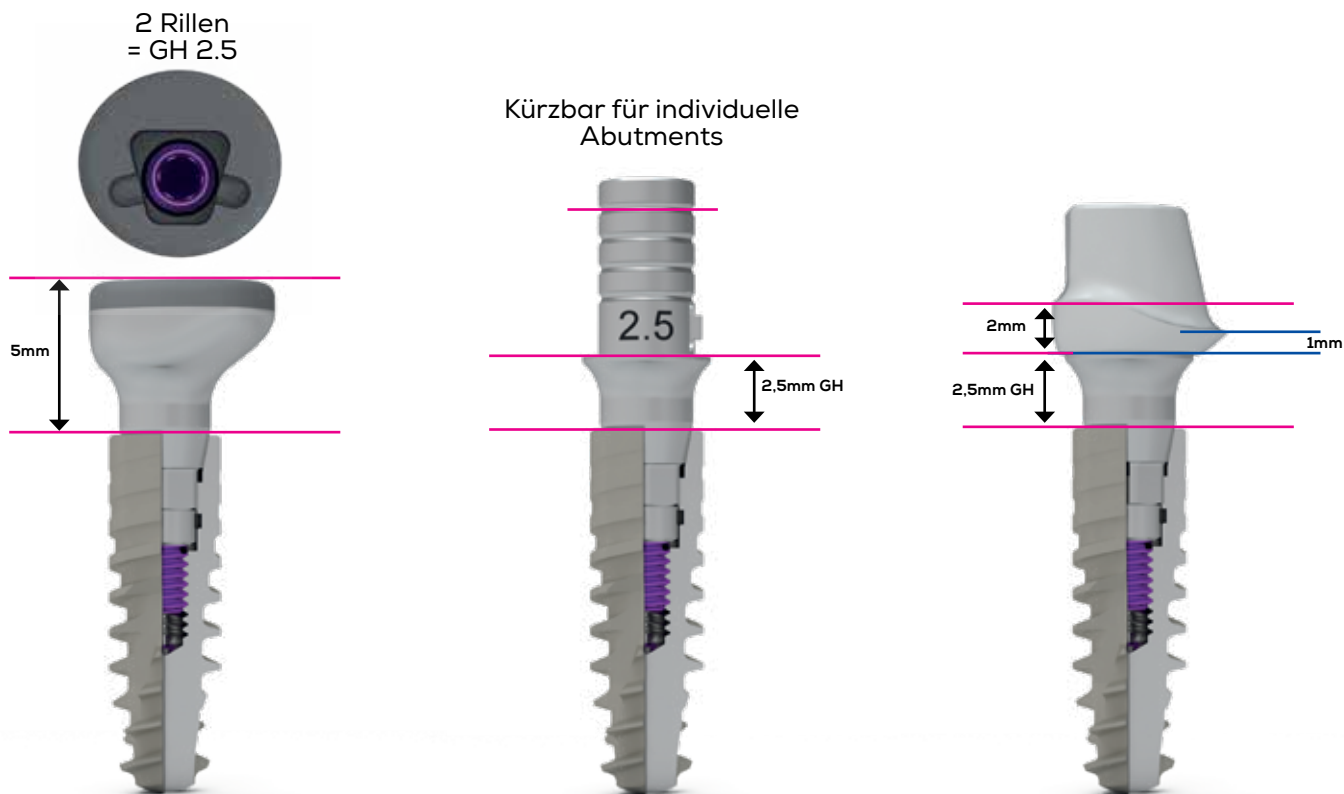

C-004-007F08

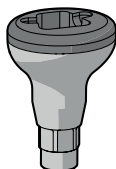

C-029-001108

ICX Zero Bone Loss Klebebasis

oder

C-036-A/B/C07F08

ICX Zero Bone Loss CerlCX®,
Frontzahn



A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:


A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

„F“ FRONTZAHN




Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 3.5mm

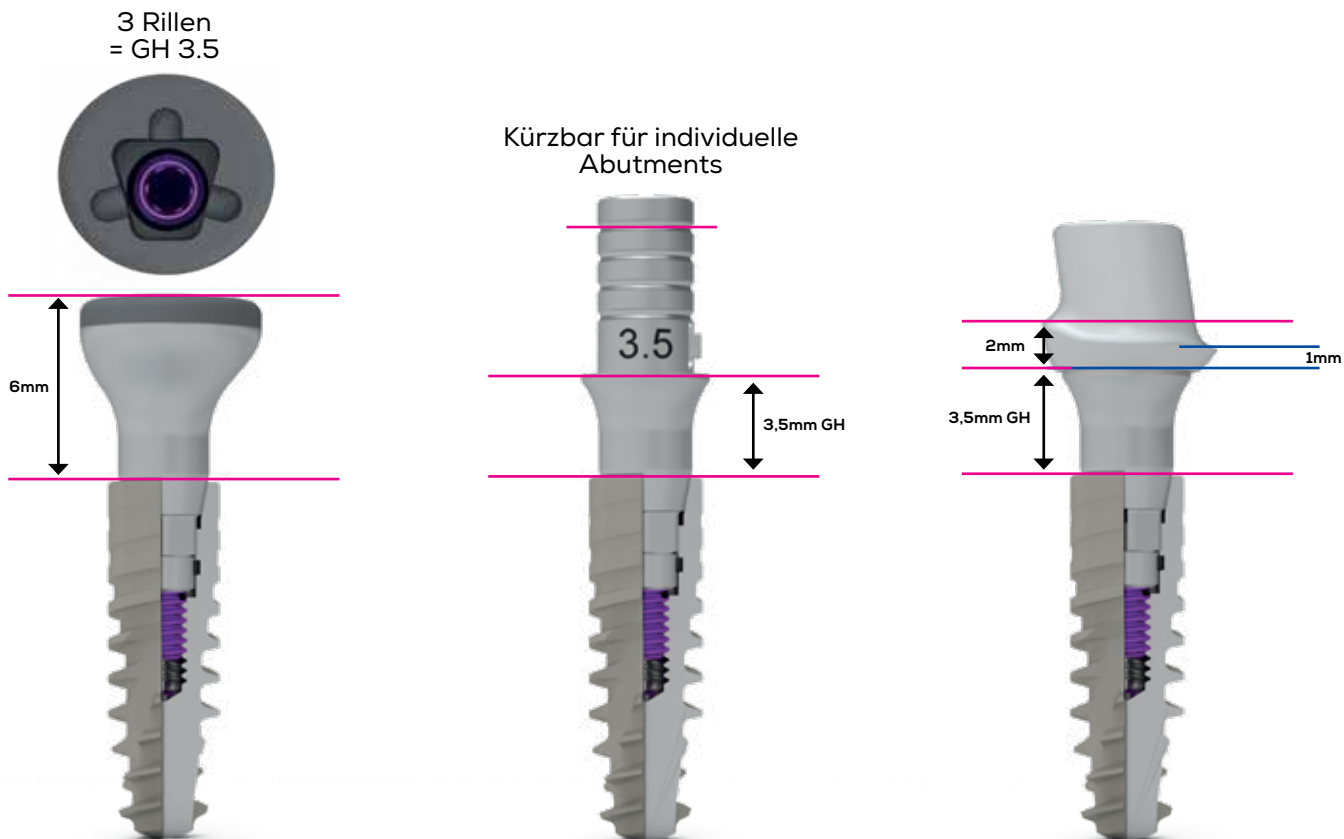

C-004-007F09

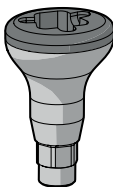

C-029-001109

ICX Zero Bone Loss Klebebasis

oder

C-036-A/B/C07F09

ICX Zero Bone Loss CerICX®,
Frontzahn

A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT: DAS ERSTE REIN DIGITALE KONZEPT FÜR EXPERTEN

**Nur für eine exklusive Anwendergruppe:
Arbeiten Sie mit dem ICX-Zero Bone Loss® Konzept,
basierend auf Intraoral-Scan-Technologie
und erleben Sie die Zukunft der digitalen Implantologie.**



ICX-ZERO BONE LOSS
IM ICX-SHOP!




RUFEN SIE UNS AN – WIR REAGIEREN SOFORT:

TEL.: 02641 9110-0


„P“ PRÄMOLAR

Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 1.5mm

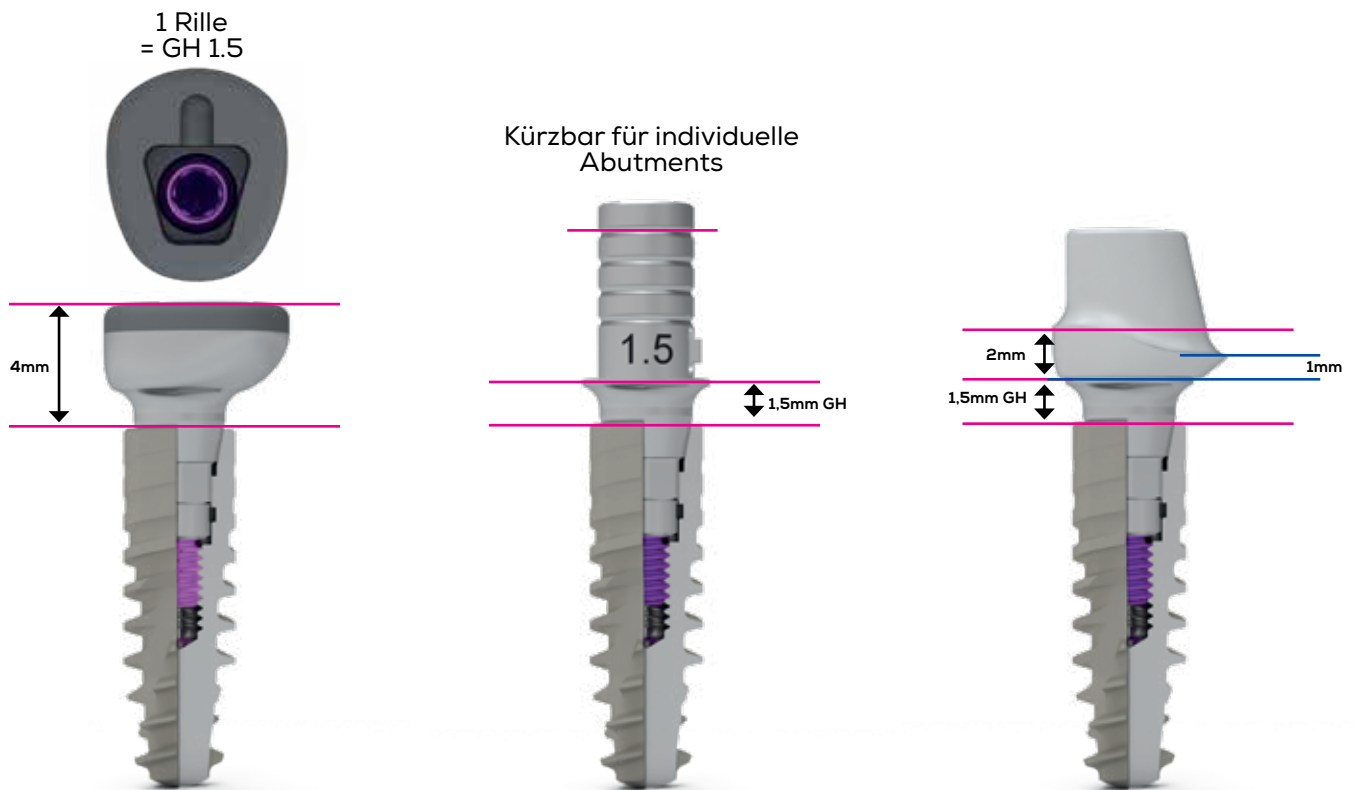

C-004-007P07

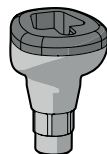

C-029-001107

ICX Zero Bone Loss Klebebasis

oder

C-036-A/B/C07P07

ICX Zero Bone Loss CerICX®,
Prämolar

A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3




Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)


„P“ PRÄMOLAR

Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 2.5mm

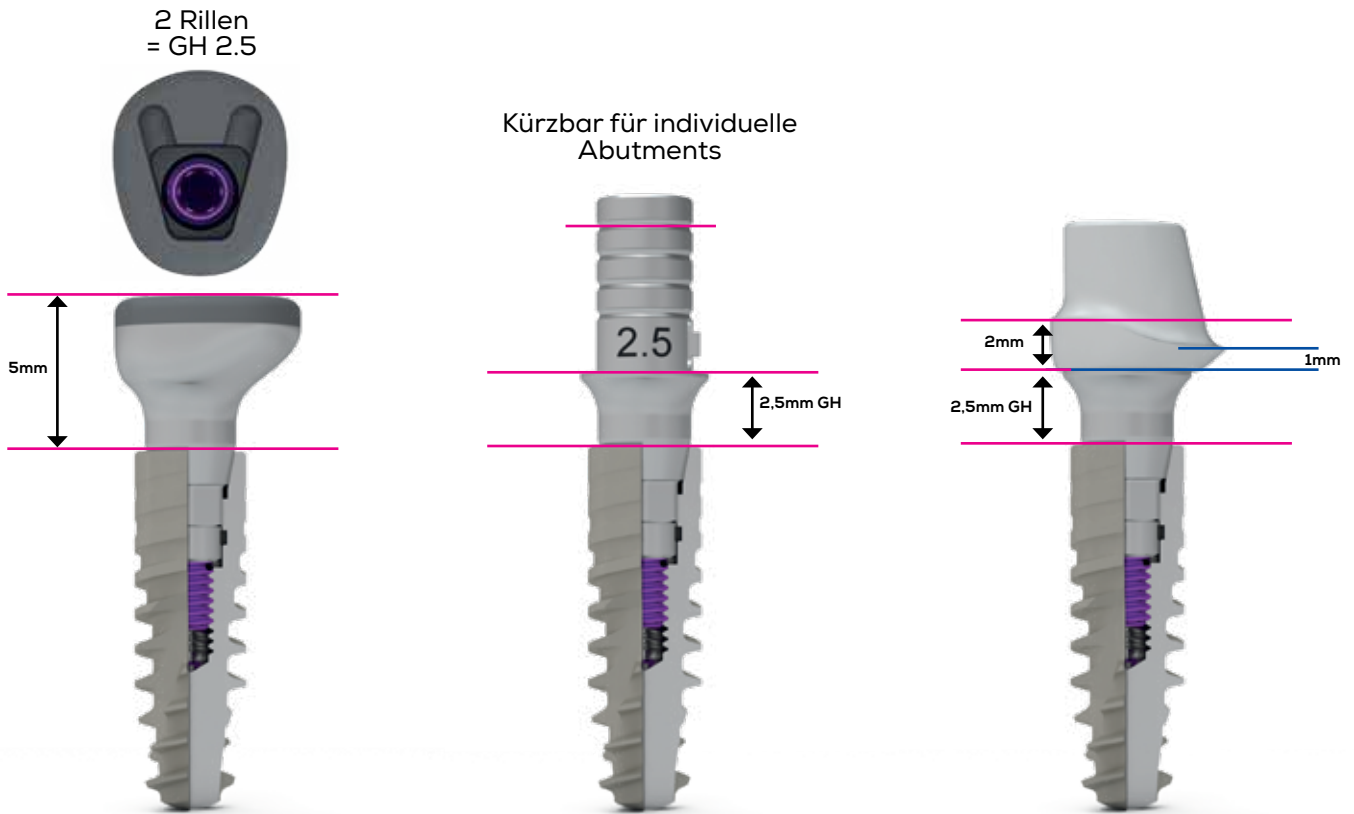

C-004-007P08

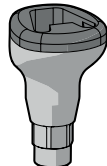

C-029-001108

ICX Zero Bone Loss Klebebasis

oder

C-036-A/B/C07P08

ICX Zero Bone Loss CerlCX®,
Prämolar



A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2


C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:


A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 3.5mm

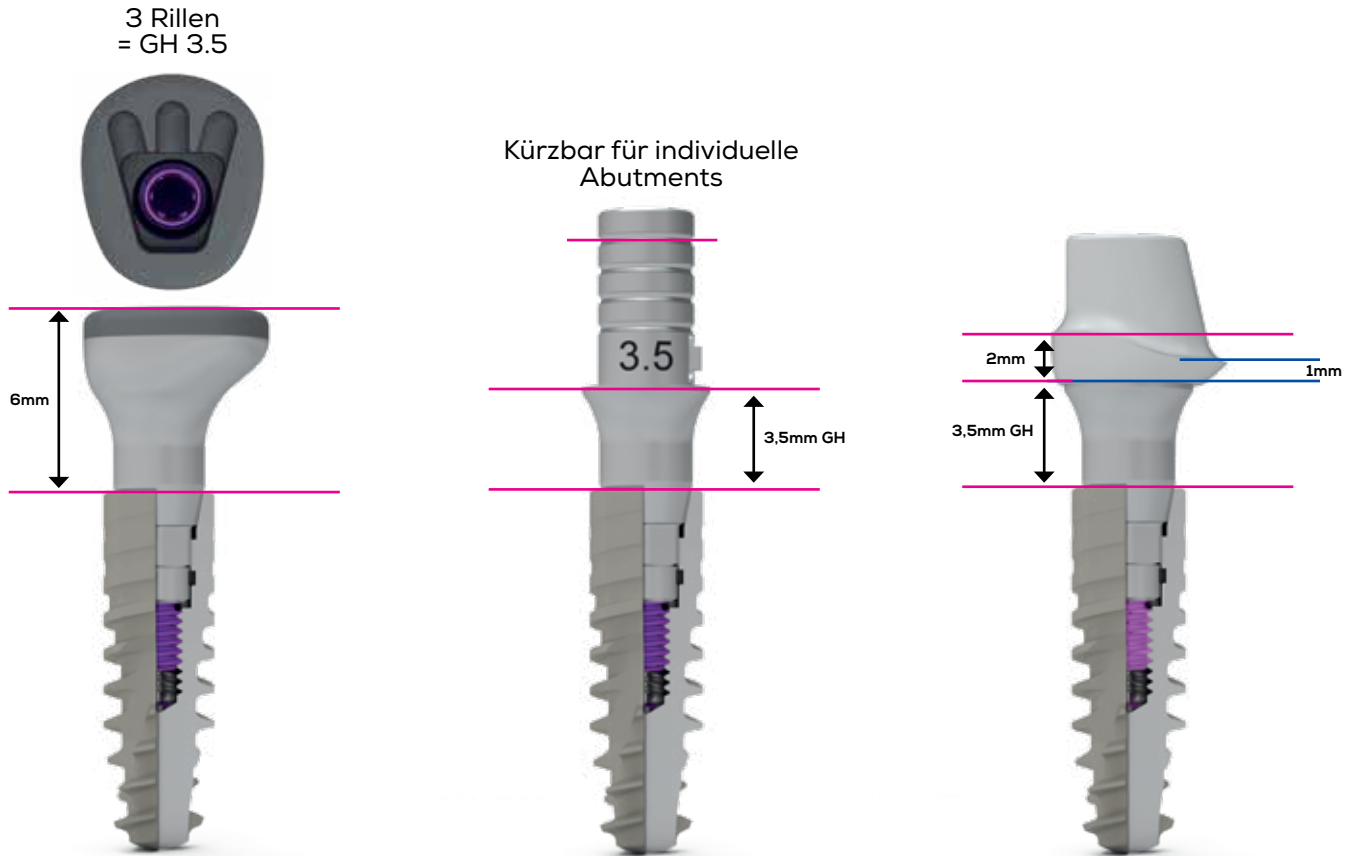

C-004-007P09

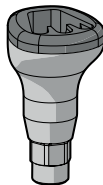

C-029-001109

ICX Zero Bone Loss Klebebasis

oder

C-036-A/B/C07P09

ICX Zero Bone Loss CerlCX®,
Prämolar

A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3



Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT: DAS ERSTE REIN DIGITALE KONZEPT FÜR EXPERTEN

**Nur für eine exklusive Anwendergruppe:
Arbeiten Sie mit dem ICX-Zero Bone Loss® Konzept,
basierend auf Intraoral-Scan-Technologie
und erleben Sie die Zukunft der digitalen Implantologie.**




ICX-ZERO BONE LOSS
IM ICX-SHOP!




**RUFEN SIE UNS AN – WIR REAGIEREN SOFORT:
TEL.: 02641 9110-0**

Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 1.5mm

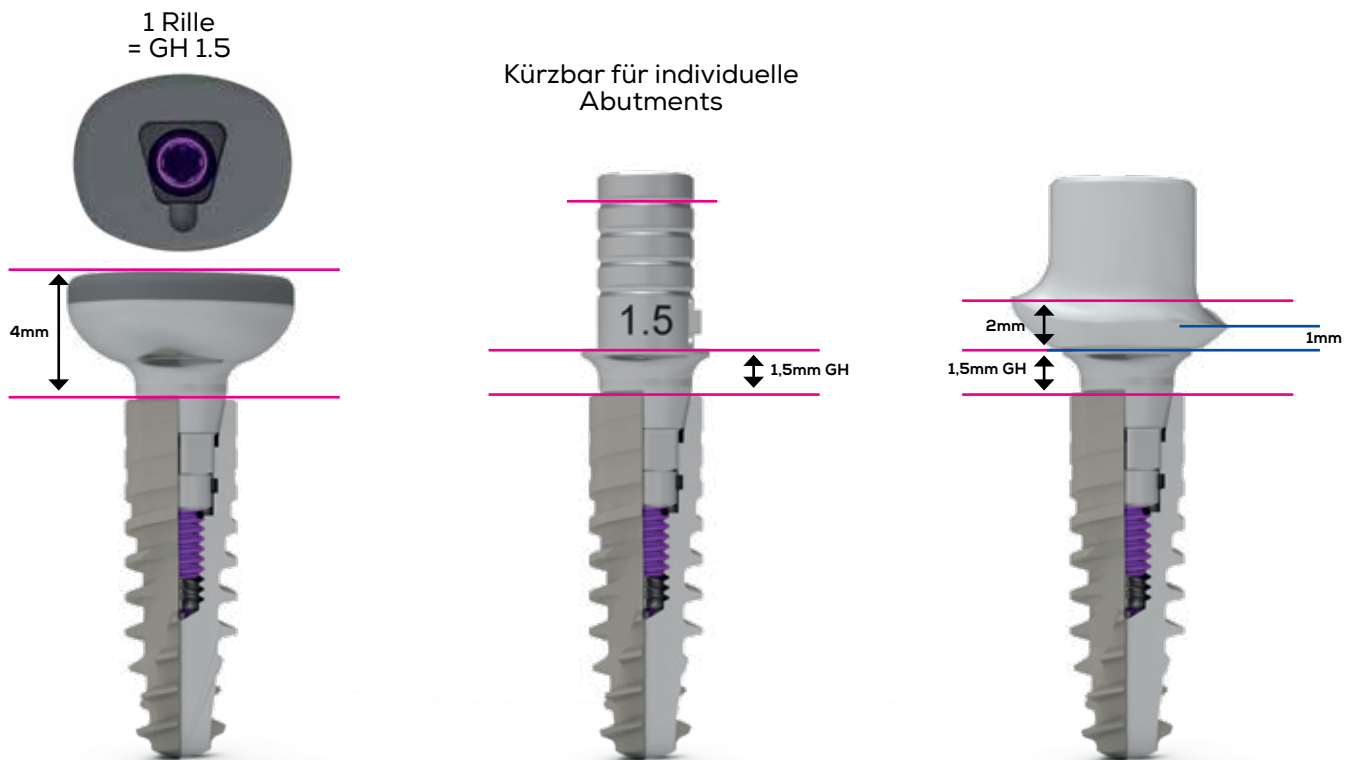

C-004-007M07

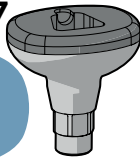


C-029-001107

ICX Zero Bone Loss Klebebasis

oder

C-036-A/B/C07M07

ICX Zero Bone Loss CerlCX®,
Molar

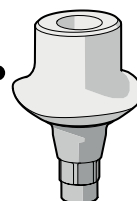

A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2



C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8


GINGIVAHÖHE 2.5mm

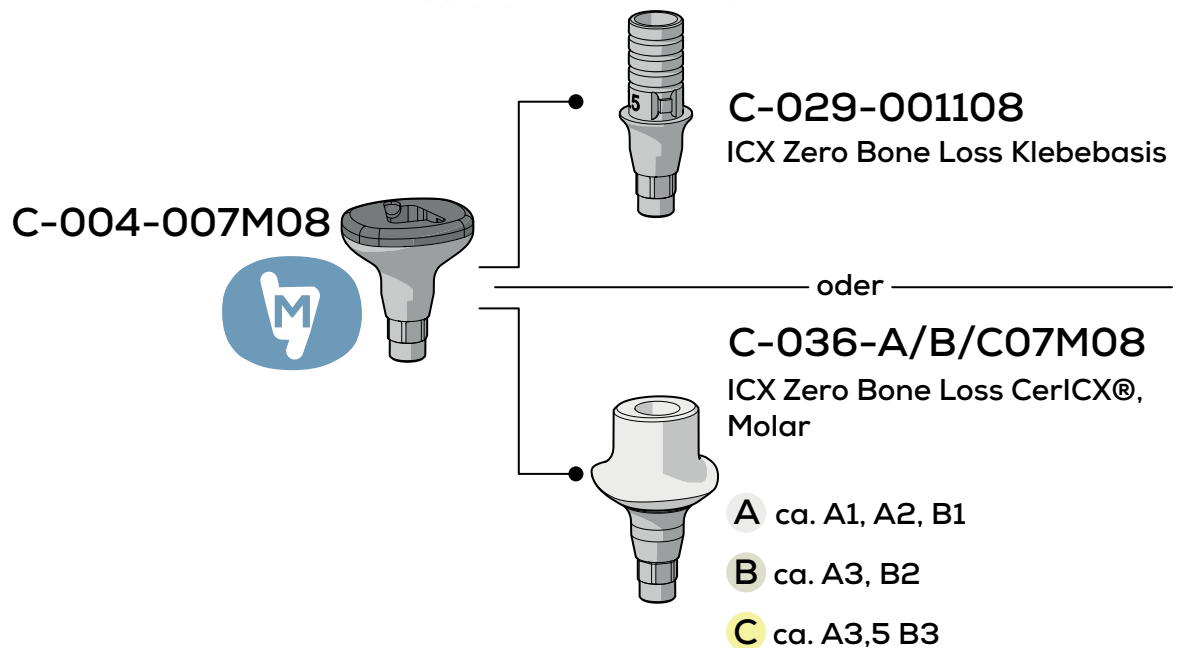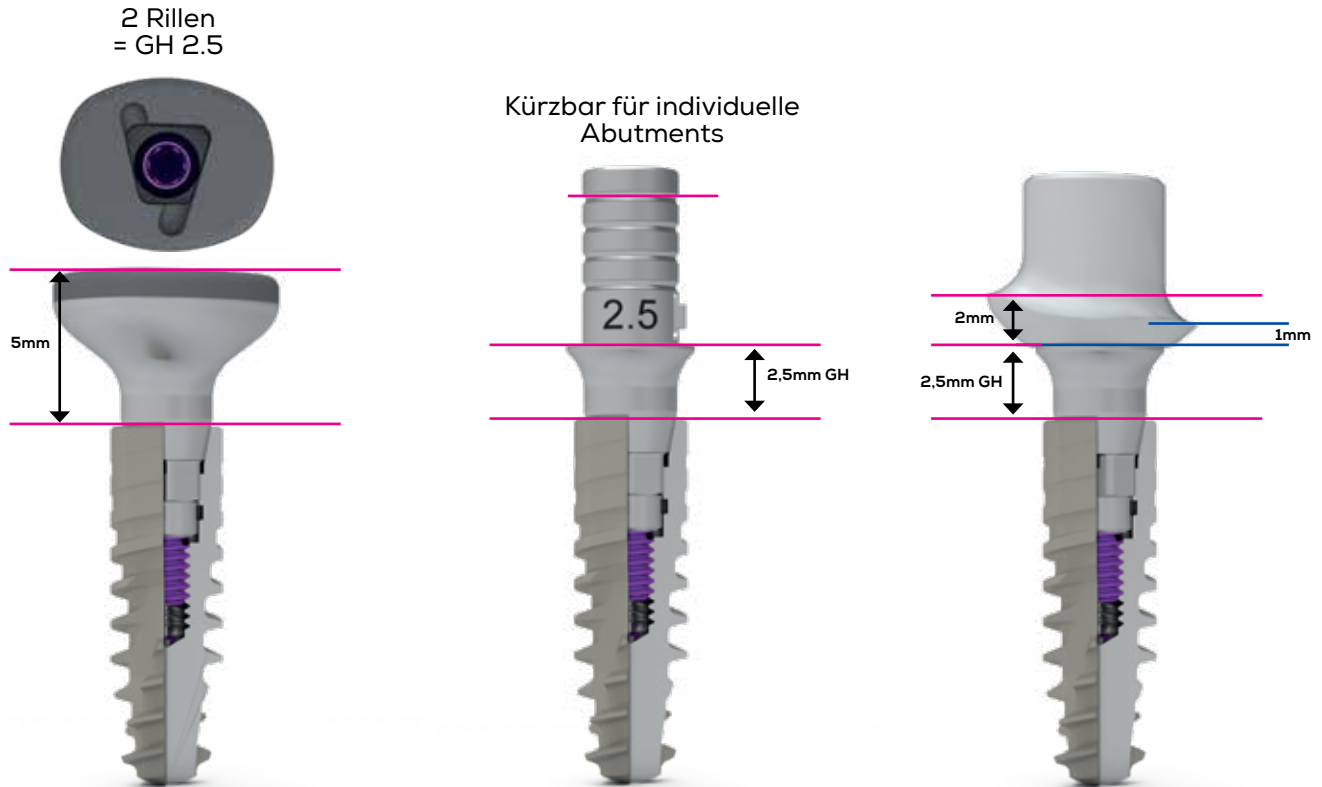


Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:
A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

Für Standard-ICX-Implanate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

GINGIVAHÖHE 3.5mm

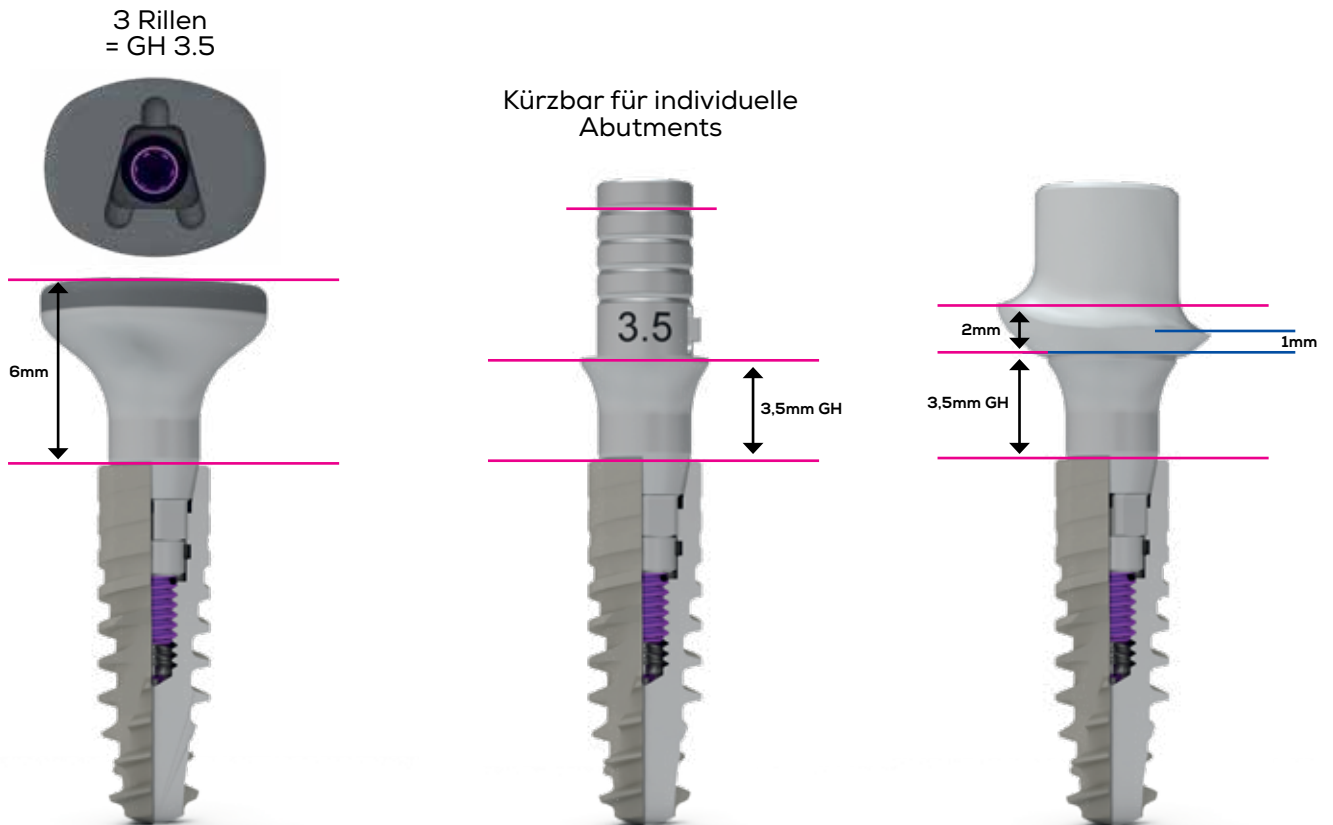

C-004-007M09

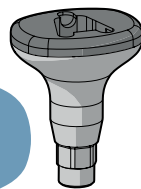


C-029-001109

ICX Zero Bone Loss Klebebasis

oder

C-036-A/B/C07M09

ICX Zero Bone Loss CerICX®,
Molar

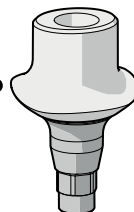

A ca. A1, A2, B1

B ca. A3, B2

C ca. A3,5 B3

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT: DAS ERSTE REIN DIGITALE KONZEPT FÜR EXPERTEN

**Nur für eine exklusive Anwendergruppe:
Arbeiten Sie mit dem ICX-Zero Bone Loss® Konzept,
basierend auf Intraoral-Scan-Technologie
und erleben Sie die Zukunft der digitalen Implantologie.**



ICX-ZERO BONE LOSS
IM ICX-SHOP!



**RUFEN SIE UNS AN – WIR REAGIEREN SOFORT:
TEL.: 02641 9110-0**

Transfer		ICX-ZERO BONE LOSS® ABUTMENTS	
ICX (N) Ø3,3 und ICX-Standard (C) Ø3,75 Ø4,1 · Ø4,8 ICX Zero Bone Loss Scan & Heilkappen 	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss Scan & Heilkappen für alle Standard ICX-Implantat Durchmesser (Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8)	
	C-004-007F07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm	 
	C-004-007F08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm	
	C-004-007F09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm	
	C-004-007P07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=4mm, f. GH=1.5mm	 
	C-004-007P08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=5mm, f. GH=2.5mm	
	C-004-007P09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=6mm, f. GH=3.5mm	
	C-004-007M07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molare, H=4mm, f. GH=1.5mm	 
	C-004-007M08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molare, H=5mm, f. GH=2.5mm	
	C-004-007M09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molare, H=6mm, f. GH=3.5mm	
ICX Zero Bone Loss Titan Abutments	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss Titan Abutment	
	C-029-001107	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm	
	C-029-001108	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm	
	C-029-001109	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm	

WICHTIGER HINWEIS! Achten Sie bei der Benutzung und Auswahl der jeweiligen Artikel auf die Bezeichnung. Alle Artikel für ICX-Standard-Implantate beginnen mit **C-00...** und alle Artikel für ICX-3.3 Implantate beginnen mit **N-00...**

➡ Für Frontzahn, Prämolare, Molare



ICX-DENTA5
exocad
3shape



Hier zur Exocad Datenbank
CAD/CAM

ICX Zero Bone Loss
Scan & Heilkappe
 **Scankörper**
medentis-ICX-ACTIVE-PREMIUM-ZBL

N/C-004-007F07-GH1,5
N/C-004-007M07-GH1,5
N/C-004-007P07-GH1,5


ERKLÄRUNG:
Die letzten beiden Ziffern ergeben die jeweilige Auswahl der Gingivahöhe, zB:
N/C-004-007F07 = GH1,5
N/C-004-007F08 = GH2,5
N/C-004-007F09 = GH3,5

GH1,5-KH4 hex
GH1,5-KH5 hex
GH1,5-KH6 hex



WICHTIGER HINWEIS!

Achten Sie bei der Auswahl der jeweiligen Gingivaformer, auf die Anzahl der Rillenvertiefung.
Diese zeigen die gewünschte Gingivahöhe an.

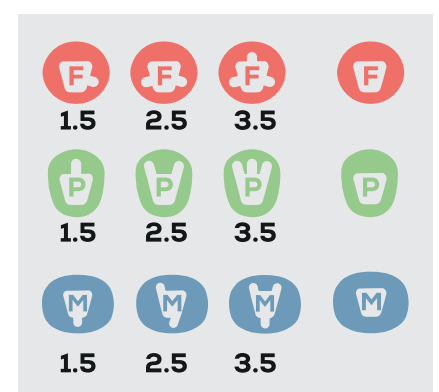


Exocad-Struktur

medentis medical




medentis-ICX-ACTIVE-PREMIUM-ZBL in der Bibliothek auswählen.

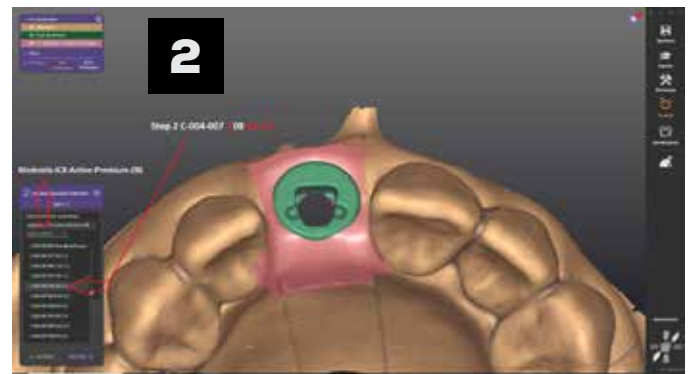

medentis-ICX-ACTIVE-PREMIUM-ZBL in der Bibliothek auswählen
 ➤ Auswahl Datensatz
 ➤ C-004-007F08-GH2,5



Die letzten beiden Ziffern ergeben die jeweilige Auswahl der Gingivahöhe.

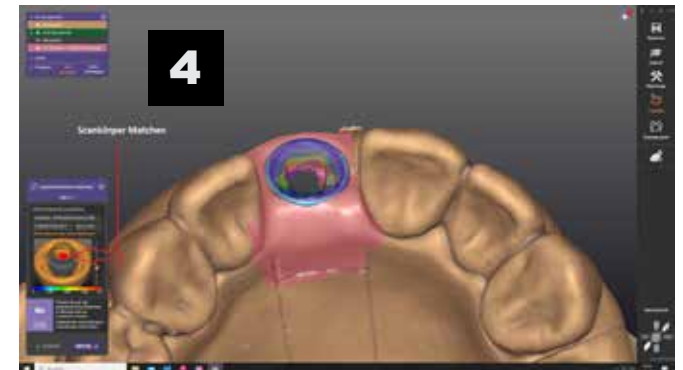

Best Fit-Matching der Heilkappe



Best Fit-Matching der Heilkappe



Design-Erstellung

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

EINZELARTIKEL · ICX-ZERO BONE LOSS® für ● Ø 3.3 ICX-Implantate

Auswahl	Anzahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX-Ø3.3 Zero Bone Loss Scan & Heilkappen		Preis €*
		N-004-007F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm		49,-
		N-004-007F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm		
		N-004-007F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm		
		N-004-007P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=4mm, f. GH=1.5mm		49,-
		N-004-007P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=5mm, f. GH=2.5mm		
		N-004-007P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=6mm, f. GH=3.5mm		

Auswahl	Anzahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX-Ø3.3 Zero Bone Loss Klebebasen		Preis €*
		N-029-001107	ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=1.5mm, f.H=4mm		49,-
		N-029-001108	ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=2.5mm, f.H=5mm		
		N-029-001109	ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=3.5mm, f.H=6mm		

Auswahl	Anzahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX-Ø3.3 Zero Bone Loss CeriCX Abutment		Preis €*
		N-036-A07F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		99,-
		N-036-B07F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
		N-036-C07F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
		N-036-A07F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		99,-
		N-036-B07F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
		N-036-C07F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
		N-036-A07F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		99,-
		N-036-B07F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
		N-036-C07F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		
		N-036-A07P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		99,-
		N-036-B07P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
		N-036-C07P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
		N-036-A07P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		99,-
		N-036-B07P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
		N-036-C07P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
		N-036-A07P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		99,-
		N-036-B07P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
		N-036-C07P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		

*Die Preise gelten pro Artikel und zzgl. gesetzl. MwSt.

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 – A4 (Rötlich-bräunlich), B1 – B4 (Rötlich-gelblich), C1 – C4 (Grautöne), D2 – D4 (Rötlich-grau)

BESTELL-FAX AN: 02641 9110-120

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

**Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.02.2023)

Praxis Stempel

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

2er Sets · für Ø 3.3 ICX-Implantate ICX-ZERO BONE LOSS® KLEBEBASEN & HEILKAPPEN

Artikelnummer	ICX-ZERO BONE LOSS® KLEBEBASEN & HEILKAPPEN		Preis €*	Anzahl
N-004-007F07 & N-029-001107	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1,5mm 		88,-	
N-004-007F08 & N-029-001108	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2,5mm 		88,-	
N-004-007F09 & N-029-001109	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3,5mm 		88,-	
N-004-007P07 & N-029-001107	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1,5mm 		88,-	
N-004-007P08 & N-029-001108	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2,5mm 		88,-	
N-004-007P09 & N-029-001109	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3,5mm 		88,-	


*Die Preise gelten pro 2er-Set und zzgl. gesetzl. MwSt.



ICX-ZERO BONE LOSS
IM ICX-SHOP!

WICHTIGER HINWEIS!

Achten Sie bei der Auswahl der jeweiligen Gingivaformer, auf die Anzahl der Rillenvertiefung. Diese zeigen die gewünschte Gingivahöhe an.

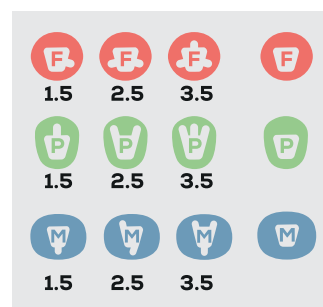

BESTELL-FAX AN: 02641 9110-120

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

**Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.02.2023)

Praxis Stempel

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

EINZELARTIKEL · ICX-ZERO BONE LOSS® für Standard ICX-Implantate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

Auswahl	Anzahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss Scan & Heilkappen für alle ICX-Implantat Durchmesser (Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8)		Preis €*
		C-004-007F07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm		 49,-
		C-004-007F08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm		
		C-004-007F09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm		
		C-004-007P07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=4mm, f. GH=1.5mm		 49,-
		C-004-007P08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=5mm, f. GH=2.5mm		
		C-004-007P09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=6mm, f. GH=3.5mm		
		C-004-007M07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=4mm, f. GH=1.5mm		 49,-
		C-004-007M08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=5mm, f. GH=2.5mm		
		C-004-007M09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=6mm, f. GH=3.5mm		

Auswahl	Anzahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss Klebebasen für Standard		Preis €*
		C-029-001107	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4,4, GH=1.5mm, f.H=4mm		49,-
		C-029-001108	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4,4, GH=2.5mm, f.H=5mm		
		C-029-001109	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4,4, GH=3.5mm, f.H=6mm		

Auswahl	Anzahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss CeriCX Abutment für alle ICX-Implantat Durchmesser (Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8)		Preis €*
		C-036-A07F07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		 99,-
		C-036-B07F07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
		C-036-C07F07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
		C-036-A07F08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		 99,-
		C-036-B07F08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
		C-036-C07F08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
		C-036-A07F09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		 99,-
		C-036-B07F09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
		C-036-C07F09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		
		C-036-A07P07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		 99,-
		C-036-B07P07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
		C-036-C07P07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
		C-036-A07P08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		 99,-
		C-036-B07P08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
		C-036-C07P08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
		C-036-A07P09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		 99,-
		C-036-B07P09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		
		C-036-C07P09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		
		C-036-A07M07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		 99,-
		C-036-B07M07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
		C-036-C07M07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
		C-036-A07M08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		 99,-
		C-036-B07M08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
		C-036-C07M08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
		C-036-A07M09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		 99,-
		C-036-B07M09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
		C-036-C07M09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molar, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		

BESTELL-FAX AN: 02641 9110-120

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

**Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.02.2023)

Praxis Stempel

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

2er Sets · für Standard ICX-Implantate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

ICX-ZERO BONE LOSS® KLEBEBASEN & HEILKAPPEN

Artikelnummer	ICX-ZERO BONE LOSS® KLEBEBASEN & HEILKAPPEN		Preis €*	Anzahl
C-004-007F07 & C-029-001107	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1,5 mm 		88,-	
C-004-007F08 & C-029-001108	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2.5mm 		88,-	
C-004-007F09 & C-029-001109	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3.5mm 		88,-	
C-004-007P07 & C-029-001107	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolär, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1.5mm 		88,-	
C-004-007P08 & C-029-001108	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolär, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2.5mm 		88,-	
C-004-007P09 & C-029-001109	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolär, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3.5mm 		88,-	
C-004-007M07 & C-029-001107	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1.5mm 		88,-	
C-004-007M08 & C-029-001108	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2.5mm 		88,-	
C-004-007M09 & C-029-001109	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3.5mm 		88,-	

*Die Preise gelten pro 2er-Set und zzgl. gesetzl. MwSt.

ICX-ZERO BONE LOSS
IM ICX-SHOP!



BESTELL-FAX AN: 02641 9110-120

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

**Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.02.2023)


Praxis Stempel

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-ZERO BONE LOSS®

FÜR DEN ERHALT DES PERIIMPLANTÄREN KNOCHENS

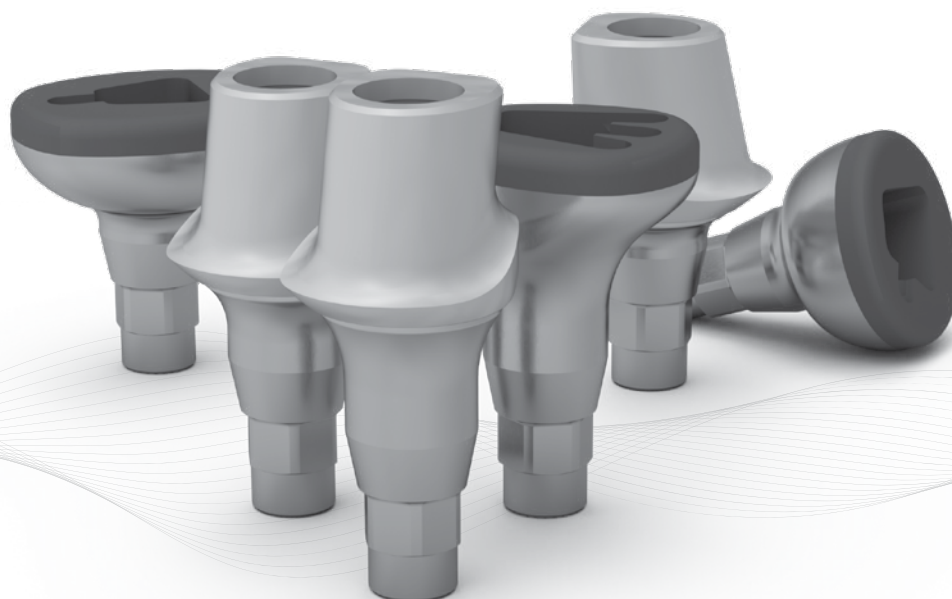

ICX-ZERO BONE LOSS® KONZEPT: DAS ERSTE REIN DIGITALE ABUTMENT-KONZEPT FÜR EXPERTEN

Nur für eine exklusive Anwendergruppe: Arbeiten Sie mit dem ICX-Zero Bone Loss® Konzept, basierend auf Intraoral-Scan-Technologie und erleben Sie die Zukunft der digitalen Implantologie.



→ Für Frontzahn, Prämolare, Molar



DIGITAL. DENTAL. FINAL.

medentis
medical