

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



5 Ncm bis 10 Ncm (handfest)	
Verschlußschrauben	
Gingivaformer	
Abdruckpfosten	
Aufbauten aus Kunststoff	

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



max. 15 Ncm	
Scankörper und alle anderen Aufbauten aus PEEK	

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



max. 30 Ncm	
alle Titan Abutments	
Klebebasen	
CERICX	
Kugelkopf	
Maximus	
ICX-multi Aufbauten	 (okklusale Verschraubung mit ca. 27 Ncm)

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



ICX-Implantate	
Allgemeine Insertion: Nicht weniger als 15Ncm und nicht mehr als 55Ncm. Sofortbelastung: Nicht weniger als 35Ncm ICX-ACTIVE MASTER -Implantate Im interforaminalen Bereich nicht mehr als 40Ncm	