


# ICX

DAS FAIRE  
PREMIUM  
IMPLANTAT-  
SYSTEM.

## DAS ICX-MULTI<sup>®</sup> KONZEPT 4-ON-ICX/6-ON-ICX

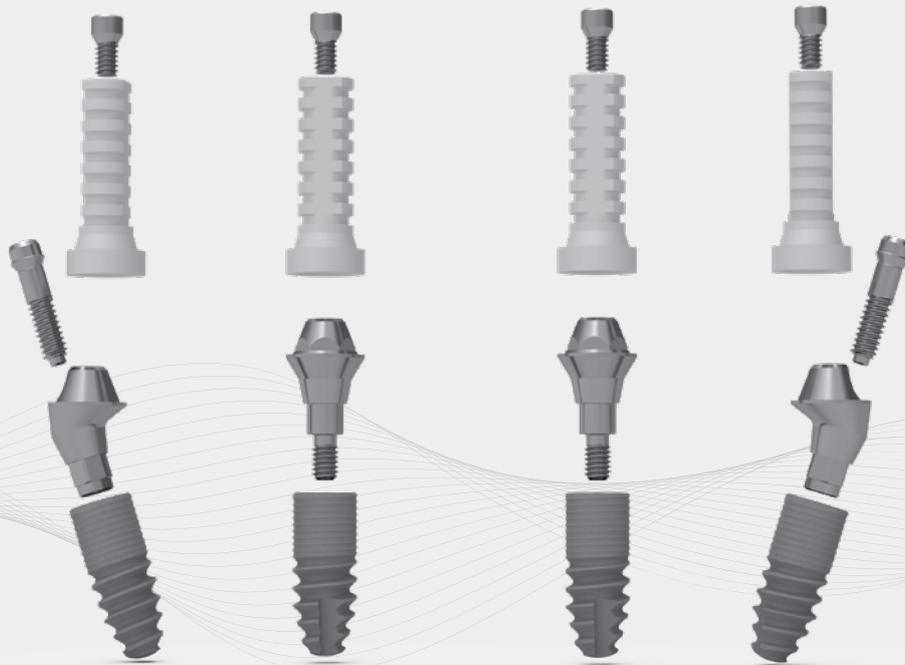

4-ON-ICX (UK)  
3-8gliedrige  
Brückenversorgung  
& Komplett-Kieferversorgung  
6-ON-ICX (OK)



Gemeinsam mit ICX in die dentale Zukunft.

**medentis**<sup>®</sup>  
medical

# Das ICX-MULTI® Konzept: 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

Mit und ohne Navigation ist es möglich, ohne augmentative Verfahren zahnlose Patienten unter Verwendung geneigter Implantate bei überschaubaren Kosten feststehend zu versorgen.


Bei entsprechender Knochenqualität und Quantität ist sogar eine Sofortbelastung möglich.

Für viele Patienten kann sich deshalb auch wirtschaftlich der Traum von festen Zähnen erfüllen.

Die fairen Preise von unseren ICX-PREMIUM-Implantaten tragen wesentlich dazu bei.




## ICX-MULTI® – feste Zähne für zufriedene Patienten.

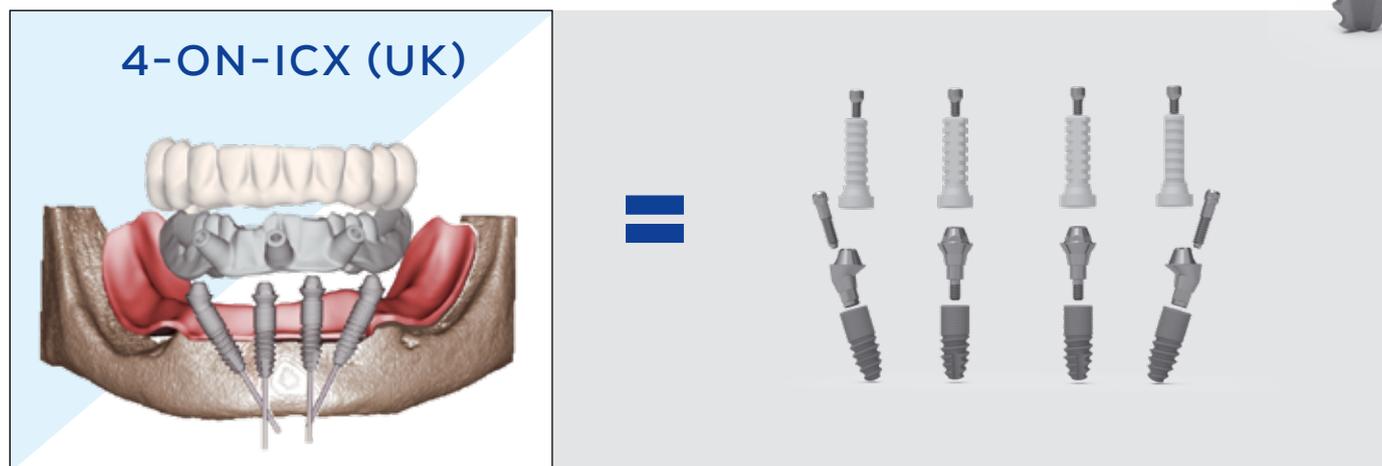

### Brückenversorgung im Unterkiefer (4-on-ICX) mit dem ICX-MULTI® Konzept

- ➡ Keine Dezentrierung oder Lockerung der distalen Pfeiler, da Implantatlager außerhalb des Verwindungsbereiches der Unterkieferspange
- ➡ Vier Implantate (Keine Nervlateralisation) ➡ Feste Brückenversorgung
- ➡ Reduzierung der Kosten

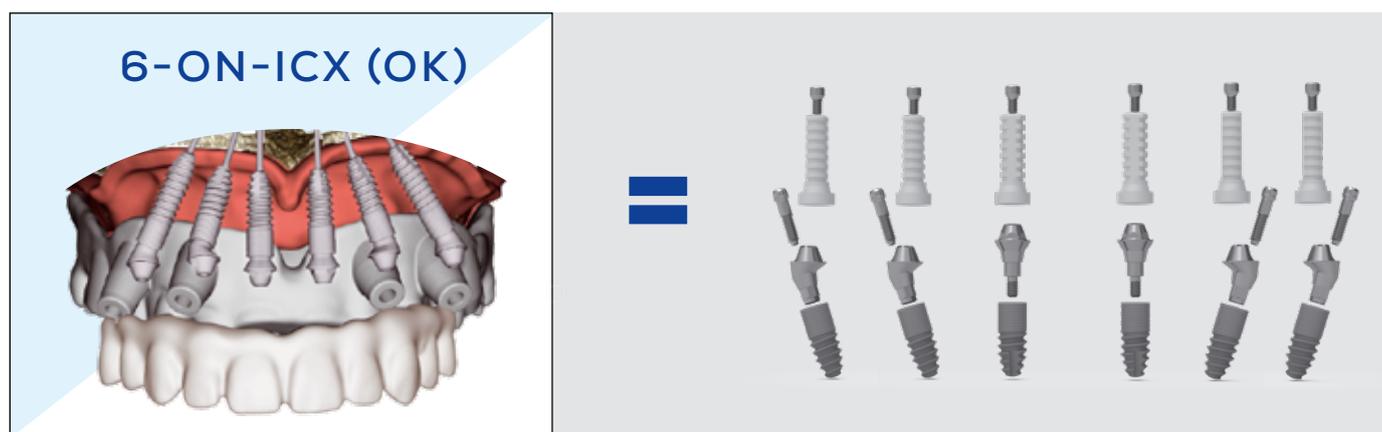

### Brückenversorgung im Oberkiefer (6-on-ICX) mit dem ICX-MULTI® Konzept

- ➡ Sechs Implantate (Gaumenfreie Versorgung) ➡ Vermeidung von Sinuslift
- ➡ Reduzierung der Behandlungszeit ➡ Reduzierung der Kosten

# Die ICX-MULTI® Produktpalette:

**Nur für Steg, Brücken und verblockte Kronen Versorgung –  
nicht für Einzelzahn- und Teleskop-Versorgungen geeignet!**

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm / Schraubendreher SW 1,2mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-020-750010		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 1mm K 2,2mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-750020		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 2mm K 2,2mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-750030		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 3mm K 2,2mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-750040		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 4mm K 2,2mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-750050		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 5mm K 2,2mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-751705		<b>17°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 1,9mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-751715		<b>17°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 2,9mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-751735		<b>17°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 4,9mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-753505		<b>35°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 3,25mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-753515		<b>35°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 4,25mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-753535		<b>35°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 6,25mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-851705		<b>17°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat <b>nicht</b> rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 1,9mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-851715		<b>17°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat <b>nicht</b> rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 2,9mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-851735		<b>17°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat <b>nicht</b> rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 4,9mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-853505		<b>35°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat <b>nicht</b> rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 3,25mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-853515		<b>35°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat <b>nicht</b> rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 4,25mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
C-020-853535		<b>35°</b> ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat <b>nicht</b> rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 6,25mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>



Hinweis: GH = Gingivahöhe  
K = Kaminhöhe



inkl. Basisschraube C-020-000010  
(Verbindungsschraube zum Implantat)



# Die ICX-MULTI® Produktpalette:

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000005		ICX-MULTI Schutzkappe	Ø 4,8 L 4,6mm	Titan	<b>19,-*</b>
C-005-070001		ICX-MULTI Abdruckpfosten, geschlossen, inkl. Abdruckkappe	L 11mm	Titan	<b>29,-*</b>
C-005-070002		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, kurz inkl. Abformhilfe	L 13mm	Titan	<b>29,-*</b>
C-005-070020		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, lang inkl. Abformhilfe	L 16,7mm	Titan	<b>29,-*</b>
C-006-010007		ICX-MULTI Modellanalog	L 11mm K 2,2mm	Titan	<b>19,-*</b>
C-020-951120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-952120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Kunststoff ausbrennbar	<b>19,-*</b>
C-020-953120		ICX-MULTI Prothetikaufbau PEEK (Provisorium/Bissregistrierung)	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Peek	<b>19,-*</b>
C-029-002010		ICX-MULTI Klebebasis, GH 1,5mm, (für Stege und Kunststoff- Verblendbrücken)	Ø 4,8 L 5,5mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-029-002011		ICX-MULTI Klebebasis GH 0mm, (für Keramik-Verblendbrücken)	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-030-000010		ICX-MULTI Scankappe	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek	<b>39,-*</b>
C-031-100001		ICX-Maximus-Kappe, GH 3mm, (zzgl. GH ICX-multi Aufbau)	Ø 4,8 L 4,4mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-015-100030		ICX-MULTI Sechskantinstrument <b>SW 1,2mm</b> mittel	SW 1,2mm	Edelstahl	<b>49,-*</b>
C-020-000001		ICX-MULTI Eindrehinstrument <b>SW 3,2mm</b> für gerade multi-Aufbauten	SW 3,2mm	Edelstahl	<b>49,-*</b>
C-020-000120		Multifixierstift für Unterfütterungs-Abdrucknahmen	10er Pack	Kunststoff	<b>49,-*</b>

 inkl. Prothetikschraube C-020-000011 (Verbindungsschraube zum ICX-multi-Aufbau)

**medentis**  
medical

# Die ICX-MULTI® Produktpalette:

## Das ICX-MULTI® Konzept: 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
C-020-750000	<b>Nur für BL!</b> 	ICX-MULTI Aufbau, gerade, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-750001	<b>Nur für TL!</b> 	ICX-MULTI Aufbau, gerade, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-956120		ICX-MULTI Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/ BC	<b>49,-*</b>
C-020-955120		ICX-MULTI-Schweißaufbau 1. Generation zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 4,8mm L 12mm	Titan	<b>39,-*</b>
C-020-955121		ICX-MULTI-Schweißaufbau 2. Generation zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 5,1mm L 10,5mm	Titan	<b>39,-*</b>
<b>NEU</b> C-020-751725		<b>17°</b> ICX-Multi Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert, GH 2,5mm	GH kurz 2,5mm GH lang 3,9mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>
<b>NEU</b> C-020-753525		<b>35°</b> ICX-Multi Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert, GH 2,5mm	GH kurz 2,5mm GH lang 5,25mm K 2,2mm	Titan	<b>99,-*</b>

 inkl. Prothetikschaube C-020-000011  
(Verbindungsschraube zum ICX-multi-Aufbau)

### Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-MULTI® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis (Euro)
		<b>Preisliste ICX-MULTI® System</b>		
	C-003-000005	ICX-MULTI Schutzkappe		19,-
	C-005-070001	ICX-MULTI Abformpfosten, geschlossen		29,-
	C-005-070002	ICX-MULTI Abformpfosten, offen		29,-
	C-006-010007	ICX-MULTI Modellanalog kurz, CAD/CAM		19,-
	C-015-100030	ICX-Sechskantinstrument SW 1,2 mittel, für alle Schrauben der Aufbauten		49,-
	C-020-000001	ICX-MULTI Instrument SW 3,2		49,-
	C-020-750000	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 0mm, <b>NICHT</b> für die ICX-plus-Implantate zu verwenden!		39,-
	C-020-750001	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 0mm, für <b>ICX-plus</b> Implantat		39,-
	C-020-750010	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 1mm		39,-
	C-020-750020	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 2mm		39,-
	C-020-750030	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 3mm		39,-
	C-020-751705	17° ICX-MULTI Aufbau, 0,5mm mit hex		99,-
	C-020-751715	17° ICX-MULTI Aufbau, 1,5mm mit hex		99,-
	C-020-751735	17° ICX-MULTI Aufbau, 3,5mm mit hex		99,-
	C-020-753505	35° ICX-MULTI Aufbau, 0,5mm mit hex		99,-
	C-020-753515	35° ICX-MULTI Aufbau, 1,5mm mit hex		99,-
	C-020-753535	35° ICX-MULTI Aufbau, 3,5mm mit hex		99,-
	C-020-851705	17° ICX-MULTI Aufbau, 0,5mm ohne hex		99,-
	C-020-851715	17° ICX-MULTI Aufbau, 1,5mm ohne hex		99,-
	C-020-851735	17° ICX-MULTI Aufbau, 3,5mm ohne hex		99,-
	C-020-853505	35° ICX-MULTI Aufbau, 0,5mm ohne hex		99,-
	C-020-853515	35° ICX-MULTI Aufbau, 1,5mm ohne hex		99,-
	C-020-853535	35° ICX-MULTI Aufbau, 3,5mm ohne hex		99,-
	C-020-951120	ICX-MULTI Prothetikaufbau, Titan		39,-
	C-020-952120	ICX-MULTI Prothetikaufbau, Kunststoff		19,-
	C-020-953120	ICX-MULTI Provisorium/Bissregistrierung, Peek		19,-
	C-029-002010	ICX-MULTI Klebebasis		39,-
	C-030-000010	ICX-MULTI Scankappe		39,-
	C-031-100001	ICX-Maximus-Kappe, 1mm für ICX-multi		39,-
	C-029-002011	ICX-MULTI Klebebasis 0mm, geringe Präphöhe		39,-
	C-020-956120	ICX-MULTI Prothetikaufbau CrCo		49,-
	C-020-955120	ICX-MULTI-Schweißaufbau, Ø 4,8mm, L 12mm		39,-
	C-020-955121	ICX-MULTI-Schweißaufbau, Ø 5,1mm, L 10,5mm		39,-
	C-020-751725	17° ICX-Multi Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert, GH 2,5mm		99,-
	C-020-753525	35° ICX-Multi Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert, GH 2,5mm		99,-

### Kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages (Mo.-Fr.) geliefert; und das ohne Versandkosten, innerhalb Deutschlands.

Name .....

Kd.-Nr. ....

Datum, Unterschrift .....

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.06.21)

Praxis Stempel