

ICX-MAGELLAN BONE SPREADER



ICX-MAGELLAN BONE SPREADER:

Mit den geführten ICX-BoneSpreader (Spreitzinstrument) kann navigiert und geführt, der resorbierte Knochen schonend und kontrolliert ausgedehnt werden (Bone Spreading).

ICX-MAGELLAN BONE SPREADER

ICX-BoneSpreader gehören zum ICX-MAGELLAN-System zur Verbreiterung des Alveolarkamms und gleichzeitiger Knochenverdichtung. Mit den geführten ICX-BoneSpreader (Spreitzinstrument) kann navigiert und geführt der resorbierte Knochen schonend und kontrolliert ausgedehnt werden (Bone Spreading).

Zunächst wird der kortikale Alveolarknochen mit Hilfe eines ICX-MAGELLAN Bohrer navigiert und geführt durchdrungen. Entlastungsschnitte werden angelegt. Die ICX-BoneSpreader werden full guided, mit der ICX-Drehmoment Ratsche angewandt. Diese gibt es in 4 Abstufungen.

ICX-MAGELLAN BONE SPREADER:

✓ Aufbauten jetzt in $\varnothing 4,5\text{mm}$


✓ Für ICX- und
ICX-plus Implantate

Die Parameter sind speziell auf die ICX-PREMIUM und ICX-ACTIVE-MASTER Implantate, der Firma medentis medical abgestimmt. Durch das speziell gewählte Design und Abstufung der Gewindegänge ist ein verdichten (Bone Condensing) im spongiosen Alveolarknochen möglich.

Die Anwendung der ICX-BoneSpreader ermöglicht somit eine Insertion von ICX-Implantaten auch bei schwierigen Knochenverhältnissen. Der Alveolarknochen wird verarbeitet und der spongiöse Knochen gleichzeitig verdichtet. Somit kommt es zu einer Erhöhung der Primärstabilität der inserierten ICX-Implantate.

New!

ICX-SHOP!

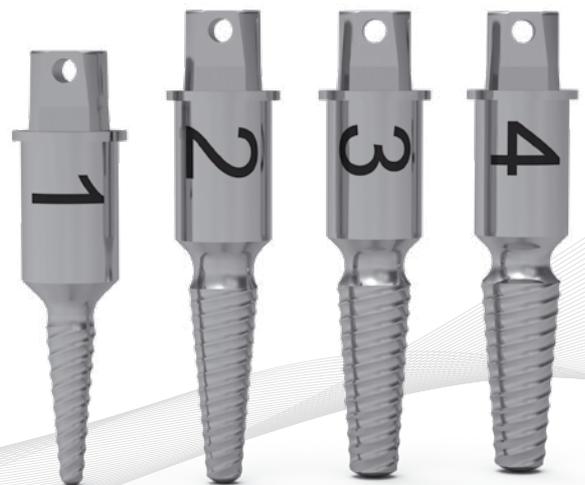

Anleitung 1 von 3

ICX-MAGELLAN Bone Spreading Kit

- 1.**
 - setzen Sie die individuell gefertigte ICX-MAGELLAN Bohrschablone auf die vorbereitete Mundsituation auf.
 - befestigen Sie diese einzeln, mit den Befestigungspins (C-032-000013) durch die ICX-MAGELLAN Bohrschablone mit Befestigungsbohrer 1,5mm (C-032-000020)
 - entfernen Sie die Befestigungspins und nehmen Sie die ICX-MAGELLAN Bohrschablone von der Mundsituation ab.
 - öffnen Sie die Gingiva, an der zu dehnenden Position im Mund und klappen Sie diese auf.



ICX-SHOPI



- 2.**
 - setzen Sie die individuell gefertigte ICX-MAGELLAN Bohrschablone auf die vorbereitete Mundsituation wieder auf und befestigen Sie diese mit den Befestigungspins, an ihrer ursprünglichen Position.
 - fertigen Sie, eine Vorbohrung, mit dem ICX-MAGELLAN Universal-Löffel (C-032-000007) und dem 2.0 mm ICX-MAGELLAN Universal-Bohrer kurz (C-032-020110) an.



- 3.**
 - entfernen Sie die Befestigungspins und nehmen Sie die ICX-MAGELLAN Bohrschablone von der Mundsituation ab.



ICX-MAGELLAN BONE SPREADER

Anleitung 2 von 3

ICX-MAGELLAN Bone Spreading Kit

4.

- legen Sie, im zu dehrenden Knochen, entlang der Knochenkante, wie erlernt Entlastungsschnitte an.
- setzen Sie die individuell gefertigte ICX-Bohrschablone auf die vorbereitete Mundsituation wieder auf und befestigen Sie diese mit den Befestigungspins, an ihrer ursprünglichen Position.



5-8.

- dehnen Sie den Knochen bis zur gewünschten Breite mit den ICX-BoneSpreadern mit der ICX-Drehmoment-Ratsche (960001) auf. Starten Sie immer mit dem ICX-Bone Spreader No.1 (C-014-600001).

Arbeiten Sie sich, gegebenenfalls mit den ICX-BoneSpreader No.2 (C-014-600002), ICX-Bone Spreader No.3 (C-014-600003) und ICX-BoneSpreader No.4 (C-014-600004) auf die gewünschte Breite vor.



Anleitung 3 von 3


ICX-MAGELLAN Bone Spreading Kit

9-10.

- entfernen Sie die ICX-BoneSpreader und bringen Sie die gewünschten ICX-Implantate, durch die individuelle ICX-MAGELLAN Bohrschablone, mit dem dazugehörigen Einbringinstrument von medentis medical ein.



ICX-MAGELLAN BONE SPREADER BOX

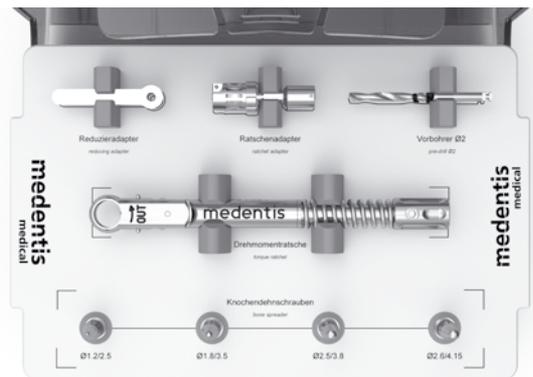

Inhalt

ICX-BoneSpreader Box:

C-018-000019

ICX-Überweiser-Box-LEER (ohne Inhalt)

C-018-100019

ICX-Überweiser-Box-GEFÜLLT (mit Inhalt)

C-014-600001

ICX-BoneSpreader Nr. 1

C-014-600002

ICX-BoneSpreader Nr. 2

C-014-600003

ICX-BoneSpreader Nr. 3

C-014-600004

ICX-BoneSpreader Nr. 4

960001

ICX-Ratsche

960007

ICX-Universal Handstück

C-021-000002

ICX-Schlüssel Massiv Aufbau

C-032-000007

ICX Magellan Universal-Löffel ø 2,0


C-032-020110

ICX-Magellan Universalbohrer,
kurz ø2,0 für Löffel

New!

medentis[®]
medical

Artikel-Nr.		Artikel	Material
NEU C-014-600001		ICX -BoneSpreader Nr. 1 Ø 1 = 1,2mm · Ø 2 = 2,5mm L = 8mm	Titan
NEU C-014-600002		ICX -BoneSpreader Nr. 2 Ø 1 = 1,8mm · Ø 2 = 3,5mm L = 10mm	Titan
NEU C-014-600003		ICX -BoneSpreader Nr. 3 Ø 1 = 2,5mm · Ø 2 = 3,8mm L = 10mm	Titan
NEU C-014-600004		ICX -BoneSpreader Nr. 4 Ø 1 = 2,6mm · Ø 2 = 4,15mm L = 10mm	Titan

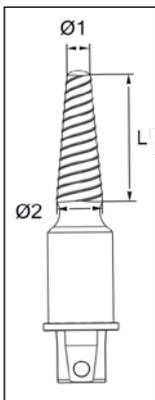

Details:

Die Bezeichnung gibt die Größe wieder, z.B. **Ø 1 = 1,2mm · Ø 2 = 2,5mm L = 8mm** bedeutet: Start Ø 1 an Spitze = 1,2mm / Ø 2 = 2,5mm bei Endlänge - wobei 8mm die Länge der Eindringtiefe in mm darstellt.

Der Tiefenanschlag ist nur in Verbindung mit einer ICX-MAGELLAN Borschablone zu verwenden.

Zu verwendendes Instrument: Massivaufbautenschlüssel C-021-000002

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages (Mo.-Fr.) geliefert; und das ohne Versandkosten, innerhalb Deutschlands.

ICX-SHOPI



Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf. (Stand 01.02.23).
Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel