

ICX-MAGELLAN X

HANDBUCH 3.0



DER DIGITALE ICX-WORKFLOW IN DER IMPLANTOLOGIE.

3-D-Lösungen für Diagnostik und Backward Planing.

BE SMART. BE ICX.



Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

INHALT

1. EINLEITUNG	4
1.1 Produktinformation	4
1.2 Möglichkeiten der Einheilung.....	4
2. PRODUKTÜBERSICHT	4
2.1 ICX-Implantate, ICX-MAGELLAN und Instrumente	6-9
2.2 ICX-MAGELLAN-Box Inhaltsübersicht.....	10/11
3. ANWENDUNG	12
3.1 Abformung und Modellherstellung.....	12
3.2 Wax-up und Set-up.....	12
3.3 Röntgendiagnostik und Planung	12
3.4 Von der Planung zur ICX-Bohrschablone.....	12
3.5 Optional: ICX-IMPERIAL – Feste Zähne, sofort!.....	13
ICX-MAGELLAN-Bohrprotokoll und Anwendungsbeispiel.....	14/15
Anleitung: Schablonenbefestigung.....	16/17
Anleitung: Implantatbettvorbereitung und Insertion.....	18/19
ICX-MAGELLAN - Komplette Artikelübersicht.....	20-26
Service und Kontakt	27




medentis
medical



Einfach einscannen
und ICX-MAGELLAN X®
online besuchen!

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN X

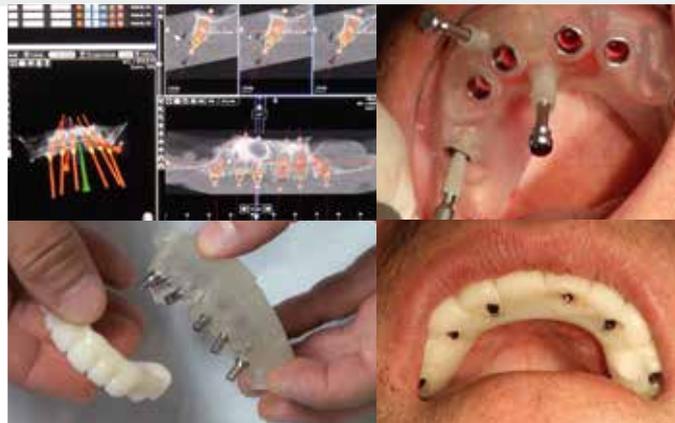

1. EINLEITUNG

1.1 Produktinformation

Das ICX-MAGELLAN-Bohrer-Set ist zwingend erforderlich innerhalb des ICX-MAGELLAN-Systems, zur Verwendung in der schablonengeführten Implantatbett-aufbereitung und Insertion von ICX-Implantaten. Die Indikationen sind vielfältig und an zahnlosen und teilbezahnten Ober- und Unterkiefern.

Bestandteil des kompletten Sets ist:

- Chirurgische Instrumente zur schablonengeführten enossal bzw. parodontal abgestützten Implantatbett-aufbereitung und Implantatinsertion
- Labortechnische Instrumente zur Umarbeitung einer Planungs- in eine Bohrschablone

Zur Anwendung des ICX-MAGELLAN-Systems muss die Praxis oder das Labor über die ICX-MAGELLAN-3D-Planungs-Software verfügen.

In der Praxis oder im Dentallabor wird mit Hilfe der ICX-MAGELLAN-Software eine Planung erstellt. Die ICX-Experten erstellen Ihnen dann eine ICX-MAGELLAN- Bohrschablone.

Durch die individuell gefertigte Bohrschablone werden die chirurgischen Instrumente des ICX-MAGELLAN-System bei der Implantatbett-aufbereitung sowie die ICX-Implantate bei der Insertion geführt.

Hinweis:

Die medentis medical GmbH übernimmt keine Gewähr für die korrekte Planung, Ausführung und Umsetzung der Bohrschablone. Vor dem Einsatz des ICX-MAGELLAN-SystemS ist für den Anwender eine intensive Auseinandersetzung mit dem 3D-Planungssystem und dem Positionierer dringend notwendig.

1.2 Möglichkeiten der Einheilung

Die Einheimöglichkeiten sind wahlweise:


- transgingivale Einheilung mit Gingivaformer
- transgingivale Einheilung mit Langzeitprovisorium als Sofortversorgung.
- subgingivale Einheilung mit Verschlusschraube



ICX-MAGELLAN X HANDBUCH 3.0



Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

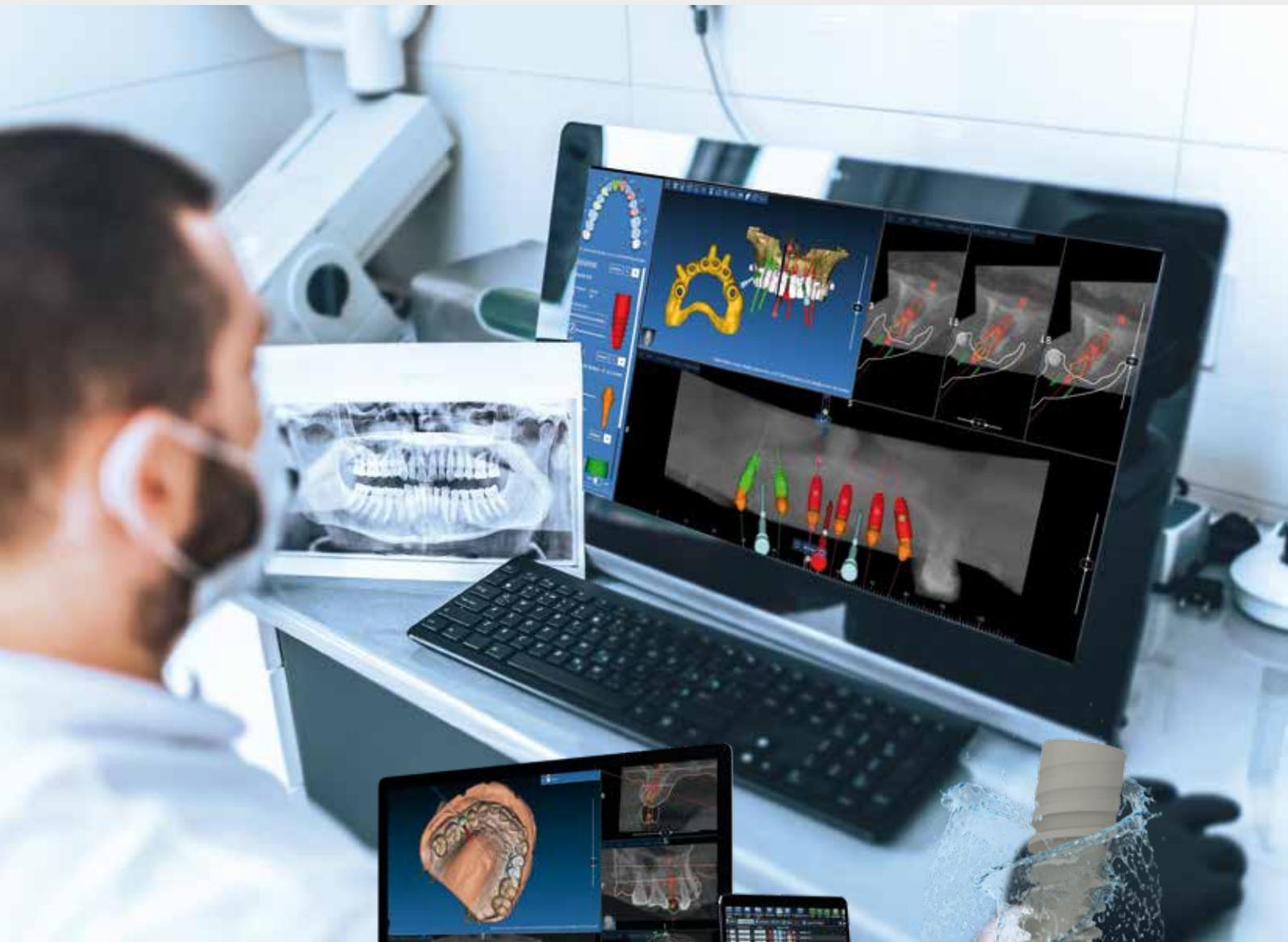

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

2.1 PRODUKTÜBERSICHT

D1-Bohrer rosa ●●●



Wichtiger Hinweis:
Bohrer für harten
Knochen, D1
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
3 rosa Punkte

D2-3-Bohrer rosa ●●



Wichtiger Hinweis:
Bohrer für weichen/
mittelharten Knochen,
D3/D2
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
2 rosa Punkte

D4-Bohrer rosa ●



Wichtiger Hinweis:
Bohrer für sehr
weichen Knochen D4,
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
1 rosa Punkte



Stopbohrer-rosa ●



Gingivastanze-rosa ●






Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.


2.1 PRODUKTÜBERSICHT

D1-Bohrer gelb ●●●

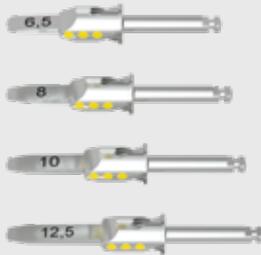


Wichtiger Hinweis:
Bohrer für harten Knochen, D1 erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 gelbe Punkte

D1-Bohrer rot ●●●

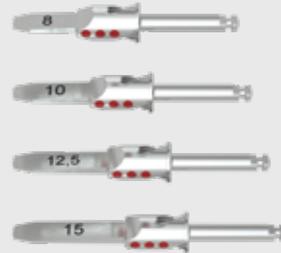


Wichtiger Hinweis:
Bohrer für harten Knochen, D1 erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 rote Punkte

D2-3-Bohrer gelb ●●

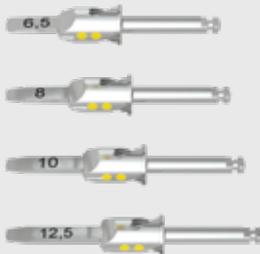


Wichtiger Hinweis:
Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2 erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 gelbe Punkte

D2-3-Bohrer rot ●●

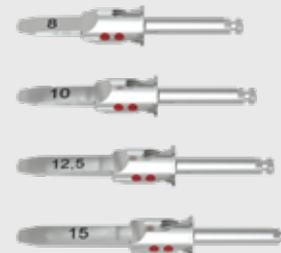

Wichtiger Hinweis:
Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2 erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 rote Punkte

D4-Bohrer gelb ●

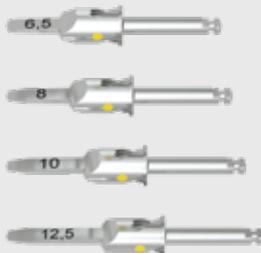

Wichtiger Hinweis:
Bohrer für sehr weichen Knochen D4, erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 gelber Punkt

D4-Bohrer rot ●



Wichtiger Hinweis:
Bohrer für sehr weichen Knochen D4, erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 roter Punkt



Stopbohrer-gelb ●



Gingivastanze-gelb ●



Stopbohrer-rot ●



Gingivastanze-rot ●

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.


2.1 PRODUKTÜBERSICHT

D1-Bohrer grün ●●●




Wichtiger Hinweis:
Bohrer für harten Knochen, D1
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
3 grüne Punkte

D1-Bohrer blau ●●●

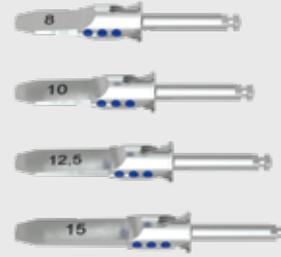


Wichtiger Hinweis:
Bohrer für harten Knochen, D1
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
3 blaue Punkte

D2-3-Bohrer grün ●●

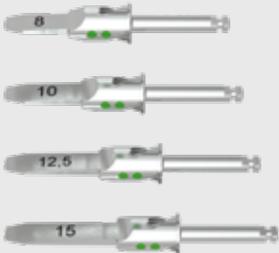

Wichtiger Hinweis:
Bohrer für weichen/
mittelharten Knochen,
D3/D2
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
2 grüne Punkte

D2-3-Bohrer blau ●●

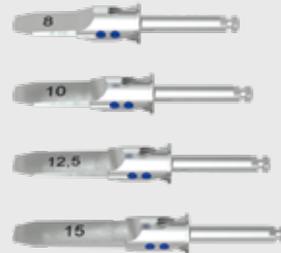


Wichtiger Hinweis:
Bohrer für weichen/
mittelharten Knochen,
D3/D2
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
2 blaue Punkte

D4-Bohrer grün ●



Wichtiger Hinweis:
Bohrer für sehr
weichen Knochen D4,
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
1 grüner Punkt

D4-Bohrer blau ●

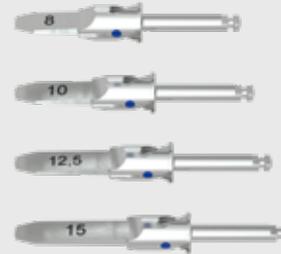

Wichtiger Hinweis:
Bohrer für sehr
weichen Knochen D4,
erkennen Sie an der
Farbmarkierung =
1 blauer Punkt



Stopbohrer-grün ●

Gingivastanze-grün ●



Stopbohrer-blau ●

Gingivastanze-blau ●



Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

2.1 PRODUKTÜBERSICHT - ZUBEHÖR

C-032-000008
Bohrführungshülse



Innen Ø 4,85mm
Aussen hex 5,6mm
Bund Ø 5,6mm

C-032-000006
Universal-Bohr-
führungshülse
Ø 2,2mm



Innen Ø 2,2mm
Aussen Ø 2,95 mm
Bund Ø 3,3mm

C-032-000014
Einbringinstrument
für alle Implantate
Wichtig: ausser ICX-plus



C-032-000015
Einbringinstrument
für ICX-plus
gelber Farbring



C-032-000020
Befestigungs-
bohrer Ø 1,5mm



C-032-022110
Universalbohrer
Ø 2,2 Bohrlänge
bis 10mm



C-032-022150
Universalbohrer
Ø 2,2 Bohrlänge
bis 15mm



C-032-000002
Führungshülse
mit Befestigungspin



Innen Ø 1,5mm
Aussen Ø 2,4mm
Bund Ø 2,8mm

C-032-000022
Vorböhrer L=6,5mm
für alle Implantate
Wichtig: ausser ICX-plus



C-032-000009
Befestigungspin kurz



C-032-000021
Vorböhrer
für alle Implantate



C-032-020110
ICX-MAGELLAN
Universalbohrer
Ø 2,0mm, kurz



C-032-000007
ICX-MAGELLAN
Universal-Löffel
Ø 2,0mm



C-032-000013
Befestigungspin



C-015-100025
Sechskantinstrument
SW 1,4



C-015-110020
Einbringinstrument
verschraubbar ISO-
Schaft +2.0mm



C-032-000026
ICX-3.3 Einbring-
instrument



C-032-000025
ICX-3.3 Magellan
Vorböhrer



C-032-000024
ICX-3.3
Corticalbohrer



C-032-000017
TL Magellan
Einbringinstrument
Kugelrast



C-015-110020
Einbringinstrument
verschraubbar
ISO-Schaft +2.0mm



Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

2.2 INHALTSÜBERSICHT



Jetzt mit Bohrern
für ICX-3.3 Implantate!

Inhalt:

57 Bohrer

5 Gingivastanzen

5 Stopbohrer

Zubehör:

4 Ankerpins

1 Bohrer für Ankerpins

4 Vorbohrer

1 Einbringinstrument für ICX

1 Einbringinstrument für ICX-plus



1 Einbringinstrument für ICX-3.3

1 Universalbohrer





Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

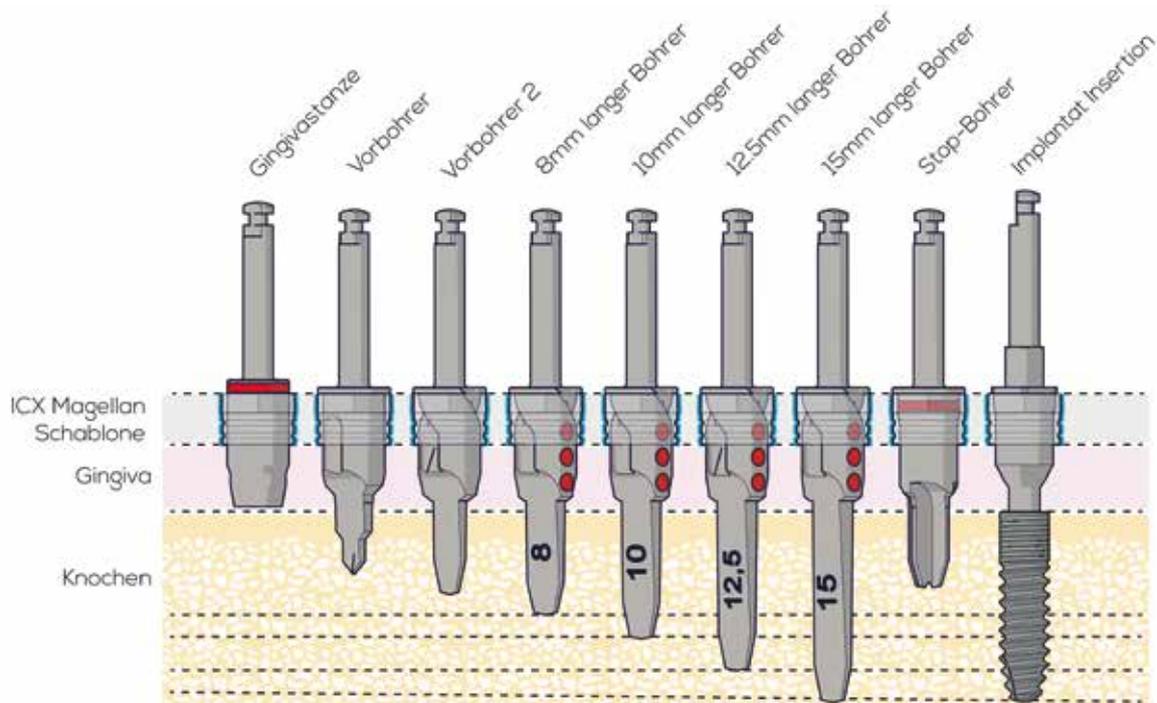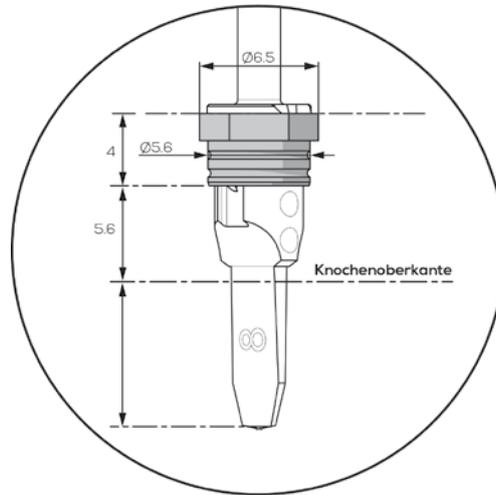

ICX-MAGELLAN X

Sicher implantieren und/oder sofort provisorisch/endgültig versorgen.

Die Komponenten von ICX-MAGELLAN dienen der schablonengeführten Aufbereitung des Implantatbetts und Insertion von ICX-Implantaten.

- Labortechnische Instrumente zum Umarbeiten einer Planungs- in eine Bohrschablone
- Chirurgische Instrumente zur schablonengeführten, enossal bzw. parodontal abgestützten Implantatbettaufbereitung und Implantatinsertion

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

3. ANWENDUNG

3.1 Abformung und Modellherstellung

Ausreichend teilbezahnter Kiefer

Voraussetzung für die Abformung der Mundsituation und der Herstellung eines Meistermodells ist bei einem teilbezahnten Kiefer eine ausreichend stabile und repositionierbare Fixation einer Planungsschablone mit den vorhandenen Zähnen.

Zahnloser oder nicht ausreichend bezahnter Kiefer

Ist keine ausreichend stabile Fixation einer Planungsschablone bei einem zahnlosen oder einem teilbezahnten Kiefer gewährleistet, wird die Schablone mittels Befestigungspins in ausreichender Anzahl gesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass im zahnlosen Kiefer mindestens drei Stück verankert werden sollten, um später die Planungsschablone exakt im Mund fixieren zu können. Um eine ungehinderte Insertion der ICX-Implantate zu gewährleisten, muss auf eine bestmögliche mechanische Stabilität geachtet werden.

3.2 Wax-up und Set-up

Um die optimale Zahnposition für die spätere Versorgung aus prothetischer Sicht zu ermitteln, wird auf dem Meistermodell ein Wax-up/Set-up der zu ersetzenden Zähne erstellt. Dies wird eingescannt, in die ICX-MAGELLAN-Software eingelesen und dient als Vorgabe bei der digitalen Planung.

3.3 Röntgendiagnostik und Planung

Mit der Doppel-Scantechnik wird eine Dicom 3.0-Datei erstellt (CT/DVT). Ebenso wird die aktuelle Scanprothesen alleine aufgenommen und digitalisiert.

Bei restbezahnten, nicht stark restaurierten Kiefern kann auf die Doppel-Scantechnik verzichtet werden.

Anschließend werden die dadurch gewonnenen Daten in die ICX-MAGELLAN-3D-Planungssoftware eingelesen. Mit Abschluss der Planung der Implantatpositionen in der 3D-Software werden die Daten zum Einstellen des Positionierers berechnet.

Folgende Sicherheitsabstände müssen unbedingt eingehalten werden:

- 3,0 mm zum angrenzenden Implantat.
- Implantatdurchmesser und -länge sind so zu bestimmen, dass um das Implantat ausreichend Knochen (mindestens 1,0 mm) vorhanden ist.
- 2,0 mm zum Nervus mandibularis bzw. Nervus alveolaris inferior.
- 1,5 mm zum angrenzenden natürlichen Zahn.

3.4 Von der Planung zur ICX-Bohrschablone

Durch die ICX-MAGELLAN-Planungssoftware können Sie einfach per „Upload“ Ihre persönliche und individuelle Bohrschablone bestellen.





Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.


3.5 OPTIONAL: ICX-IMPERIAL – Feste Zähne, sofort!

... alles aus einer Hand!

1) ICX-MAGELLAN:

Bis zu drei MAGELLAN-Bohrschablonen
& ein gedrucktes 3D-Modell

- ICX-MAGELLAN-Experten-Planung
- individuelle Bohrschablonen, inkl. Hülsen
- 3D Modell mit positionierten Modellanalogen

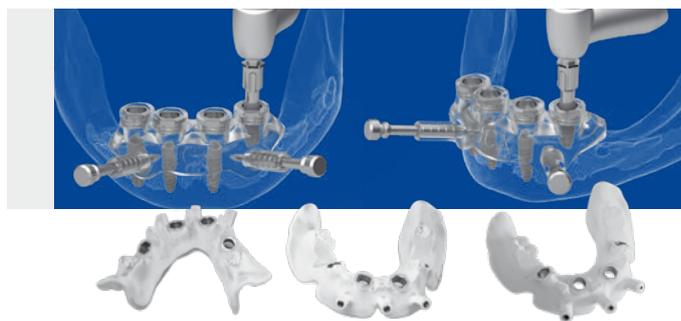

2) ICX-PREMIUM-IMPLANTAT-SYSTEM:

Implantate & Aufbauten

- ausgewählte ICX-PREMIUM- und ICX-ACTIVE-MASTER-Implantate
- ICX-MULTI-Aufbauten
- Prothetikaufbauten aus Titan



3) ICX-SmileBridge:

Fertig gefrästes Provisorium

- individuelle, präfabrizierte, gefräste, multicolor PMMA Brücke
- mundbeständig bis zu 6 Jahren



INDIVIDUELLER BERATUNGSTERMIN IN IHRER PRAXIS –

WIR ERKLÄREN IHNEN ICX-IMPERIAL –

RUFEN SIE UNS EINFACH AN UND VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN!


Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.


BOHRPROTOKOLL & ANWENDUNGSBEISPIEL:


Bohrprotokoll - ICX-MAGELLAN
am ICX-Implantat \varnothing 3,75 x 12,5mm

ICX-Implantat \varnothing 3,75 x 12,5mm

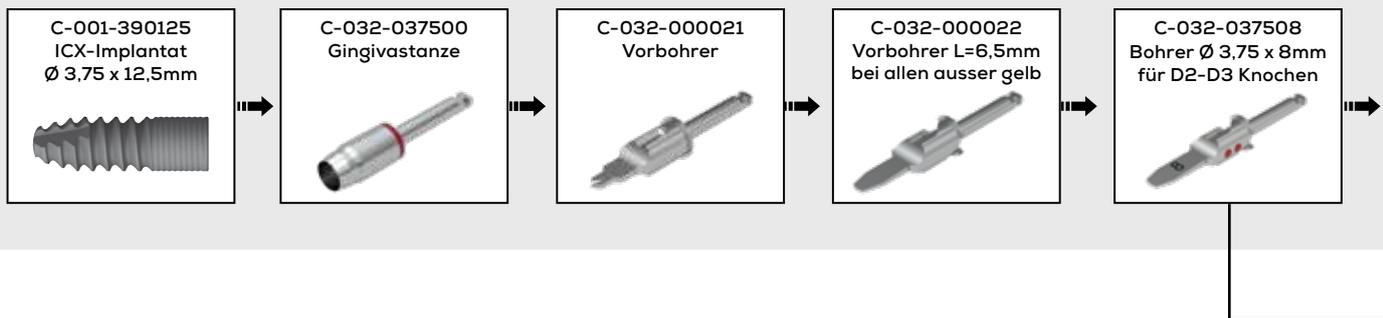

Erläuterung des Anwendungsbeispiels – Ablauf ist
anwendbar auf alle ICX-Implantat-Durchmesser und Knochenstärken



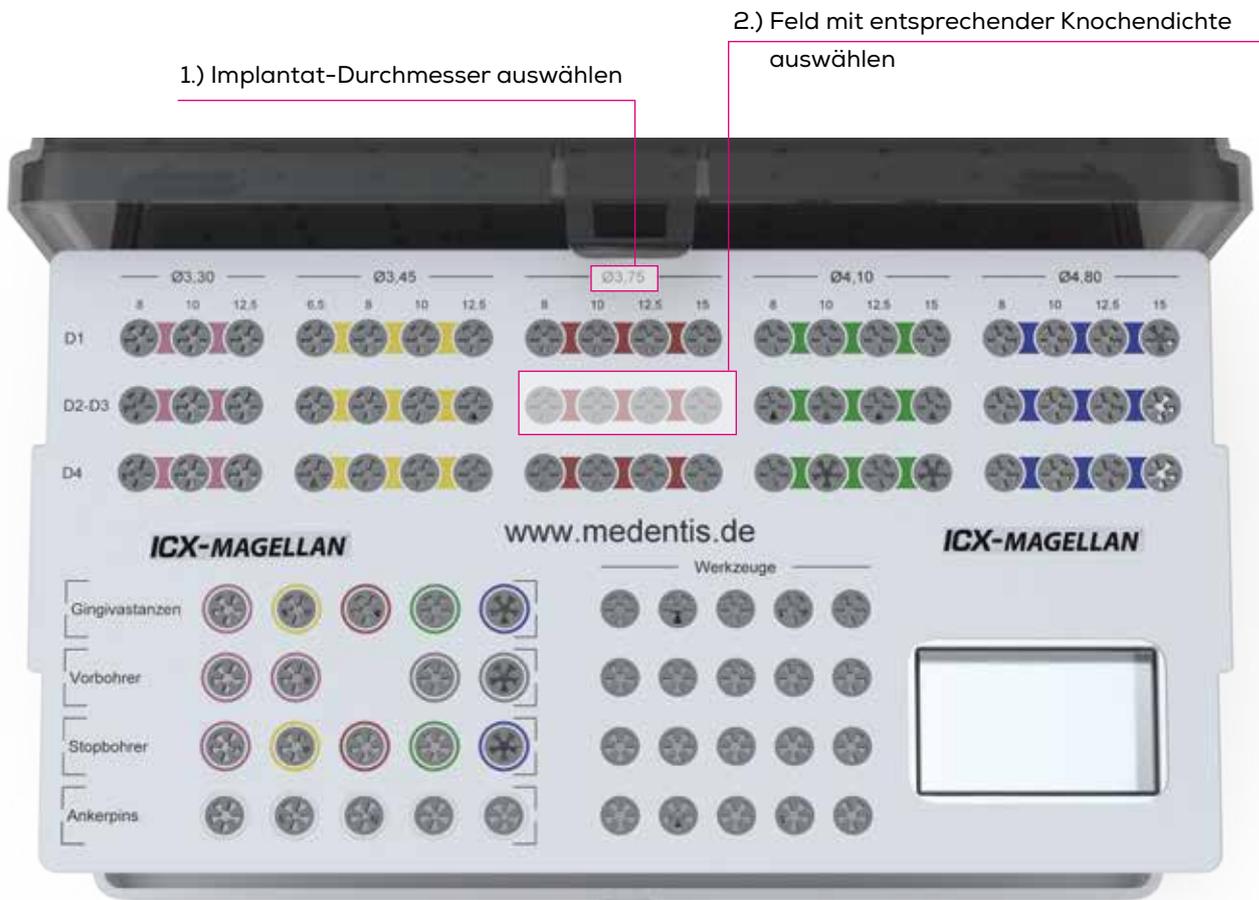


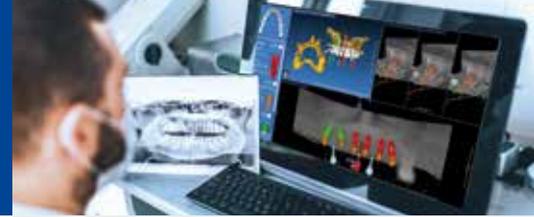

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

BOHRPROTOKOLL & ANWENDUNGSBEISPIEL:

Bohrprotokoll – ICX-MAGELLAN am ICX-Implantat \varnothing 3,75 x 12,5mm

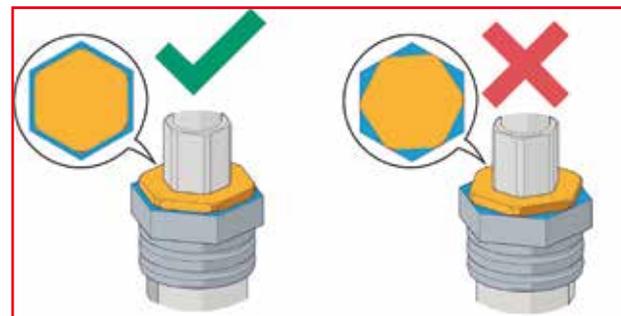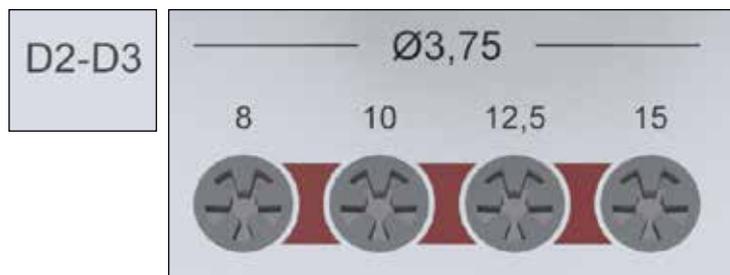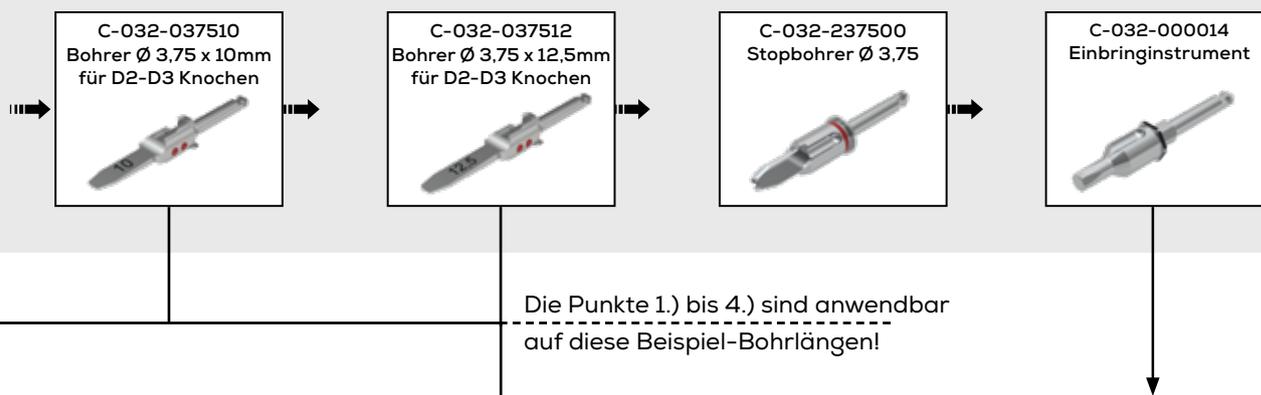

WICHTIGER HINWEIS:

Bei angulierten und prothetischen Abutments immer den Sechskant des Einbringinstruments nach dem Hülseensechskant ausrichten!

3.) Mit kleinster Bohrlänge (8mm) starten

4.) Mit jedem weiteren Bohrer fortfahren, bis die gewünschte Implantatlänge (im Beispiel hier: 12,5mm) erreicht ist.


WICHTIGER HINWEIS: Der Stopbohrer ist als letzte Bohrsequenz zwingend erforderlich!

5.) Implantat-Insertion: Bei ICX-Implantaten nehmen Sie Art.-Nr.: C-032-000014
bei ICX-plus-Implantaten nehmen Sie Art.-Nr.: C-032-000015
(Das Einbringinstrument für ICX-plus ist am gelben Ring erkennbar!)


6.) Bohrerzahl: Alle Bohrer außer BLAU 500 U/min · BLAU: 400 U/min · Gingivastanze: 15 U/min

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.


ANLEITUNG: SCHABLONENBEFESTIGUNG

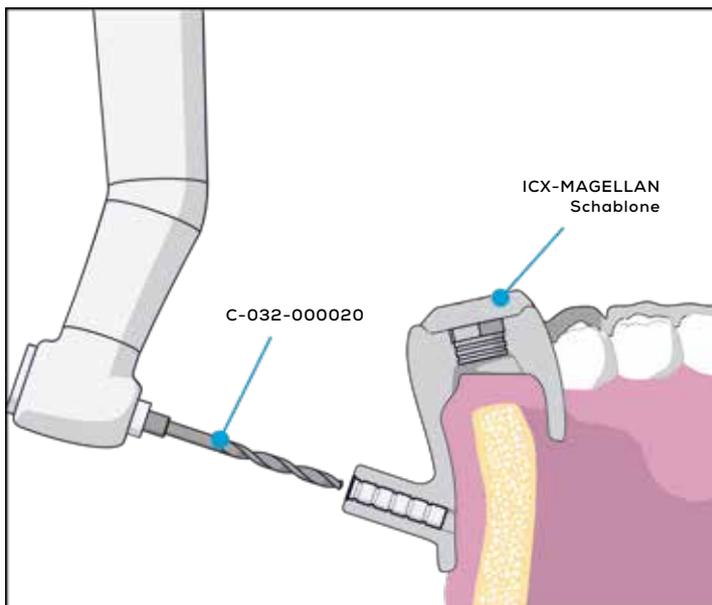

SCHRITT 1A
Bohrung

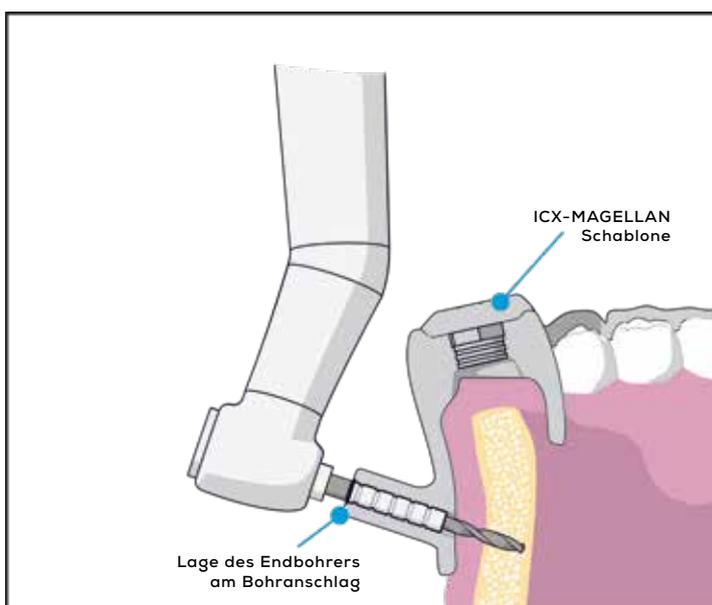


SCHRITT 1B
Bohrung

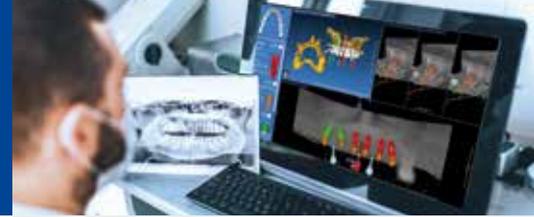

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ANLEITUNG: **SCHABLONENBEFESTIGUNG**

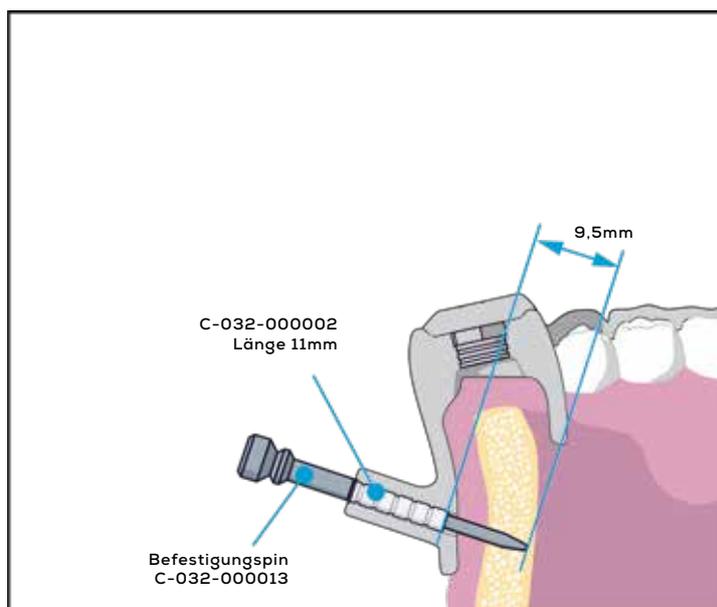

SCHRITT 2 Fixieren

*NOCH SICHERER IMPLANTIEREN MIT
ICX – DEM FAIREN PREMIUM-IMPLANTAT-SYSTEM ...*


ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ANLEITUNG: **IMPLANTATBETTVOBERBEREITUNG UND INSERTION**


SCHRITT 1

Präparation des Implantatbetts

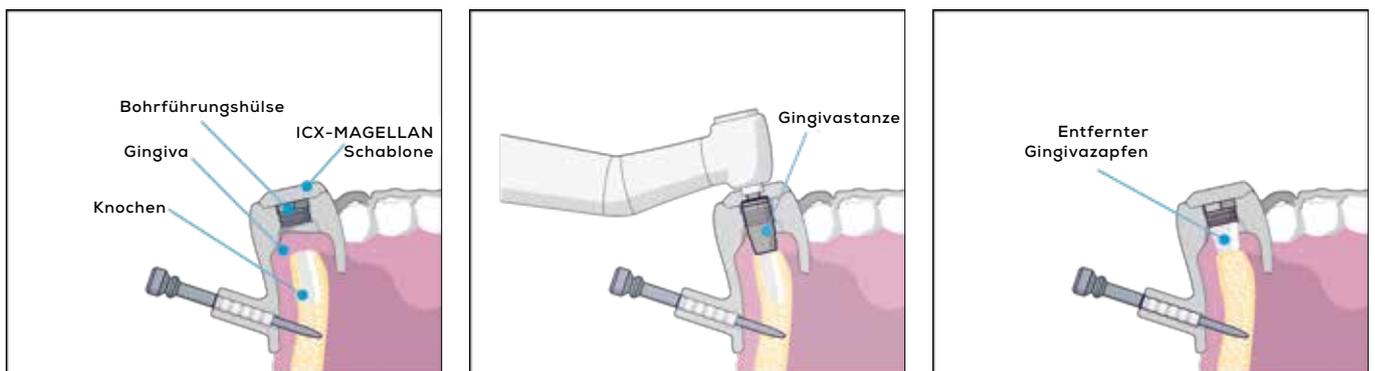

SCHRITT 2

Bohrungen nach Protokoll

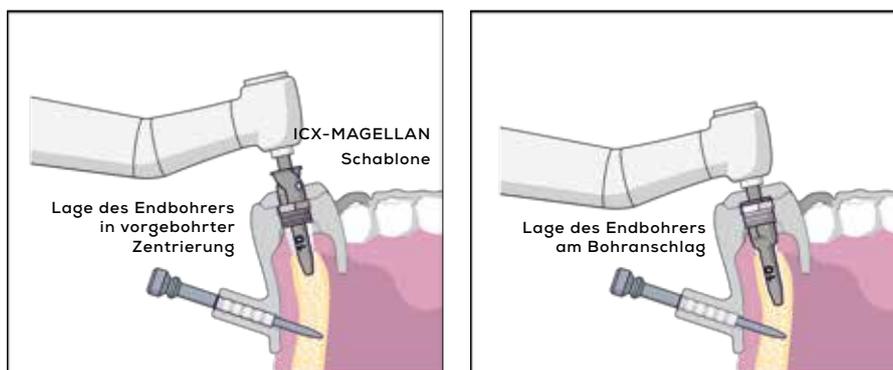

Einfach einscannen
und ICX-MAGELLAN X®
online besuchen!





Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ANLEITUNG: IMPLANTATBETT-VORBEREITUNG UND INSERTION

SCHRITT 3

Implantatinsertion

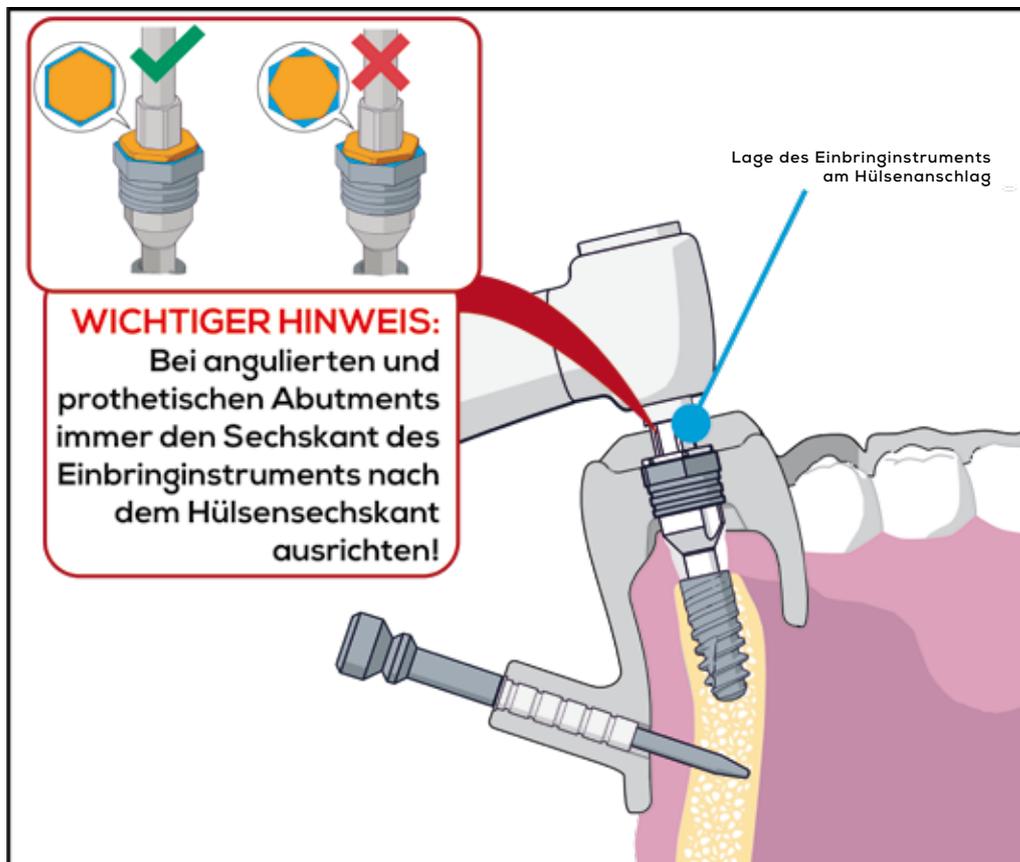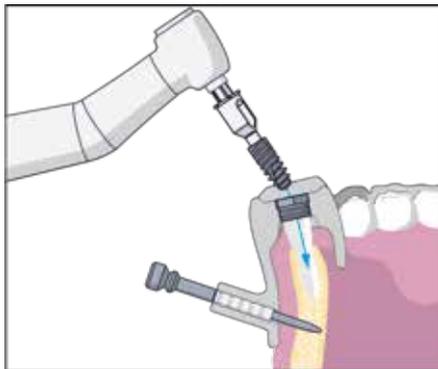

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN ARTIKEL-ÜBERSICHT

Artikel-Nr.	ICX-3.3 Bohrer rosa ●	Artikel	Preis €
C-032-133008		D1 Bohrer rosa 8mm	119,90*
C-032-133010		D1 Bohrer rosa 10mm	19,90*
C-032-133012		D1 Bohrer rosa 12,5mm	19,90*
C-032-033008		D2-3 Bohrer rosa 8mm	19,90*
C-032-033010		D2-3 Bohrer rosa 10mm	19,90*
C-032-033012		D2-3 Bohrer rosa 12,5mm	19,90*
C-032-333008		D4 Bohrer rosa 8mm	19,90*
C-032-333010		D4 Bohrer rosa 10mm	19,90*
C-032-333012		D4 Bohrer rosa 12,5mm	19,90*
C-032-233000		Stop-Bohrer rosa	19,90*
C-032-033000		Gingivastanze rosa	19,90*



Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN


ARTIKEL-ÜBERSICHT


Artikel-Nr.	ICX-3.45 Bohrer gelb ●	Artikel	Preis €
C-032-134506		D1 Bohrer gelb 6,5mm	119,90*
C-032-134508		D1 Bohrer gelb 8mm	19,90*
C-032-134510		D1 Bohrer gelb 10mm	19,90*
C-032-134512		D1 Bohrer gelb 12,5mm	19,90*
C-032-034506		D2-3 Bohrer gelb 6,5mm	19,90*
C-032-034508		D2-3 Bohrer gelb 8mm	19,90*
C-032-034510		D2-3 Bohrer gelb 10mm	19,90*
C-032-034512		D2-3 Bohrer gelb 12,5mm	19,90*
C-032-334506		D4 Bohrer gelb 6,5mm	19,90*
C-032-334508		D4 Bohrer gelb 8mm	19,90*
C-032-334510		D4 Bohrer gelb 10mm	19,90*
C-032-334512		D4 Bohrer gelb 12,5mm	19,90*
C-032-234500		Stop-Bohrer gelb	19,90*
C-032-034500		Gingivastanze gelb	19,90*

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN

ARTIKEL-ÜBERSICHT

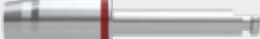Artikel-Nr.	ICX-3.75 Bohrer rot ●	Artikel	Preis €
C-032-137508		D1 Bohrer rot 8mm	19,90*
C-032-137510		D1 Bohrer rot 10mm	19,90*
C-032-137512		D1 Bohrer rot 12,5mm	19,90*
C-032-137515		D1 Bohrer rot 15mm	19,90*
C-032-037508		D2-3 Bohrer rot 8mm	19,90*
C-032-037510		D2-3 Bohrer rot 10mm	19,90*
C-032-037512		D2-3 Bohrer rot 12,5mm	19,90*
C-032-037515		D2-3 Bohrer rot 15mm	19,90*
C-032-337508		D4 Bohrer rot 8mm	19,90*
C-032-337510		D4 Bohrer rot 10mm	19,90*
C-032-337512		D4 Bohrer rot 12,5mm	19,90*
C-032-337515		D4 Bohrer rot 15mm	19,90*
C-032-237500		Stop-Bohrer rot	19,90*
C-032-037500		Gingivastanze rot	19,90*

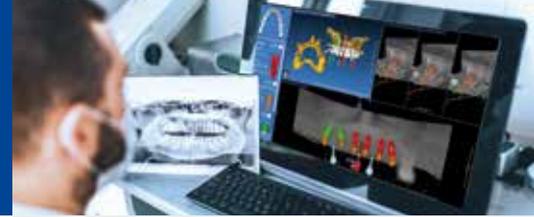

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN

ARTIKEL-ÜBERSICHT

Artikel-Nr.	ICX-4.1 Bohrer grün ●	Artikel	Preis €
C-032-141008		D1 Bohrer grün 8mm	19,90*
C-032-141010		D1 Bohrer grün 10mm	19,90*
C-032-141012		D1 Bohrer grün 12,5mm	19,90*
C-032-141015		D1 Bohrer grün 15mm	19,90*
C-032-041008		D2-3 Bohrer grün 8mm	19,90*
C-032-041010		D2-3 Bohrer grün 10mm	19,90*
C-032-041012		D2-3 Bohrer grün 12,5mm	19,90*
C-032-041015		D2-3 Bohrer grün 15mm	19,90*
C-032-341008		D4 Bohrer grün 8mm	19,90*
C-032-341010		D4 Bohrer grün 10mm	19,90*
C-032-341012		D4 Bohrer grün 12,5mm	19,90*
C-032-341015		D4 Bohrer grün 15mm	19,90*
C-032-241000		Stop-Bohrer grün	19,90*
C-032-041000		Gingivastanze grün	19,90*

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN ARTIKEL-ÜBERSICHT

Artikel-Nr.	ICX-4.8 Bohrer blau ●	Artikel	Preis €
C-032-148008		D1 Bohrer blau 8mm	19,90*
C-032-148010		D1 Bohrer blau 10mm	19,90*
C-032-148012		D1 Bohrer blau 12,5mm	19,90*
C-032-148015		D1 Bohrer blau 15mm	19,90*
C-032-048008		D2-3 Bohrer blau 8mm	19,90*
C-032-048010		D2-3 Bohrer blau 10mm	19,90*
C-032-048012		D2-3 Bohrer blau 12,5mm	19,90*
C-032-048015		D2-3 Bohrer blau 15mm	19,90*
C-032-348008		D4 Bohrer blau 8mm	19,90*
C-032-348010		D4 Bohrer blau 10mm	19,90*
C-032-348012		D4 Bohrer blau 12,5mm	19,90*
C-032-348015		D4 Bohrer blau 15mm	19,90*
C-032-248000		Stop-Bohrer blau	19,90*
C-032-048000		Gingivastanze blau	19,90*




Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN ARTIKEL-ÜBERSICHT

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €
C-032-000008		Bohrführungshülse, Innen Ø 4,85mm · Aussen Ø 5,6mm	12,50*
C-032-000002		Führungshülse Ø Innen 1,5 · Ø Aussen 2,4	12,50*
C-032-000013		Befestigungspins D1,5	29,-*
C-032-000014		Einbringinstrument für alle Implantate Wichtig: ausser ICX-TL	29,-*
C-032-000015		Einbringinstrument Implantat für ICX-TL gelber Farbring	29,-*
C-032-000020		Befestigungsbohrer Ø1,5 für Befestigungspins	59,-*
C-032-000021		Vorbohrer alle Implanate	9,90*
C-032-000006		Universal-Bohrführungshülse Ø 2,2mm, Innen Ø 2,2mm	12,50*
C-015-100025		Sechskantinstrument SW 1,4	49,-*
C-032-000022		Vorbohrer L=6,5mm für alle Implantate ausser ICX-plus	9,90*
C-032-022110		Universalbohrer Ø 2,2 Bohrlänge bis 10mm	9,90*
C-032-022150		Universalbohrer Ø 2,2 Bohrlänge bis 15mm	9,90*
C-032-020110		ICX-MAGELLAN Universalbohrer	9,90*
C-032-000007		ICX-MAGELLAN Universal-Löffel	49,-
C-015-110020		C-015-110020 - Einbringinstrument verschraubbar ISO-Schaft +2.0mm	149,-*
C-032-000017		TL Magellan Einbringinstrument Kugelrast	59,-*
C-032-000016		Magellan Einbringinstrument Kugelrast	59,-*

Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

ICX-MAGELLAN ARTIKEL-ÜBERSICHT

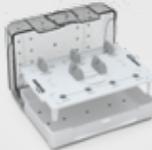Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel	Preis €
C-032-000023	ICX-3.3 Führungshülse hex		12,50*
C-032-000024	ICX-3.3 Corticalbohrer		59,-*
C-032-000025	ICX-3.3 Magellan Vorbohrer		59,-*
C-032-000009	Befestigungspin kurz		29,-*
C-015-100000	Einbringinstrument verschraubbar ISO-Schaft		79,-*
C-015-110000	Einbringinstrument verschraubbar ISO-Schaft		79,-*
N-015-110000	ICX-3.3 Einbringinstrument verschraubbar ISO-Schaft		149,-*
N-015-110020	ICX-3.3 Einbringinstrument verschraubbar ISO-Schaft +2.0mm		149,-*
N-015-110025	ICX-3.3 Einbringinstrument verschraubbar ISO-Schaft +2.5mm		149,-*
C-018-100019	Magellan Bone Spreader Box gefüllt	Bald im Verkauf! 	399,-*
C-018-000019	Magellan Bone Spreader Box ungefüllt		-

ICX-MAGELLAN X HANDBUCH 3.0



Die Implantat-Planungs-Software der Zukunft.

SERVICE HOTLINE:

Telefonische Unterstützung und Beratung unter:

+49 (0)2641 9110-0

Montag - Freitag, 07:30 - 19:00 Uhr

E-mail: magellan@medentis.de

medentis medical GmbH
Walporzheimer Str. 48-52
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Deutschland/Germany

www.medentis.de



Einfach einscannen
und ICX-MAGELLAN X®
online besuchen!

BE SMART. BE ICX.

medentis
medical



ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-MAGELLAN X HANDBUCH 3.0



DER DIGITALE ICX-WORKFLOW IN DER IMPLANTOLOGIE.
3-D-Lösungen für Diagnostik und Backward Planing.