

Patienteninformation zu ICX-SwissBone® Knochenersatzmaterial

WARUM WIRD EIN KNOCHENERSATZMATERIAL BENÖTIGT?

Die Zähne sind über die Zahnwurzeln fest im Kieferknochen verankert. So haben unsere Zähne die nötige Stabilität zum Beißen und Kauen. Infektionen oder Zahnverlust können zu einem Rückgang der Knochensubstanz führen. Als Folge sinkt die Stabilität der verbleibenden Zähne, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Qualität des Gebisses führt. Mit einem Knochenersatzmaterial zum Aufbau neuen Knochens kann diesem Prozess entgegen gewirkt werden. Speziell der Ersatz eigener Zähne durch Zahnimplantate erfordert ein kräftiges Knochenlager. Erst nach gelungenem Knochenaufbau kann das Zahnimplantat gesetzt und somit die Qualität des Gebisses wiederhergestellt werden. Ihr behandelnder Zahnarzt empfiehlt Ihnen zum Knochenaufbau ICX-SwissBone®, ein Knochenersatzmaterial natürlichen Ursprungs.

WARUM EMPFIEHLT IHR ZAHNARZT ZUM KNOCHENAUFBAU ICX-SWISSBONE®?

Dem Körper fällt es am leichtesten neuen Knochen aus der eigenen Knochensubstanz zu bilden. Aus diesem Grund werden häufig Transplantationen von einem Ort des Körpers zum Ort des beabsichtigten Neuaufbaus durchgeführt. Der Nachteil dieses Vorgehens ist offensichtlich: Es entsteht eine zweite Wunde, mit bekannten Nachteilen (z. B. Schmerzen, Narkose, usw.). Anzustreben ist die Anwendung eines Materials, welches dem körpereigenen Knochen möglichst ähnlich ist, aber keinen zweiten Eingriff erforderlich macht. ICX-SwissBone® ist ein natürliches Knochenmineral. Es wird aus Rinderknochen gewonnen und ist in seinem Aufbau dem körpereigenen Knochen sehr ähnlich. So wird dem Körper ein natürliches Knochenersatzmaterial zur Verfügung gestellt, aus dem er eigenen Knochen bilden kann.

WAS PASSIERT MIT ICX-SWISSBONE® IN IHREM KÖRPER?

Nach der Implantation wird ICX-SwissBone® schrittweise von neugebildetem Knochen durchwachsen und dabei in den eigenen Knochen integriert. Die Dauer dieses Prozesses hängt von vielen Faktoren ab und ist nach ungefähr sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen.

IST ICX-SWISSBONE® EIN SICHERERES IMPLANTATIONSMATERIAL?

ICX-SwissBone® wird aus sorgfältig ausgewählten Rinderknochen gewonnen. Zu jedem Spendertier liegt ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis und ein BSE-Test vor. Das Ausgangsmaterial wird auf sehr hohe Temperaturen erhitzt und dadurch das natürliche Knochenmineral ICX-SwissBone® gewonnen. Die Herstellung erfolgt in der Schweiz. Während des gesamten Prozesses unterliegt das Material strikten Qualitäts- und Sicherheitskontrollen. ICX-SwissBone® erfüllt alle nationalen und internationalen Sicherheitsstandards.

Patienteninformation zu ICX-SwissBone® Knochenersatzmaterial

WELCHE ALTERNATIVEN ZU ICX-SWISSBONE® GIBT ES?

Alternativen zur Verwendung von ICX-SwissBone® sind die Transplantation Ihres eigenen Knochens, oder der Einsatz eines synthetisch hergestellten Knochenersatzmaterials. Ihr behandelnder Zahnarzt wird Sie über die Vor- und Nachteile dieser Alternativen zu ICX-SwissBone® aufklären.

GIBT ES EINSCHRÄNKUNGEN IN DER ANWENDUNG?

ICX-SwissBone® sollte nicht angewendet werden bei Patienten mit:

- akuter oder chronischer Infektion (Osteomyelitis) im Operationsgebiet
- Stoffwechselkrankheiten, wie nicht eingestellter Diabetes, schweren Schilddrüsenüberfunktionen, ausgeprägten Knochenstoffwechselerkrankungen
- schweren Leber- und Nierenfunktionsstörungen
- hoch dosierter Kortikoid-Therapie

WIE IST DAS VERHALTEN IM FALLE EINER SCHWANGERSCHAFT ODER IN DER STILLZEIT?

Über Nebenwirkungen in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit liegen keine Studien bzw. Daten vor. Aus Sicherheitsgründen wird eine Behandlung mit ICX-SwissBone® bei schwangeren oder stillenden Frauen nicht empfohlen.

ERKLÄRUNG:

Ich habe alles gelesen und verstanden.

Ich wurde von meinem Arzt über die Behandlung mit ICX-SwissBone® aufgeklärt.

Ich habe den Inhalt der Aufklärung verstanden und stimme der Behandlung mit ICX-SwissBone® zu.

Stand: März 2021

ICX-SwissBone®

Knochenersatzmaterial

Ort, Datum Unterschrift der Patientin/des Patienten